




BrailleNote™ Touch


Hurtig Start Guide

Porte og knapper


Bagsiden

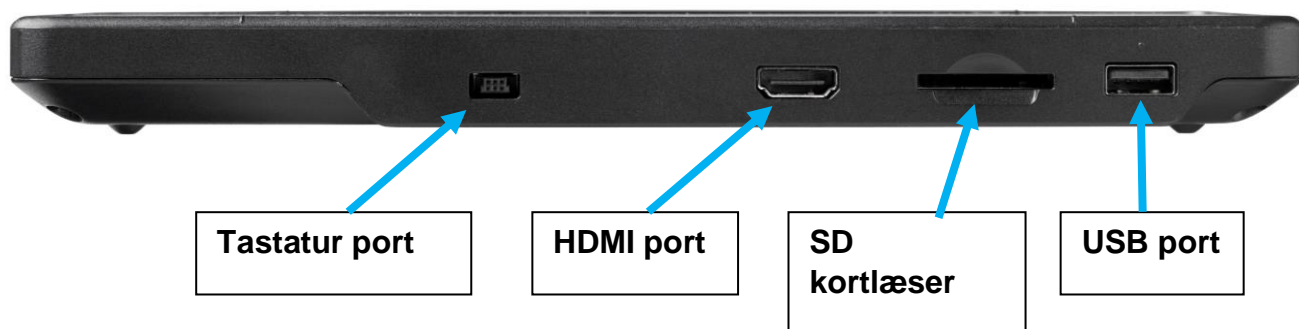


Fronten

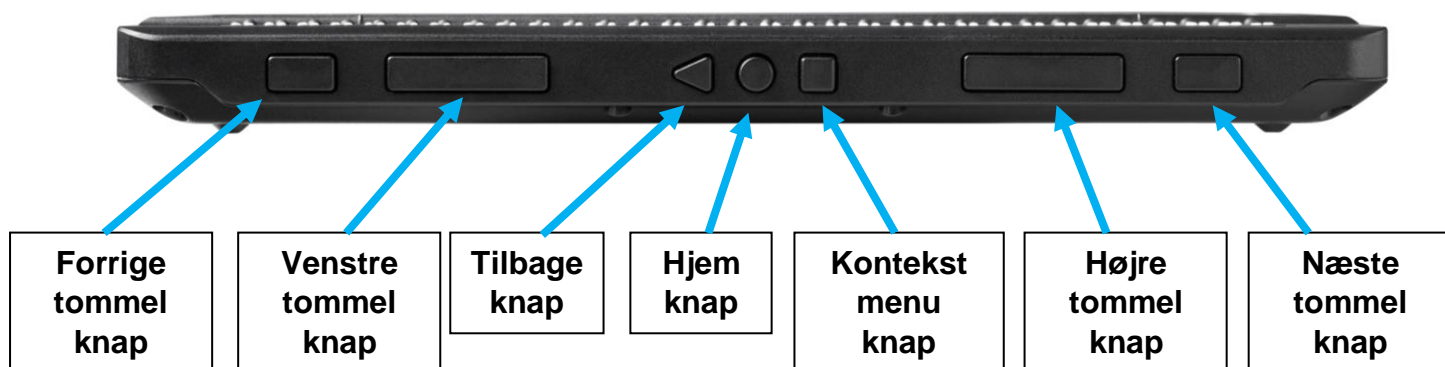


Venstre side

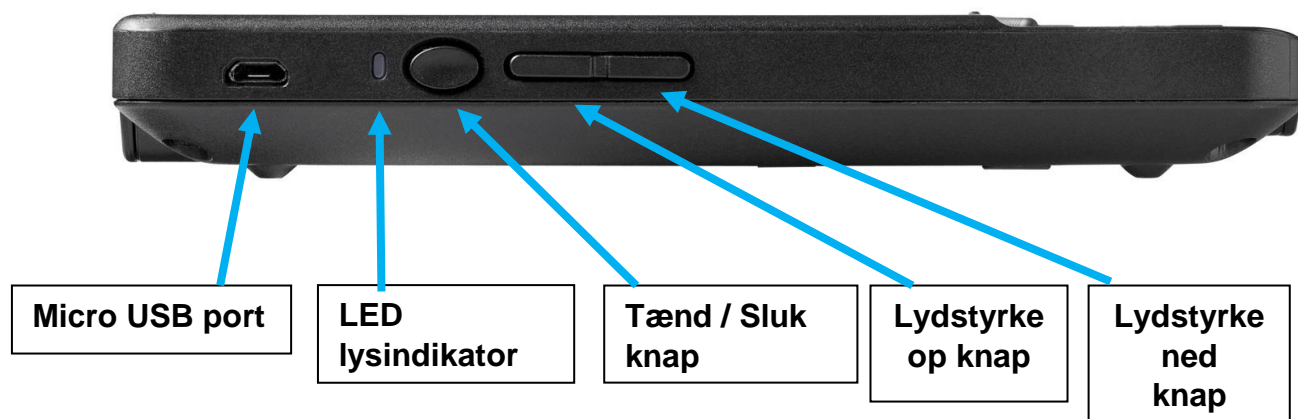

Højre side

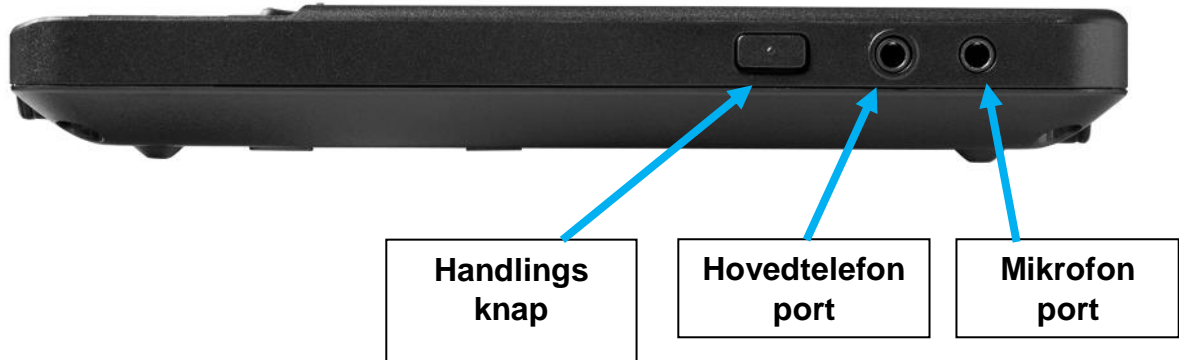

Ovenpå

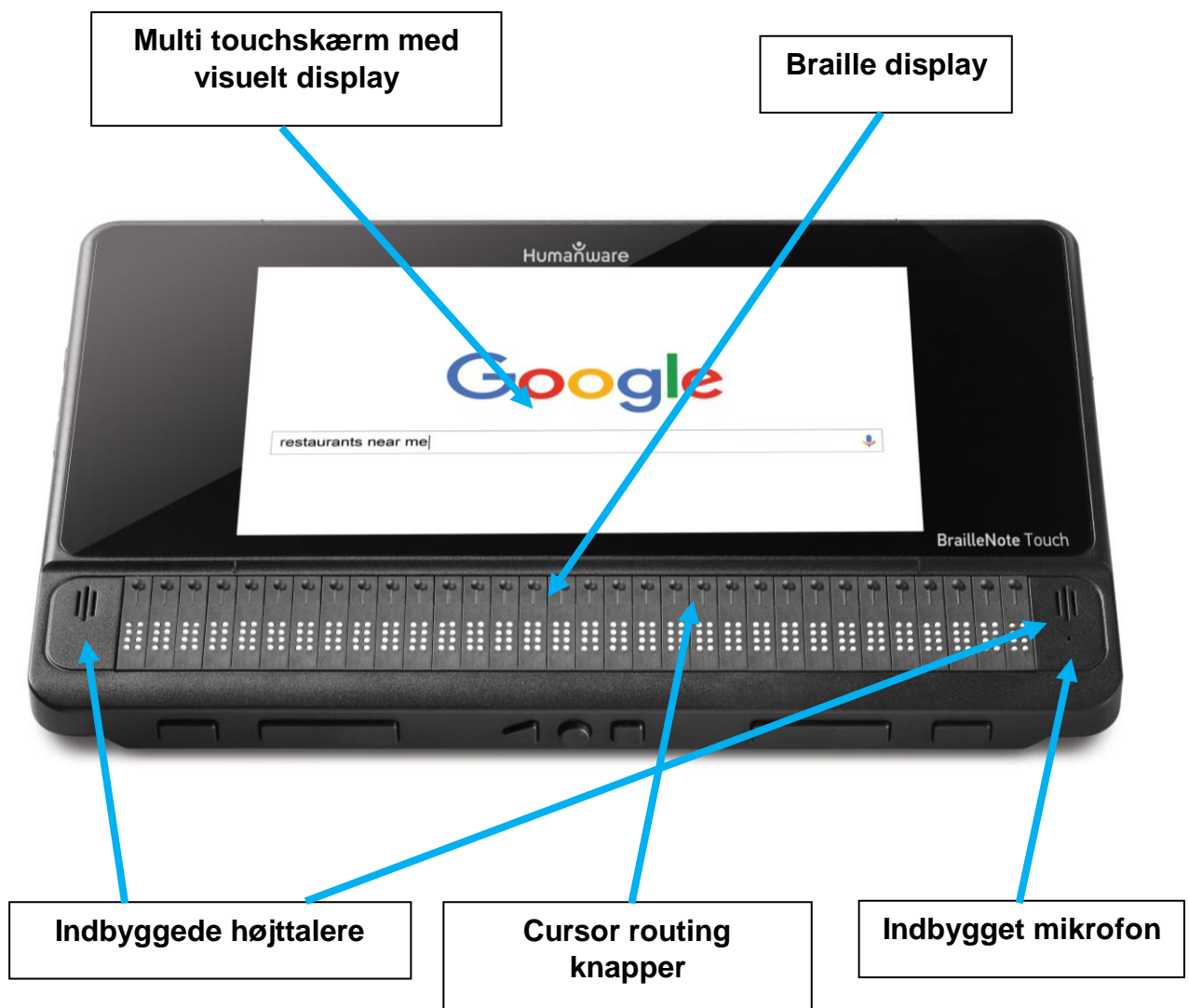

Det helt basale

Tænd og Sluk for din enhed

For at tænde for din BrailleNote Touch skal du trykke og holde **Tænd / Sluk knappen** nede i seks sekunder.

Skal du slukke for din BrailleNote Touch skal du trykke og holde **Tænd / Sluk knappen** nede i tre sekunder. Du vil fåannonceringen "Sluk". Vælg elementet sluk og naviger herefter til OK.

Brug standby tilstand

Du kan sætte din BrailleNote Touch til "at sove" ved et hurtigt tryk på **Tænd / Sluk knappen**.

For at "vække den" op igen, tryk hurtigt på **Tænd / Sluk knappen**.

Hovedmenuen

Hovedmenuen fungerer som dit udgangspunkt og præsenterer dig for en liste over nogle af dine applikationer.

**** De følgende kommandoer kan benyttes ved navigation i alle menuer, lister og applikationer på din BrailleNote Touch ****

Du kan til enhver tid gå til Hovedmenuen ved et hurtigt tryk på **Hjem knappen** eller ved at trykke **Mellemrum med punkt 1 til 6**.

For at navigere ned gennem Hovedmenuen skal du trykke hurtigt på **Næste** (helt til højre) **tommel knap** eller trykke **Mellemrum med 4**.

For at navigere op gennem Hovedmenuen, tryk hurtigt på **Forrige** (helt til venstre) **tommel knap** eller trykke **Mellemrum med 1**.

For at vælge et menu element skal du navigere til det pågældende og trykke på **Enter** eller trykke på en af **cursor routing knapperne**.

Indskrivning af braille

Du har to forskellige muligheder for at indskrive braille:

- Ved at gøre brug af det fysiske braille tastatur, eller
- Ved at gøre brug af touchskærmen

Ønsker du at indskrive med det fysiske tastatur: Så skal du blot sikre dig at tastaturet er placeret oven på touchskærmen og du kan straks begynde at skrive.

Ønsker du derimod at indskrive via touch: Løft det fysiske tastatur væk fra touchskærmen. Herefter skal enheden kalibreres og være i stand til at "genkende dine fingre". Placer alle dine ti fingre i den position du ønsker at indskrive braille med og placer dem derefter direkte på touchskærmen. Hvis kalibreringen gennemføres vil du mærke en kort vibration – dette indikerer at enheden genkender dine fingre og placering. Du kan nu fortsætte og begynde at indskrive braille og udføre kommandoer udelukkende ved brug af touchskærmen.

Du kan til enhver tid kalibrere dine fingre, der er ingen begrænsninger herom.

Tjek batteriniveau

Benyt **Enter med P**. Denne kommando kan du altid benytte.

Aktiver eller deaktiver tale

Tryk og hold **Forrige** (længst til venstre) **tommel knap**. Mens du holder knappen nede skal du trykke hurtigt på **Mellemrum**. Slip herefter også **Forrige tommel knap**.

Aktiver eller deaktiver den visuelle skærm

Tryk og hold på **Næste** (længst til højre) **tommel knap**. Mens du holder knappen nede skal du trykke hurtigt på **Mellemrum**. Slip herefter også **Næste tommel knap**.

Benyt gentag funktionen

For at få gentaget den seneste talte annoncering igen, tryk på **Mellemrum med R**

Hjælp og Kontekst menu

Du har adgang til to niveauer af assistance på din BrailleNote Touch enhed.

- Kontekst menu – Tryk hurtigt på **Kontekst Menu knappen** eller benyt **Mellemrum med M**. Kontekst menuen giver dig en oversigt over handlinger og funktioner som du kan udføre fra det aktuelle menupunkt og / eller situation. Fokus ligger på handlinger, eksempelvis hvis du befinder dig i e-mail vil du med kontekst menuen få en oversigt over handlinger såsom send e-mail, besvar, videresend og så videre.
- Kontekst Hjælp – Benyt **Mellemrum med H**. Kontekst hjælpen giver dig en liste over generelle navigationsmuligheder som du kan udføre fra det aktuelle menupunkt og / eller situation. Fokus er her på navigation og generelle muligheder.

Slå KeySoft til og fra

Du kan slå KeySoft fra ved at trykke hurtigt på **Hjem knappen** tre gange efter hinanden.

For at aktivere KeySoft igen kan du gentage ovenstående eller trykke hurtigt på **Forrige** (længst til venstre) **tommel knap** samt **Næste** (længst til højre) **tommel knap** på samme tid.

Få annonceret dato og klokkeslæt

For at få annonceret den aktuelle dato, benyt **Enter med D**.

For at få annonceret klokkeslættet, benyt **Enter med T**

Overblik over KeySoft applikationer

KeySoft applikationerne er klar til brug på din nye BrailleNote Touch. Disse applikationer er som følger:

Kontakter: Opbevar information omkring dine kontakter, herunder navn, e-mail adresse, telefonnummer, hjemmeadresse og så videre. Du kan synkronisere dine kontakter fra en Google konto eller lignende.

E-mail: Send og modtag e-mails fra alle dine konti. Læs dine e-mails og arbejd med de vedhæftede filer.

Internet: Browse rundt på hjemmesider og få adgang til den enorme mængde af information som det moderne internet giver. Din BrailleNote Touch giver dig en utrolig brugervenlig internet browsing oplevelse.

Tekstbehandler: Opret dokumenter, åben dokumenter herunder Word filer fra eksterne kilder såsom USB medier og fra vedhæftede e-mails, udskriv dokumenter via USB eller WiFi og producer flotte og præsentable formaterede dokumenter.

Kalender: Planlæg dine aftaler, gennemgå og hold styr på dem og synkroniser med din Google konto eller lignende.

Filstyring: Håndter dine mapper og filer på din BrailleNote Touch. Opret mapper, kopier dokumenter og filer, omdøb dokumenter, flyt dem, slet dem og del dem med applikationer og tjenester såsom Google Docs, E-mails og meget, meget mere.

Lommeregner: Udfør basale og avancerede udregninger, herunder også trigonometri.

VictorReader: Læs bøger, herunder selvfølgelig også DAISY bøger, lydbøger og tekstfiler. Lyt til din yndlingsmusik og podcasts.

Play Butik (ikke en KeySoft applikation): Play Butik er en del af Googles pakke af præinstallerede applikationer. Play Butik er Googles base for at finde og downloade applikationer fra tredjeparts udgivere, såvel som andre indhold, eksempelvis bøger, TV programmer, musik og publikationer.

Første bogstavs navigation

Du kan gøre brug af første bogstavs navigation til at springe til ethvert element i en liste på din BrailleNote Touch. Denne metode bruges ved at indskrive det første bogstav i det ønskede elements navn. Eksempelvis kan du i Hovedmenuen springe direkte til Tekstbehandler elementet ved at indskrive bogstavet T. Dette fungerer i menuer og KeySoft applikationer samt ved langt størstedelen af alle tredjeparts applikationer.

Tredjeparts applikationer

BrailleNote Touch er verdens første Google Certificerede Braille tablet. Dette giver dig fuld adgang til Google Play Butik hvor du kan downloade en enorm mængde af forskellige tredjeparts applikationer. Dette inkluderer populære applikationer og tjenestersåsom BBC iPlayer, Dropbox, Skype, Facebook, Twitter, eBay og mange, mange flere.