

Denne lynvejledning er udarbejdet for at hjælpe sundhedspersonale og andre brugere med systemets funktionelle aspekter alene. Vejledningen træder ikke i stedet for generelle sikkerhedsadvarsler, forsigtighedsforanstaltninger og anbefalinger i produktets brugervejledning, varenummer 630933DK.


Se i brugervejledningen til produktet, inden dette produkt tages i brug.

### Indikationer:

- Madrasserne *Auto Logic* og *Auto Logic* er udformet til plejemodtagere, der vejer op til 200 kg (440 lb).
- *Auto Logic* og *Aura Logic*® systemerne er velegnede til forebyggelse og/eller behandling af alle typer tryksår, når de kombineres med et personligt tilpasset og omfattende program for håndtering af tryksår.

**Kontraindikation:** Brug ikke *Auto Logic* og *Aura Logic* systemerne til plejemodtagere med ustabile brud på ryggen.

**Forsigtig:** Hvis en plejemodtager har andre ustabile brud eller befinder sig i en tilstand, som kan forværres af en blød eller bevægelig overflade, bør der søges rådgivning hos en specialiseret læge før brug.

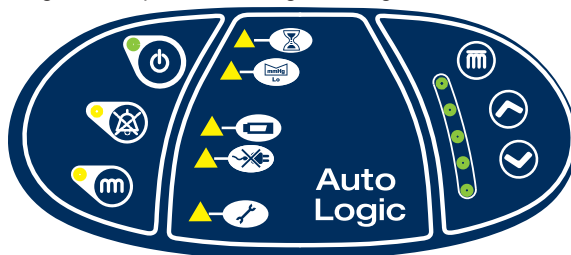

Den gule Vent-indikator lyser, når madrassen/siddepuden pumpes op. Indikatoren bliver ved med at lyse, indtil madrassen/siddepuden er pumpet helt op.



Den røde indikator for Lavt tryk lyser, når pumpen registrerer et lavt tryk i madrassen/siddepuden. Der lyder en alarm, medmindre lyden annulleres ved hjælp af alarmdæmpningsknappen. Indikatoren slukkes, når det normale tryk er nået. Kontrollér, at CPR-enheden er lukket, og at slangerne er tilsluttet korrekt.



Den gule indikator for Lav batteriladning lyser i to timer, før batteriet er helt afladet. Én time før batteriet er helt afladet, skifter pumpen til reaktiv tilstand (konstant lavt tryk, CLP), der lyder en alarm, og den gule indikator blinker.



Den røde indikator for Strømsvigt lyser, når der registreres et strømsvigt i netspændingen, og der ikke er nødstrømforsyning til rådighed. Der lyder en alarm, indtil strømmen gentilsluttes, eller pumpen slukkes ved hjælp af Tænd/Standby-knappen.



Den gule Service-indikator lyser op og bliver ved med at lyse i et indstillet antal driftstimer; dette angiver, at der skal udføres service på pumpen. Pumpen fortsætter med at fungere normalt, selv om Service-indikatoren lyser. Hvis den gule Service-indikator blinker, har pumpen registreret en intern fejl, og der skal tilkaldes en servicetekniker.



Under en alarmtilstand (med undtagelse af alarm for strømsvigt) kan lyden af alarmen slås fra ved at trykke på denne knap. Den gule indikator bliver ved med at lyse, men alarmlyden bliver slået fra i 15 minutter, eller indtil alarmtilstanden er afhjulpet.




Vælger den reaktive tilstand (konstant lavt tryk, CLP), hvor trykket ikke skifter. Den gule indikator lyser, når pumpen er i denne tilstand. Når den aktive (skiftende) tilstand vælges (standard), slukkes den gule indikator.

Tryk på denne knap, og hold den inde i ca. 4 sekunder for at aktivere den reaktive tilstand (CLP). Ændringen vil finde sted efter afslutningen af den næste fuldstændige skiftedyklus, hvilket betyder, at der kan forekomme en forsinkelse på 10 minutter.



Tryk på Autofirm-knappen, og hold den inde i to sekunder for at aktivere Autofirm-funktionen. Når den er aktiveret, danner Autofirm en midlertidig fast overflade, så der kan udføres plejeprocedurer. Autofirm varer 15 minutter, hvorefter pumpen skifter tilbage til den foregående indstilling. Når pumpen er i Autofirm-funktionen, lyser LED'erne for CLP og komfort. **Denne betjening fungerer ikke, når der er en siddepude tilknyttet.**

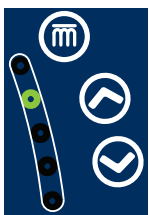


Trykket i madrassens/siddepudens celler kan indstilles manuelt ved hjælp af knapperne på pumpens kontrolpanel for at gøre det så behageligt som muligt for plejemodtageren. Den grønne indikator til venstre for knapperne viser trykindstillingen.

### Tilbehør

#### Batteripakke


(Produkt nr. BBP600)

**FORSIGTIG:** Batteriet er ikke egnet til anvendelse inden for hjemmeplejen.

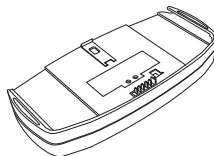


#### Aura Logic Siddepude

(Produkt nr. PXS001)

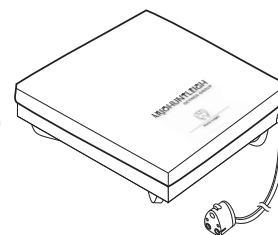

## Installation


### Auto Logic 110 (topmadras)

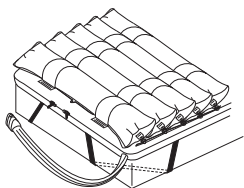

Anbring topmadrassen oven på bundmadrassen med slangesættet i fodenden af sengen og CPR-enheden i hovedenden. Madrassens celler skal vende opad.

Fastgør topmadrassen til den underliggende madras ved hjælp af de fire hjørnestropper.


### Auto Logic 175/200 (helmadras)

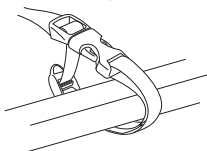

Anbring helmadrassen direkte oven på sengebunden med slangesættet i fodenden af sengen og CPR-enheden i hovedenden. Madrassens celler skal vende opad.

Brug de medfølgende stropper (4 i hver side) til at sikre, at helmadrassen er fastgjort til sengeplatformens bevægelige dele.

### Sådan færdiginstalleres madrassen

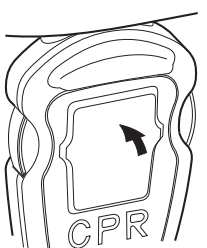

Lyn beskyttelsesbetrækket på madrassen. Sørg for, at logoet vender opad og er placeret i fodenden af madrassen.

Sørg for, at CPR-enheden klikkes ind i lukket

Sørg for, at CPR-enheden og netledningen ikke kan komme i klemme i sengens bevægelige dele eller andre steder med samme. **Der skal altid være adgang til CPR-enheden.**

### Aura Logic siddepude



Anbring puden oven på stolesædet. Stå foran stolen med ansigtet vendt mod den, og kontrollér, at cellerne vender opad, at slangesættet stikker ud af det forreste højre hjørne af puden, og at cellerne forløber vandret hen over stolen med 'V'-formen pegende mod stolens forkant.

Benyt aldrig siddepuden uden en underliggende skumpude, og sørg for, at det

beskyttende overbetræk altid er sat på siddepuden, når den er i brug.

### Installering af pumpen





Anbring pumpen med fødderne nedad på et hvilket som helst vandret underlag, eller hæng den evt. op i fodenden af sengen ved hjælp af ophængsøjlerne.

Sørg for, at slangesættet til madrassen/siddepuden ikke er "knækket" eller snoet, og tilslut det til pumpen (der skal lyde et klik).

Sørg for, at slangesættet er korrekt tilsluttet til pumpen.


Sæt stikket i en egnet stikkontakt.

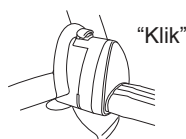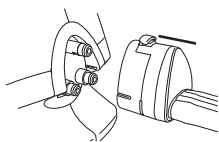

## Ledningsføring

Find kanalen, der løber langs madrassen på den modsatte side af slangesættet og CPR-enheden.

Før den lige del af ledningskablet langs madrassens side, idet den omkrænger kabelkanalen fæstnes rundt om ledningskablet ved hjælp af trykknapperne.

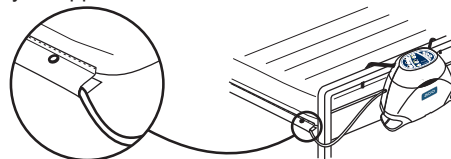

## Sengeheste

Overhold altid den lokale praksis, OG følg brugervejledningen til produktet i forbindelse med brug af sengeheste.

## Lynstart

Når Auto Logic pumpen slutes til netspændingen, eller der tilsluttes et batteri, lyder der et bip, og der køres en selvtest af ca. 10 sekunders varighed. Når testen er færdig, lyder der endnu et bip, og pumpen er klar til brug.



Tryk på Tænd/Standby-knappen på pumpens betjeningspanel.

Det tager ca. 7 minutter at pumpe topmadrassen helt op, mens det tager 15 minutter for helmadrassen og 3 minutter for siddepuden.


Læg et lagen over madrassen, og fold det løst rundt om den. Så snart plejemodtageren ligger på madrassen, registrerer og indstiller pumpen automatisk trykket i cellerne for at understøtte plejemodtageren.

## Transporttilstand

Hvis en plejemodtager, der bruger Auto Logic madrassystemet, skal transporteres, skal der trykkes på Tænd/Standby-knappen i 2 sekunder for at sætte pumpen på standby, hvorefter slangesættet skal afmonteres fra pumpen. Herved skifter systemet automatisk til transporttilstand. Plejemodtageren forbliver understøttet af madrassen i op til 12 timer.


## CPR-ENHED I TILFÆLDE AF HJERTESTOP

Hvis en plejemodtager får hjertestop, og der skal foretages genoplivningsforsøg (CPR):

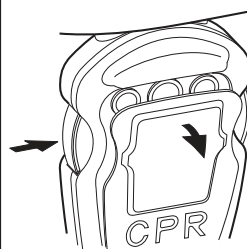

**Sådan aktiveres CPR-enheden:**

Tryk samtidigt på de to CPR-udløserknapper.

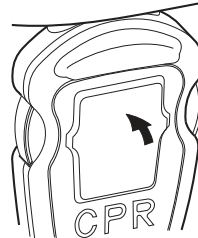

**Sådan nulstilles CPR-enheden:**

Tryk foran på CPR-enheden, indtil den klikker på plads.

Designpolitik og ophavsret

® og ™ er varemærker, der tilhører Arjo-koncernen.

© Arjo 2019.

Vi bestræber os på kontinuerlig produktforbedring, hvorfor vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Indholdet af denne publikation må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, uden tilladelse fra Arjo.



ArjoHuntleigh AB  
Hans Michelsensgatan 10  
211 20 Malmö, Sweden  
www.arjo.com

