


Vejledning

# TD I-110



## Kassens indhold

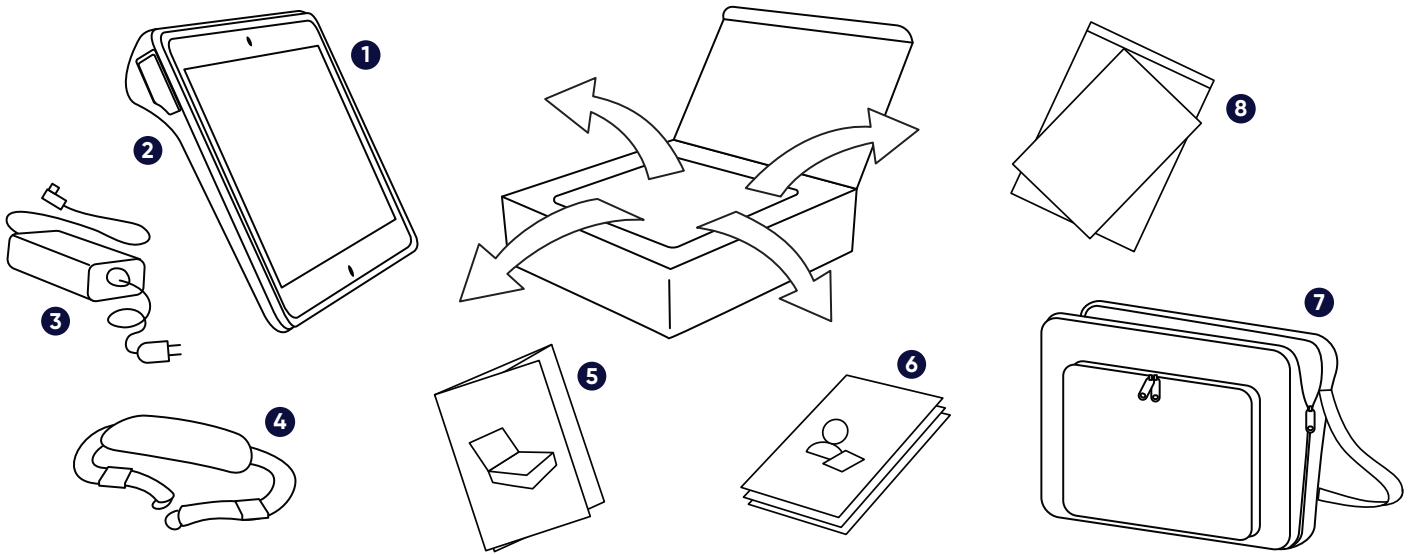


- 1 Enhed
- 2 Solidt etui
- 3 Strømledning


- 4 Skulderrem
- 5 Vejledning
- 6 Undervisningskort til TD Snap

- 7 Rejsetaske
- 8 Dokumenter om sikkerhed og standarder, licens og konfiguration


## Lær din enhed at kende

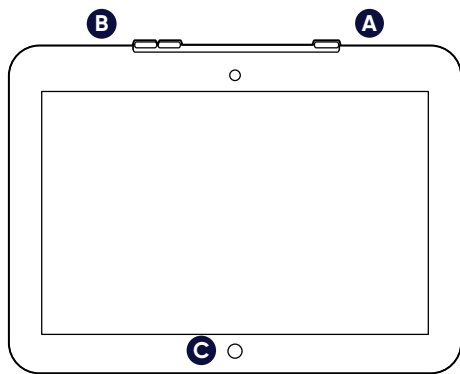

Forside

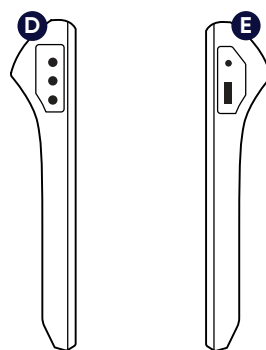

Sider

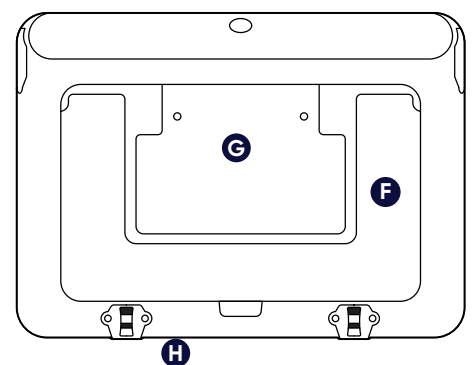

Bagside

- A Tænd/sluk-knap
- B Knapper til lydstyrke
- C Startknap

- D Porte til lyd, kontakt og strømstik
- E USB-porte



- F Fod
- G Fastgørelsespunkt
- H Fastgørelsespunkter til skulderrem

Følg trinnene i vejledningen om konfiguration og start af brug af enheden.

## Trin 1: Førstegangskonfiguration

### Start enheden


- 1 Slut strømkablet til enheden og sæt stikket i en stikkontakt
- 2 Tryk på tænd/sluk-knappen

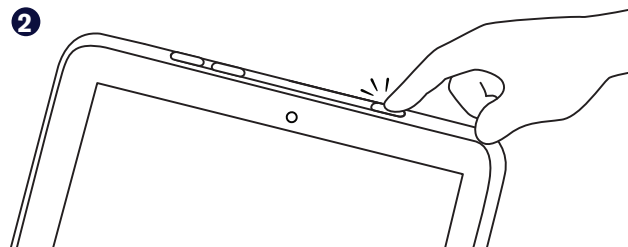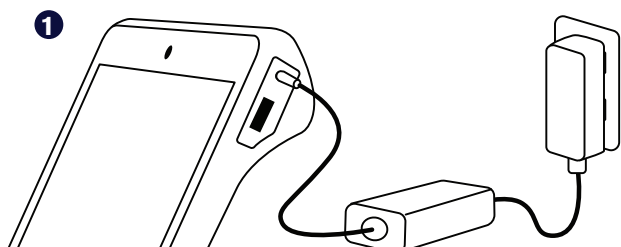

### Konfiguration af Windows

Hvis din enhed ikke er konfigureret på forhånd, bliver du bedt om først at afslutte konfigurationen af Windows.

Konfigurationen kræver ikke en Microsoft-konto, men vi anbefaler, at du bruger eller opretter en konto til brugeren og ikke bruger en andens konto.

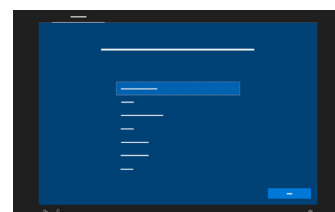

## Trin 2: Konfigurer TD Snap



Dobbeltryk på ikonet for at starte appen, TD Snap. Følg anvisningerne for at oprette en ny bruger, eller gendan en gemt brugerfil.

## Trin 3: Montering og placering

Enheden kan placeres ved hjælp af et monteringsystem, ligge fladt på en overflade eller støttes af den indbyggede støttefod. Start med at placere brugeren i en komfortabel stilling. Indstil derefter placeringen af enheden, så brugeren kan se skærmen klart og har nem adgang til sin ønskede adgangsmetode. Placer altid enheden, så den passer til brugeren. Det kan blive nødvendigt at justere placeringen af enheden i løbet af dagen. Brug skulderremmen, når du skal transportere enheden sikkert.

## Trin 4: Undervisningskort til TD Snap

Fortsæt konfigurationen med undervisningskortene til TD Snap, der fulgte med din enhed. Undervisningskortene indeholder en trinvis gennemgang af funktionerne i TD Snap, grundlæggende redigering, sikkerhedskopiering af dine data og visse andre aktiviteter, der gør integrationen af TD Snap i din dagligdag nemmere.

## Øvrige ressourcer

Scan QR-koderne med din telefon, eller brug linkene.



Tobii Dynavox  
[tobiidynavox.com](https://tobiidynavox.com)



myTobiiDynavox  
[mytobiidynavox.com](https://mytobiidynavox.com)



TD Facebook Community  
[grco.de/TDFB](https://grco.de/TDFB)



Tobii Dynavoxs  
undervisningscenter  
(kun på engelsk)  
[learn.tobiidynavox.com](https://learn.tobiidynavox.com)



Dokumenter til TD I-110  
[grco.de/I-110manual](https://grco.de/I-110manual)



Dokumenter til TD Snap  
[grco.de/bcorRt](https://grco.de/bcorRt)



Lær om adgangsmetoder  
[grco.de/bbFvk6](https://grco.de/bbFvk6)



For teknisk support, bedes  
du kontakte din lokale Tobii  
Dynavox-repræsentant.