
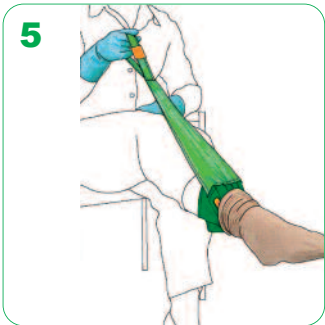


magnide

another Arion brand

magnide

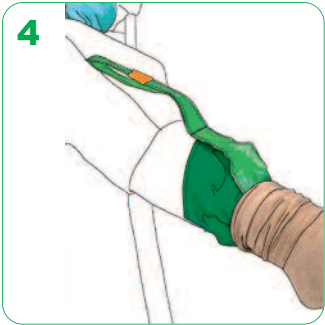

BRUGSANVISNING

1. Placer Magnide på foden (sørg for, at den orange flap ved tæerne er foldet rigtigt tilbage, så magneten klikker fast)
2. Træk strømpen ud over Magnide
3. Træk strømpen over foden, så hælen sidder på det rigtige sted
4. Sørg for, at den lysegrønne løkke kan nås i toppen af strømpen
5. Træk derefter i den lysegrønne løkke for at fjerne Magnide

Gør Magnide klar til brug

- Fastgør toppen af løkken til toppen af Magnide
- Vend Magnide om og læg den på en flad overflade
- Fold de to sider med magneter ind til midten, så magneterne lukker. De orange syninger er nu synlige på ydersiden
- Luk den orange flap (ved tæerne), så magneten lukker

STØRRELSESANVISNING

Størrelse	Skostørrelse
Medium	≤ 40
Large	> 40

INTRODUKTION

Magnide er en effektiv løsning til påtagning af kompressionsstrømper.

Din nye Magnide er kendetegnet ved en høj grad af effektivitet, komfort og kvalitet. At tage kompressionsstrømper på og af er en anstrengende opgave, som ofte giver problemer (f.eks. ødelagte strømper eller forstrakte muskler). Magnide er designet til at afhjælpe alle disse problemer.

Magnide er både værdifuld for brugerne af kompressionsstrømper samt det professionelle plejepersonale.

Læs venligst vedlagte brugsanvisning grundigt for at sikre optimal brug af Magnide. Kontakt venligst forhandleren, hvis du har nogen spørgsmål.

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER

- Reducerer den fysiske belastning for både brugerne af kompressionsstrømper og plejepersonalet
- Øger patientens selvstændighed
- Forøger behandlingseffektivitet
- Kompressionsstrømperne bevarer deres kompression og egenskaber længere
- Magnide er fremstillet i et innovativt, smidigt og let materiale

Benyt kun den enkelte Magnide til én patient. Hvis Magnide benyttes til flere personer, skal den rengøres i en 70% ethanol opløsning.

VASKEANVISNING



- Magnide må kun vaskes i hånden ved lav temperatur (30°C)
- Tør påtageren med et håndklæde – må ikke stryges
- Må ikke renses kemisk eller bleges
- Udsæt ikke påtageren for stærke varmekilder f.eks. direkte sollys, tændte radiatorer el.lign

VIGTIGT

- Advarsel! Træd ikke på Magnide, da man let kan glide på det glatte materiale.
- Advarsel! Magnide indeholder flere magneter, hold derfor dette produkt på afstand af pacemakere og defibrilatorer. Det magnetiske felt kan forstyrre funktionen af disse apparater (minimumsafstand = 30 cm).
- Ved brugen af Magnide er det vigtigt at bruger den rigtige størrelse. Ved brug af en forkert størrelse vil påtageren ikke fungere optimalt, gå i stykker eller slides hurtigt. Den rette størrelse afhænger af ens kostørrelse.
- Benyt specielle gummihandsker ved brug af Magnide. Gummihandskerne giver et optimalt greb på strømpen og mindsker den fysiske belastning.
- Dette produkt er omfattet af en garanti på seks måneder fra købsdatoen. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Opstår der reklamationer i garantiperioden, som kan henføres til materiale og/eller produktionsfejl, erstattes produktet gratis. Ombytning sker kun mod forevisning af gyldig kvittering, hvor det kan påvises, at klagen indgives indenfor garantiperioden.
- Garantien bortfalder, hvis defekten er opstået på grund af forkert brug eller hvis påtageren er blevet brugt på flere patienter. Kontakt venligst din forhandler for at benytte garantien. Inden returnering bedes produktet vaskes efter de tidligere anførte vaskeforskrifter.

magnide

another Arion brand



www.arion-group.com



Arion | 6161 AG Geleen | The Netherlands | www.arion-group.com