

RotoFlex® Basic+ fuldautomatisk

KVIK-GUIDE

SÅDAN BRUGER DU ROTATIONSFUNKTIONEN

1. Læg dig godt til rette i sengen
2. Tag fjernbetjeningen på siden af sengen og hold den røde knap med stolesymbolet inde, indtil sengen har indstillet sig som en stol og har roteret dig rundt, så du sidder med benene ud over siden af sengen
3. Rejs dig fra sengen



1. Sæt dig godt til rette i stolen med bagdelen godt inde ved ryglænet
2. Tag fjernbetjeningen på siden af sengen og hold den grønne knap med flad sengsymbolet inde indtil sengen har roteret dig tilbage ind i sengen og madras og sengebund er blevet plan igen
3. Indstil evt. hoved- og/eller ben-del ved hjælp af fjernbetjeningen, så du ligger behageligt i sengen

HØJDEJUSTERBAR FODDEL

Som en tilkøbsmulighed kan du få RotoFlex® Basic+ med højdejusterbar fod-del. Den højdejusterbare fod-del hæves og sænkes ved hjælp af fjernbetjeningen, der hænger i fodenden af sengen. Funktionen er gavnlig for borgere, der har dårligt blodomløb i benene. Bemærk, at hvis fod-delen er hævet, så kan sengen ikke rotere.



SÅDAN BRUGER DU SENGEHESTENE

Sengen har to sengeheste på hver side: En ved hovedet og en langs siden.

Du løfter sengehesten ved at trykke ind på skiven (se rød cirkel) med den ene hånd og hæve sengehesten med den anden hånd.

Du tager sengehesten af ved at holde skiven inde og hæve sengehesten hele vejen op i lodret stilling. Holde skiven inde og løft sengehesten af.



SÅDAN BRUGER DU BREMSERNE

Tryk på grøn knap ved fodenden af sengen, nu er de to bagerste hjul låst op.

Tryk på grøn knap ved hovedgavlen af sengen, nu er de to forreste hjul låst op.

Tryk på rød knap ved fodenden af sengen, nu er de to bagerste hjul låst.

Tryk på rød knap ved hovedgavlen af sengen, nu er de to forreste hjul låst.

SÅDAN BRUGER DU FJERNBETJENINGERNE

Ryg-del op

Ben-del op

Hæve sengen

Indstil stol og roter

Slip knappen inden sengen begynder at rotere, hvis du ønsker kombi-funktionen: hæve hoved og ben samtidig



Ryg-del ned

Ben-del ned

Sænke sengen

Indstil til flad seng

Vælger du en seng med højdejusterbar fod-del, bruger du denne fjernbetjening, der hæver og sænker fod-delen, når du trykker op og ned på pilene.



RotoFlex® Basic

VIDEO-MANUALER

VIDEO-DEMO AF SENGENS FUNKTIONER:

<https://www.youtube.com/watch?v=VLIrlozm1uE>

SAMLING OG DEMONTERING AF SENGEN

<https://www.dropbox.com/sh/zpkuuulb90ya1m/AAZr6oqg5GoKnr6hpicUenEa?dl=0>