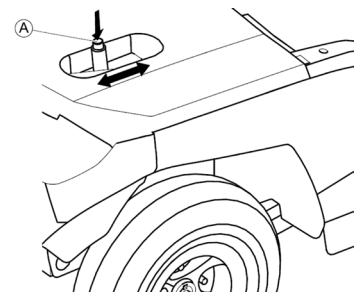
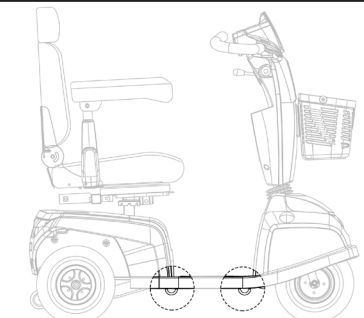
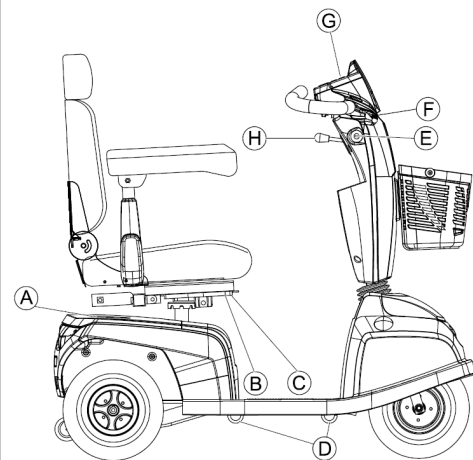
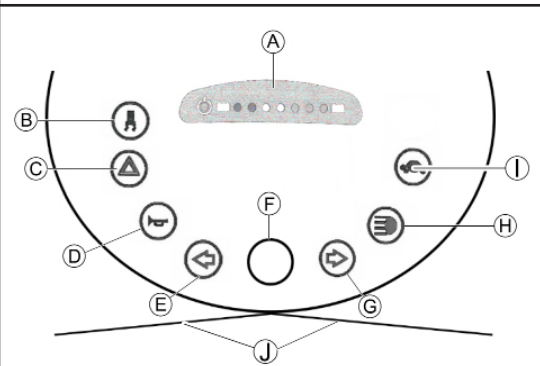
	<p><b>Indstilling af sædeenheden</b></p> <p>Med håndtaget i venstre side kan rygvinklen justeres frem/tilbage. Med håndtagene under sædet, kan sædet justeres frem/tilbage, det kan roteres og afmonteres.</p> <p>Armlænen er opklappelige og justerbar i vinkel og bredde.</p> <p>Nakkestøtte kan justeres i højden.</p>
	<p><b>Frikobling af motor</b></p> <p>Frikoblingen af motoren sidder bagpå scooteren i højre side.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluk for el-scooteren (nøgleslyder).</li> <li>2. Tryk på den røde knap i toppen (A) på frikoblingshåndtaget.</li> <li>3. Skub udkoblingsarmen fremad. Motoren er nu koblet ud og el-scooteren kan skubbes med håndkraft.</li> </ol>
	<p><b>Transport af el-scooteren</b></p> <p>El-scooteren kan transporteres i bil, med tog og fly uden begrænsninger. Før transport af el-scooteren skal det sikres, at motoren er koblet til, styreboksen er slukket og den er forsvarlig forankret/fastspændt i de dertil indrettede forankringspunkter. Se efter punkterne der er mærket med symbolet for forankringspunkter</p>

Dette er en kortfattet produktvejledning. For yderligere information om indstilling og betjening af **Invacare Orion Metro**, se venligst brugermanualen.  
Brugermanualen medfølger altid el-scooteren ved levering og kan ligesom øvrig dokumentation downloades på Invacares hjemmeside: [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

## Quick betjeningsvejledning for Invacare Orion Metro el-scooter

	<p><b>El-scooterens komponenter</b></p> <p>A: Frikoblingshåndtag B: Sæde frem/tilbage (under sædet i højre side) C: Sæde drej og afmonter (under sædet i venstre side) D: Forankringspunkter ifm. transport E: Nøgleslyder (tænd/sluk) F: Bremseshåndtag (højre hånd) G: Betjeningspanel H: Greb til justering af ratstammens vinkel</p>
	<p><b>Betjeningspanelet</b></p> <p>A: Batterikapacitet og status B: Tænd/sluk for hastighedsreduktion (sænkning af hastighed i kurver) C: Advarselslamper D: Horn E: Venstre blinklys F: Hastighedsregulatorknop G: Højre blinklys H: Lys I: Kørsel med reduceret hastighed J: Speeder</p>