

QUICK GUIDE MULTILINE NEXT AC



Håndbetjening til stol. De gule områder på patienten, er dem, den pågældende motor aktiverer.

1. Hæve og sænke rygdal
2. Hæve og sænke sæde. Hold begge knapper inde samtidig og indstil Relax-indstilling
3. Hæve og sænke foddal. Hold begge knapper inde samtidig og indstil stolen til leje
4. Hæve og sænke stolen i højden

Gul knap: Indstil til transportstol

Rød knap: Trendelenburg

STOLENS INDSTILLINGER



Seated position



Flat/bed position



Relax position



Shock/Trendelenburg position