

Funktionsbeskrivelse for Jaguar rollator

Højdejustering

- Juster højden af skubbehåndtaget, så håndtagets højde er ud for håndledet, når brugeren står med hånden ned langs siden. Juster højden ved at løsne de røde trykknapper placeret øverst på rammen. Derefter juster håndtaget til den ønskede højde og luk låseknappen sikkert.
- Tjek om alle justeringer er sikret, og at hjul og bevægelige dele er i god stand før brug.

Bremse

- For at bremse rollatoren skal De blot trække opad i bremsestangen, og holde den så længe De ønsker hjulene bremset. For at udløse bremsen skal De blot slippe bremsestangen.
- For at låse bremserne i "parkeret" position i længere periode skub bremsehåndtaget op og lås det med den røde C-clip. Når den skal frigøres igen trækkes der op i håndtaget, og den røde clip frigøres ved at skubbe den frem.
- Når rollatoren anvendes i stationær position, skal bremsen være aktiv.

Sammenfoldning

- Fjern bakken på rollatoren
- Tryk på knappen for sammenfoldning, og pres forsigtigt den bagerste rammedel imod den forreste, for at folde rollatoren sammen.



Transport anbefaling

Rollatoren er let at folde sammen for bekvemmelig transport. Hvis det er nødvendigt at transportere den, anbefaler vi at folde den, som det er skrevet i beskrivelsen ovenfor. Rollatoren skal transporteres på en måde, som er stabil og uden risiko for uønsket udfoldning.