

## ABRACE Poncho

ABRACE Poncho er et fleksibelt tyndetæppe, der fås i 3 kg og 6 kg. Ponchoen ses som et separat produkt, men kan bruges i forskellige henseender efter behov. Denne vejledning giver et fuldt overblik over, ABRACE Ponchos forskellige anvendelsesmuligheder.



Vægten fra, ABRACE Poncho placeres omkring nakke- og skulderområdet. Vægten giver en følelse af omfavnelser og tryghed, hvilket beroliger kroppens uro. ABRACE Poncho kan bruges i alle møbler eller som gående.



### Poncho krammepude

Til ABRACE Poncho kan der tilvælges en krammepude. Den giver en ekstra omfavnelser og støtte omkring nakken.

Krammepuden kan pålynes ABRACE Poncho, men kan også bruges separat. Krammepudens betræk kan tages af og vaskes.



### Poncho stropper

På bagsiden af ABRACE Poncho, er af-tagelige stropper. Stroppernes funktion er at gøre ABRACE Poncho mere mobil.

Stropperne giver ABRACE Poncho mulighed for at kunne påhænges møbler eller kørestole.

Udgør stropperne en sikkerhedsrisiko, kan de nemt aftages og gemmes væk.

### MONTERING AF STROPPER

Ved påsætning er det bedst at løsne den ene strop i et led, og på den måde sikre sig en god fastspændning. Herefter strammes stropperne.

### VEDLIGEHOLDELSE

ABRACE Relax består af tekstiler fra Gabriel®, kunstlæder og vævet tekstil, som begge har en høj slidstyrke.

Begge tekstiler er udviklet til brug hos sygehuse og kan derfor tåle følgende rengøringsmidler: Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 or Ethanol (70-85%).

### VASKEANVISNING

I tæpper og Poncho findes der plastikgranulat. De kan begge vaskes ved 60 grader. Det anbefales at putte dem i vaskepose.

Stolen må gerne sendes til rens med forbehold for, at der bliver tjekket op på tekstilernes specifikationer.