

## Yderligere praktiske anbefalinger:

- For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
- Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
- Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
- Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra barnet. Oliz® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da indholdet kan være farligt for børn under 3 år.
- DETTE ER IKKE LEGETØJ.

## Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, stof og metal efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

## Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz® produktet, er du velkommen til at kontakte os.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder længe. **Sørg for at gemme dette informationsark til senere brug.**

Ordre:

År:

Produkt: Dario dinoer



Godkendt ved EN71-1-71-2-71-3 og EN12182  
Dansk Design - er produceret i EU - [www.oliz.dk](http://www.oliz.dk)

# Oliz®



De venlige Dario Dinoer til ben hjælper med, at bringe afslapning og tryghed ind i hverdagen, samt skaber tillid, tryghed og kan tjene, som et vigtigt kommunikationsmiddel mellem børn og voksne. Målet er at hjælpe barnet, til at føle sig afslappet og tryk. Dario dinoerne kan bruges af børn, der har et behov, for at mærke sig selv.

## Dario Dino til ben

## Vigtige instruktioner før brugen af Oliz® produktet:

Oliz® Dario dinoerne er et hjælpemiddel til børn der har uro i benene. De ligner små dinosaur, som sidder omkring anklerne og hjælper børn med, at mærke sig selv og slappe af i stressede situationer.

Oliz® Dario dinoerne er designet til børn i alderen 6-10 år.  
Størrelse: Længde 190 mm - bredde 270 mm Vægt: 1kg.  
Passer til ankel 24-27 cm.

Materiale stof: 100% Imiteret læder/PU  
Materiale indvendig: 100% Metal kugler

Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

## Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Rengør Oliz® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel egnet til kropskontakt. Skal efter tørres med rent vand for at undgå skader på stoffet.

## Vigtige anvisninger:

- Oliz® Dario dinoerne skal placeres omkring barnets ankler med Dario´s ben hvilende på hver side af barnets ankler.
- Vær opmærksom på at velcroen kan krads barnet så placér dem forsigtigt omkring barnets ankler med velcro lukning bag på benet.
- Der skal være plads til 1 finger når de er lukket med velcroen, for at undgå at stoppe blodforsyningen til fødderne.
- Det er vigtigt, at overvåge barnet under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke barnet.
- Et Oliz® produkt bør kun bruges med barnets samtykke. Hvis barnet føler ubehag ved brug af produktet, skal det fjernes fra barnet.
- Vær opmærksom på, at barnet ikke bliver for vant til produktet så virkningen fortager sig. Produktet skal ses, som et hjælpemiddel mod uro og bruges i begrænsede tidsintervaller alt afhængig af barnets behov.
- Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes fra barnet med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i produktet kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

## Advarsler:

- Hvis barnet er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal Oliz® produktet bruges med særlig forsigtighed.
- Vi anbefaler generelt, at børn der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug. Hvis barnet føler sig utilpas, kan dette være en indikation af virkningen af vores produkt. I dette tilfælde skal du straks fjerne produktet.
- Hold luftvejene frie når produktet anvendes. Da stoffet ikke er åndbart.
- Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.
- Hvis barnet har en pacemaker, og produceret ligger på barnets bryst, skal dette produkt have særlig opmærksomhed. Metallet i produktet er dog ikke magnetisk.

## Opbevaring:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbevares utilgængeligt for et barn, der kræver tilsyn.
- Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.