

Conversor

DK QUICKGUIDE
Conversor Pro

Conversor Pro



1. Indstilling af dit høreapparat

Høreapparatet indstilles på "M" (mikrofon).

Tænd radioen eller fjernsynet på et program, hvor der tales, og indstil lydstyrken på dit høreapparat til et behageligt niveau.



2. Opsætning af mikrofonen

Tænd/sluk mikrofonen på den midterste knap. On/Off-knappen lyser grønt når mikrofonen er tændt.

Indstil forstærkerniveauet. Knappen lyser grønt, når lyden er forstærket.

Omskifter mellem
direktionel og omni.



3. Opsætning af modtageren

Hæng modtageren om halsen med knapperne udad.

Tænd modtageren på den nederste knap.

Juster lydniveauet.

On/Off-knappen lyser grønt, når modtageren er tændt.



4. Indstilling af lydstyrken


Høreapparatet indstilles på "T", uden at justere på lydstyrken.

På Conversor Pro modtageren skrues lydstyrken op til der høres lyd.

Skift mellem M/T indstilling på høreapparatet og juster lydniveauet på Conversor Pro modtageren, indtil lydniveauerne på de to indstillinger passer sammen.


5. Skift mikrofonen til direktionel

Mikrofonen er på direktionel, når der trykkes på den øverste knap, og den lyser grønt.

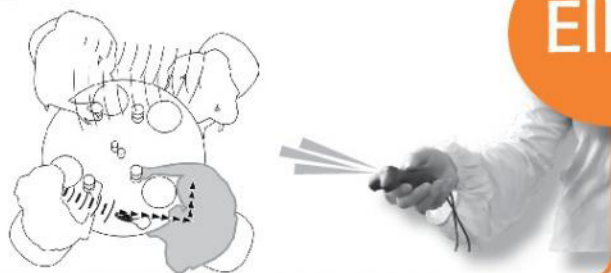


6. Skift mikrofonen til omni

Mikrofonen er på omni, når der trykkes på den øverste knap, og den ikke lyser grønt.

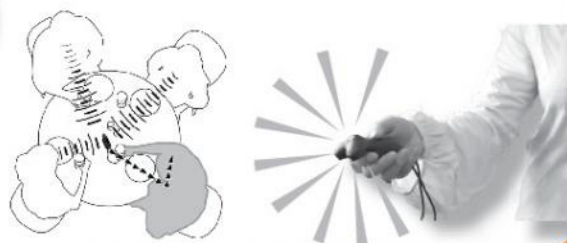

Eller

Opladning af Conversor Pro

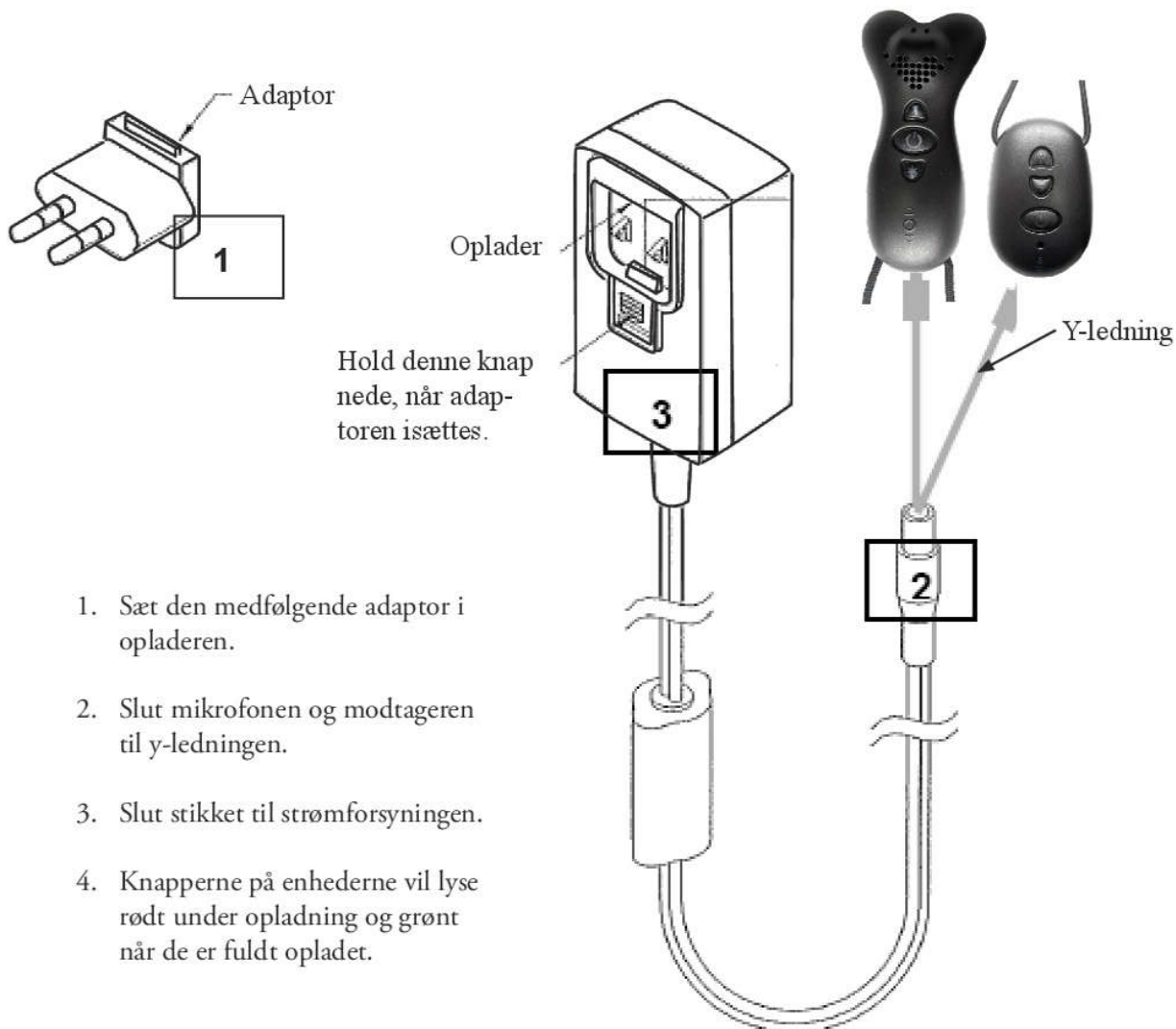

Opladningstid for fuldstændig opbrugte batterier	Ca. batterilevetid
25 min	1 time
40 min	2 timer
65 min	4 timer
90 min	6 timer
150 min	8 timer