













Quickguide

Zibo Flow Auto og Zibo Flow Auto top.



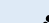

 Power	Tænd/sluk for pumpen
 Lock/unlock - Låsefunktion	Når den grønne diode lyser er panelet låst. For at låse/låse op, tryk på Lock/Unlock i 5 sek. til det grønne lys tænder/slukker. Panelet låses når det ikke har været i brug i 3 min.
 Cycle time	Her kan man vælge mellem cyklus tid på 5.10.15 minutter, lysdiaden på pumpen indikere den igangværende indstilling
 Auto Firm	Funktionen benyttes ved pleje/mobilisering. Madrassen bliver hård/statisk. Slår automatisk fra efter 20 minutter og vender tilbage til forrige indstilling. For selv at slå funktionen fra, trykkes på Auto Firm knappen igen.
 Trykindstilling	Justere trykket i madrassen baseret på patientens vægt – tryk for rejustering ved ny bruger – når der kun er ét lys er trykket indstillet
 Komfortindstilling	“0” er det tryk systemet automatisk finder. “+ 1, + 2” er et højere tryk = mere fast madras. “-1, -2” er et lavere tryk = blødere madras.
 Terapi-valg	 Alternating: Dynamisk funktion. Systemet vil veksle trykket i cellerne hvert 5.,10. eller 15. minut.
 Seat inflate	 Static: Statisk funktion. Madrassen er stillestående med samme lave tryk i alle celler.  Seat Inflation: Siddefunktion giver borgeren yderligere støtte i den siddende stilling (eks. spise).
 Alarm	Ved tryk på alarmknappen, gøres alarmer lydløse.

Alarmer


Zibo Flow Auto og Zibo Flow Auto top.




Low pressure Lavt tryk	Low pressure lampe lyser ud for symbolet: 
Årsag	CPR-ventilen kan være udløst/drejet eller der er en lækage i madrassen.
Løsning	Luk CPR-ventilen eller check mulig lækage i madrassen eller utæthed i celle/luftslange. Check at slangerne er sat ordentlig fast ind i pumpen. Kontakt depotet hvis problemet ikke kan løses.
Power failure Strømsvigt	Power failure lampe lyser ud for symbolet: 
Årsag	Fejl i strømforsyningen, der er slukket for stikkontakten, ledningen er frakoblet eller, der er slukket for pumpen.
Løsning	Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen. Sikr dig at pumpen er tændt.
NØDSITUATION HJERTESTOP, CPR	Den Gule CPR-strop findes på siden af madrassen i hovedenden.
Løsning	Ryk i CPR-stroppen så luften tømmes af madrassen. Slangerne kan også kobles fra pumpen for at tømme madrassen hurtigere for luft.

Installationsguide

Zibo Flow Auto og Zibo Flow Auto top

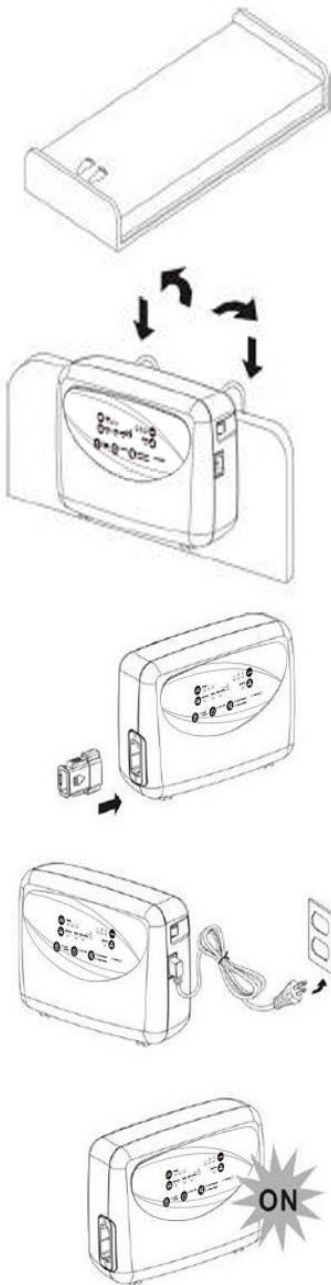

1. Placer madrassen på sengebunden. Fastgør madrassen til de *bevægelige* dele af sengebunden. Vær opmærksom på korrekt placering af fodende (se fodtryk).
OBS: Zibo Flow Auto Top. Husk at benytte "Sikkerhedsmadras" fra Zibo Care sortiment i bunden.
2. Hæng pumpen på sengegavlen (fodenden), eller placér pumpen på et fast lige underlag.
3. Sæt slangerne fra madrassen i pumpen. Når der høres et klik, er slangen korrekt fastgjort.
4. Sæt strømstikket i stikkontakten og tænd.
5. Tænd for pumpen på "powerknappen"  forrest på pumpen.
6. Check at CPR-ventilen på siden af madrassen, i hovedenden, er lukket.
Vent ca. 20-30 minutter og madrassen er fuldt oppustet og klar til brug.
7. Indstil cyklostid og patientvægt (se quickguide eller brugermanual).