



# Quick Guide

## OPUS S-DW

 Se Brugsanvisningen for uddybende info om de enkelte funktioner.

### MONTAGE

Sengeindsatsen kan tilpasses brugerens egen sengeramme eller til en ny sengeramme, så brugeren oplever at ligge i en almindelig seng.

 Se Brugsanvisningen for korrekt montage og installation af sengeindsatsen.

### HÅNDBETJENING


#### DEN GRØNNE KNAPE

Håndbetjeningens grønne knap er forprogrammeret, således at lår- og rygdel kører samtidigt:

**Op:** Lårdel kører helt op, derefter rygdel.

**Ned:** Rygdel kører helt ned, derefter lårdel.

Alle sengeindsatsens funktioner stopper automatisk, når knapperne slippes.

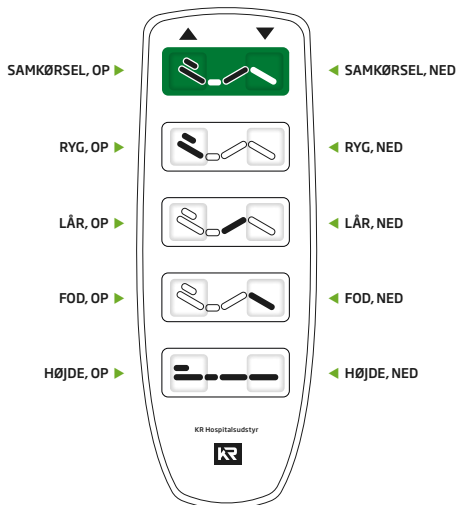

### HJUL OG BREMSER

Sengeindsatsen er udstyret med fire drejelige bremsehjul som skal låses separat.

 **Sengeindsatsens bremses skal ALTID aktiveres, når sengeindsatsen ikke skal flyttes, for at undgå ulykker.**




#### LÅST

Hjulene er låst og sengeindsatsen står fast.

Træd alle fire låsevinger ned, for at aktivere alle låsemekanismer.

**Vigtigt!** Alle fire hjul **SKAL** bremses enkeltvis, for at sengeindsatsen er forsvarligt låst.

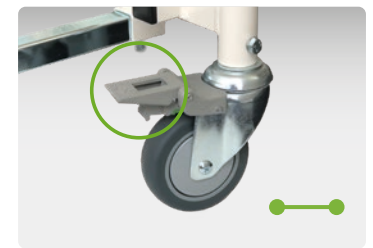

#### IKKE LÅST

Hjulene er frie og sengeindsatsen kan køre.

Tryk ned midt på låsevingen på alle fire hjul, for at frigøre alle låsemekanismer.

**Vigtigt!** Alle fire hjul **SKAL** låses op enkeltvis, for at sengeindsatsen kan køre ubesværet.

### GALGE

Galgen og galgeholderen købes separat og påmonteres i sengeindsatsens hovedende. Galgen må kun bruges inden for sengerammen.

MAX. BELASTNING:

 75 kg

### MADRAS

Sengeindsatsen kan leveres med en komfortabel skummadras.

Sengeindsats	MADRASMÅL		
	Længde	Bredde	Højde på madras
OPUS S-DW	190-210 cm	70-90 cm	12-16 cm

### SERVICE

Serviceeftersyn anbefales mindst én gang årligt.

 **Brug ikke sengeindsatsen, hvis der er mistanke om at den er i stykker.**

 Se Servicevejledningen for mere info.




### DELING

For at lette transporten kan sengeindsatsen deles i 5 dele, hvoraf de 4 ikke kræver værktøj.

Hvis sengeindsatsen deles i 5 dele, vejer ingen af delene over 25 kg.

 Se Brugsanvisningen.

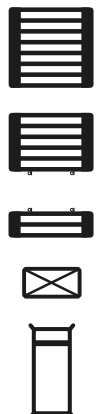

## GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Herunder mulige farer og anvisninger på at undgå dem:

 Læs **ALTID** brugsanvisningen og følg dens anvisninger nøje.

 Personalet skal **ALTID** risikovurdere, om brugeren kan anvende sengeindsatsen korrekt og sikkert.



### KLEMFARE

- Pas på, at ingen kommer i klemme, når sengeindsatsen betjenes. Der er klemfare mellem sengeindsatsens bevægelige dele.
- Kig altid på sengeindsatsen, mens du bruger håndbetjeningen.
- Vær agtpågivende, når sengeindsatsen sænkes fra hævet position. Kravl aldrig ind under sengeindsatsen.
- Vær opmærksom på klemfaren ved utilsigtet aktivering af funktionsknapperne på håndbetjeningen.

### FALDRISIKO

- Efterlad ikke brugeren i sengeindsatsens højeste position.
- Tilpas sengeindsatsens højde til brugeren inden udstigning.
- Brug støttebøjle, hvis der er risiko for at brugeren falder ud af sengeindsatsen.
- Lås altid **ALLE** hjulene efter transport.
- Kontroller at hjulene er låst og at sengeindsatsens monteringsbeslag er skruet fast i sengerammen, før brugeren benytter sengeindsatsen.

### VÆLTERISIKO

- Transporter aldrig sengeindsatsen i højeste position, da dette øger risikoen for at sengeindsatsen vælter.

### FEJLBETJENING

- Overlad kun håndbetjeningen til personer, som du ved, kan bruge sengeindsatsen og dens funktioner.

### EL-SIKKERHED

- Sengeindsatsen må kun tilsluttes forsyningsnet 230VAC.
- Kontroller, at sengeindsatsen og andet elektrisk udstyr ikke påvirker hinanden, men fungerer efter hensigten.
- Sørg for, at ledninger ol. ikke kommer i klemme ved anvendelse af andet elektrisk udstyr i eller ved sengeindsatsen.
- Hæng håndbetjeningen på sengeindsatsen eller sengerammen, når den ikke anvendes, så den og dens ledning ikke ødelægges af slag eller stød, tabes på gulvet eller kommer i klemme.
- Kør ikke over ledninger med sengeindsatsen.
- Hvis sengeindsatsen ikke fungerer optimalt eller der er synlige skader på elektriske dele, kontakt teknisk personale.



Se Brugsanvisningen for mere info.

## ANVENDELSE OG BEGRÆNSNINGER



Sengeindsatsen er beregnet til anvendelse på plejehjem, i hjemmeplejen og under private plejeforhold.

Sengeindsatsen er kun beregnet til voksne brugere med en fysisk størrelse på:

**HØJDE:** Min. 146 cm og max. 185/205 cm.

**VÆGT:** 40 kg eller mere, dog max. 200 kg.

**BMI:** Body Mass Index på 17 eller mere.

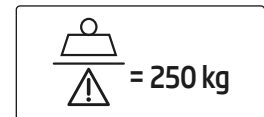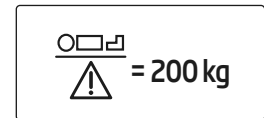

 Max. belastning må **IKKE** overskrides (Safe Working Load/SWL = 250 kg).

 Overhold sengeindsatsens max. tider i forhold til aktivering og pauser. Driftsfrekvens (10%): Max. 2 min. ON / 18 min. OFF.

 Personer med fysiske eller psykiske begrænsninger må ikke anvende sengeindsatsens elektriske funktioner uden opsyn, medmindre personalet, efter risikovurdering, tillader det og brugeren har fået grundig oplæring.

## MANUEL RENGØRING VED BRUGER

Følgende aftørres med almindelige rengøringsmidler og en opvredet fugtig klud:

- Synlig snavs.
- Flader, der er i kontakt med brugeren, såsom håndbetjening, sengeramme og støttebøjle.
- Områder, hvor støv og skidt naturligt samler sig.

Aftørrede områder tørres efter med en tør og ren klud.

De rengøringsmidler, der benyttes må ikke:

- Være stærkt alkaliske.
- Indeholde ætsende præparater.
- Ændre sengeindsatsens overfladestruktur eller plastikkens klæbeevne.
- Være fedtnedbrydende.

Sengeindsatsen kan desinficeres med alkohol og produkter med lav koncentration af klor.

 Ved rengøring af sengeindsatsen **SKAL** fabrikantens rengøringsanvisning følges!

 Se Rengøringsvejledningen for mere info.




### MANUEL RENGØRING INDEN NY BRUGER

 Se Rengøringsvejledningen.

### VASK I ANLÆG

Sengeindsatsen kan vaskes i anlæg.

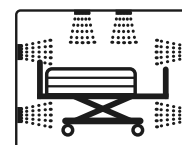

 Se Rengøringsvejledningen.