



Styre-  
enhedens  
taster  
forklares  
på bag-  
siden.

## Opsætning af madrassen

1. Madrassen placeres i en tom seng.
2. Madrassens to slanger kobles til styreenheden på styreenhedens venstre side.
3. Ledningen tilsluttes styreenheden på venstre side og sættes i stikkontakten.

Hovedafbryderen på styreenhedens venstre side aktiveres.

4. Madrassens stropper fastgøres til den bevægelige del af sengebunden.

**OBS:** Ledningen kan med fordel lægges langs madrassen og fikseres i ledningskanalen.

5. Du kan nu placere patienten i madrassen.
6. Du aktiverer nu styreenhedens



“POWER / MUTE”  
(TÆNDT / STILLE) knap.

Pumpen starter og alle lamper lyser.

## Indstilling af cyklus

Patienten kan ligge i madrassen, mens madrassen fyldes.

### 1. Komfortindstilling (Blød, medium eller hård)



Vælg hårdhed på madrassen ved at taste på “comfort” (hårdhed) til den grønne lampe lyser ved den ønskede hårdhed.

### 2. Dynamisk funktion (terapiform)



Indstil ved at taste på “mode” (indstillinger) til lampen ud for den ønskede terapiform lyser.

3. Der er luft under patienten efter ca. 5 min.

Madrassen når normal driftstilstand efter ca. 10 min.

Madrassen når “max inflate” (pleje funktion) efter ca. 20 min.

5. Madrassen vender automatisk tilbage til den valgte “comfort” (hårdhed) når den er helt fyldt.

## Pleje/håndtering af patienten

Skal du håndtere patienten skal du aktivere “max inflate” (pleje funktion).

Funktionen vender automatisk tilbage til den ønskede terapiform efter 20 minutter.

## Transport

### Før:

- Ved transport tager du stikket ud af stikkontakten.
- “ALERT” (ALARM) vil lyse ind til stikket sættes i stikkontakten igen.
- Du kan frakoble alarmen ved at trykke på “POWER / MUTE” (TÆNDT / STILLE).

### Efter:

- Efter transport sættes stikket i stikkontakten og madrassen husker tidligere indstillinger.
- Madrassen holder luften under patienten i mindst 16 timer.

