

Styreenhedens taster forklares på bagsiden.

Opsætning af madrassen

Madrassen placeres i en tom seng og er klar til brug.

Hvis der er behov for pumpe:

1. Madrassens to slanger kobles til styreenheden på styreenhedens venstre side.
2. Ledningen tilsluttes styreenheden på venstre side og sættes i stikkontakten.
Hovedafbryderen på styreenhedens venstre side aktiveres.
3. Madrassens stropper fastgøres til den bevægelige del af sengebunden.
OBS: Ledningen kan med fordel føres langs madrassen og fikseres med madrassens stropper.
4. Du aktiverer nu styreenhedens "Power / Mute" (Tænd / Stille / Lås op) knap.
Pumpen starter.

Indstilling – "Adjust" (juster)

Patienten kan ligge i madrassen, mens madrassen fyldes.

Vælg hårdhed på madrassen ved at taste på "Adjust" (juster) til lampen lyser ved den ønskede hårdhed.

Vælg mellem:
+2, +1, Auto-Set, -1 eller -2.

Træffes der ikke et aktivt valg, vælges "Auto-Set" automatisk.

Pleje/håndtering af patienten

Skal du håndtere patienten kan du vælge den den hårdeste funktion "+2".

Funktionen vender automatisk tilbage til den ønskede terapiform efter 20 minutter.


Transport

Før:

- Ved transport tager du stikket ud af stikkontakten.
- "Alert" (Alarm) vil lyse ind til stikket sættes i stikkontakten igen.
- Du kan frakoble alarmen ved at trykke på "Power / Mute" (Tændt / Stille).

Efter:

- Efter transport sættes stikket i stikkontakten og madrassen husker tidligere indstillinger.

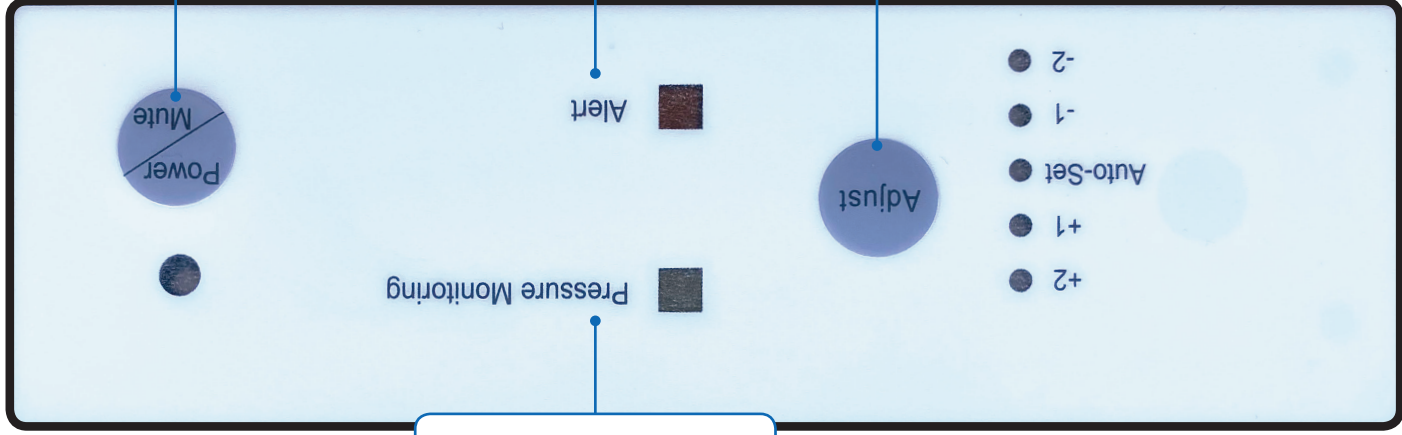

Pressure Monitoring
(Tryk overvågning)
Lampen lyser, når madrassen
har det valgte tryk:

Adjust
(Juster)
Juster
patient komfort.

Alert
(Alarm)
Lampen lyser, hvis
madrassen mangler tryk.
Slå lyden fra ved at
trykke på "Mute".

Power / Mute
(Tænd / Stille / Lås op)
Efter 2 minutter uden betjening,
læser systemet automatisk kontrolpanelet.
**Hold knappen inde i 5 sekunder
for at læse pumpen op.**

