


# QUICKGUIDE

## WIN CARE SOLAR 185

Denne quickguide er et udsnit af en større vejledning, som du bedes læse inden brug. Er du i tvivl om brugen af personløfteren, skal du henvende dig til en forflytningsvejleder eller en terapeut.

### VIGTIGT: NULSTILLES INDEN BRUG

Inden liften tages i brug for første gang, skal den nulstilles via håndbetjeningen. Dette gøres ved at holde knapperne OP ↑ og NED ↓ inde samtidig i 5 sekunder, indtil du hører et bip. Liften er herefter nulstillet og klar til brug.

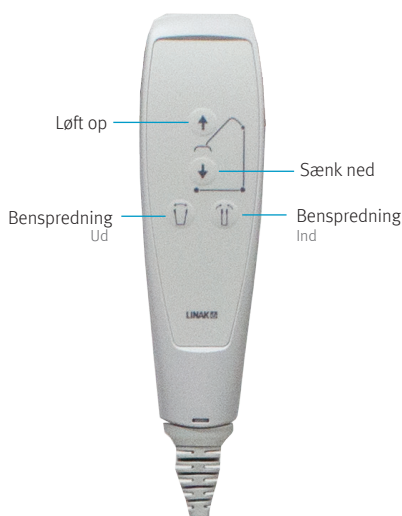

### VIGTIGT

- Sørg for at holde en sikker afstand mellem brugerens hoved og personløfterens løftebøjle.
- Sæt altid liften til opladning efter brug.
- Personløfteren er ikke beregnet til transport. Før altid stolen hen til løfteren; ikke modsat!
- Brems aldrig personløfteren under løft. Personløfteren skal tilpasses stolen og ikke omvendt.

### NEMT OG HURTIGT SKIFT AF BATTERI

Hiv blot op i håndtaget og træk ud. Ved påsætning af batteri, sæt i og tryk håndtaget ned.



### NØDSTOP

#### Aktivering

Tryk knappen ind for at aktivere nødstopet. Alle ståløfterens funktioner vil nu ikke kunne anvendes.


#### Deaktivering

Drej knappen en kvart omgang i urets retning for at deaktivere nødstopet

### DISPLAY

BATTERI-STATUS

SERVICE- & FEJLMELDING

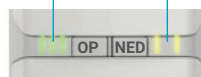

Læs om LED-status og betydninger i brugervejledningen.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Personløfterens ejer er ansvarlig for vedligehold og eftersyn af produktet.

### Rengøring

Personløfteren tørres af med en fugtig klud evt. tilsat rengøringsmidler. Kan evt. desinficeres med sprit ved behov.

### Eftersyn

SOLAR 185 skal efter producentens anvisning efterses en gang årligt af autoriseret personale.

Hvis der er mislyde, rust, manglende dele eller andre defekter, må personløfteren ikke anvendes, før løfteren er eftersat af autoriseret personale.



## MEKANISK NØDFIR

Aktiveres ved at dreje de røde håndtag i pilens retning (med uret), hvorved løftearmen sænkes langsomt.

NB: Virker både med og uden vægt



## OPLADNING

Sæt stikket, som sidder i holderen på siden af styreboksen, i en stikkontakt. Det indikeres på styreboksen, når løfteren skal oplades.

Personløfteren skal oplades regelmæssigt, og det anbefales at den stilles til opladning efter endt brug eller hver nat.

NB: Ledningen til stikkontakten må ikke være stram. Placer altid ledningen i holderen bag styreboksen efter opladning.

## PÅSÆTNING AF SEJL

SOLAR 185 er som standard monteret med en 2-punkts løftebøjle på 48 cm, men er også kompatibel med Winncares 3- og 4-punktsløftebøjle. Alle løftebøjlerne er med Winncares patenterede løftekroge. Påsæt sejlet således:



1) Sejlstroppen føres ind over krogen i den åbne position.

2) Stropperne trækkes ned således at krogen lukker.

Løftekrogens konstruktion gør at brugeren/klientens vægt automatisk vil holde krogene i lukket position.

For at frigøre sejlet efter endt løft skal stropperne blot trækkes opad, således at krogen åbner sig igen.

## ANVENDELSE AF SEJL

Til Solar/185 kan anvendes CE-mærkede sejle til brug med 2-, 3- eller 4-punkts løftebøjler.

Sejl bør efterses før hvert brug og efterses af autoriseret personale mindst en gang hvert halve år.

Det er altid hjælperen, der skal sikre, at sejlet passer til behovet og er korrekt monteret.

Winncare fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt løftesejlet ikke påsættes korrekt.



Scan QR og se brochuren, brugermanualen og denne quickguide

WIN CARE

