

## Montering af madras


Til RotoBed®Free hører en madras bestående af en hoved-del samt en fod-del.

Hovedmadrassen er udstyret med 5 knapper på bagsiden. Anbring først de tre nederste knapper i rillerne nederst i liggefladen. Skub madrassen mod fodenden. Nu trykkes de to knapper midt på madrassen ned i de tilhørende huller midt på liggefladen.

Tilsvarende har fodmadrassen to knapper, som trykkes ned i de to knaphuller i liggefladen.

## Montering af sengeheste

RotoBed®Free kan leveres med sengehest af metal eller egetræs-finér. Uanset model monteres og fjernes sengehestene på samme måde:

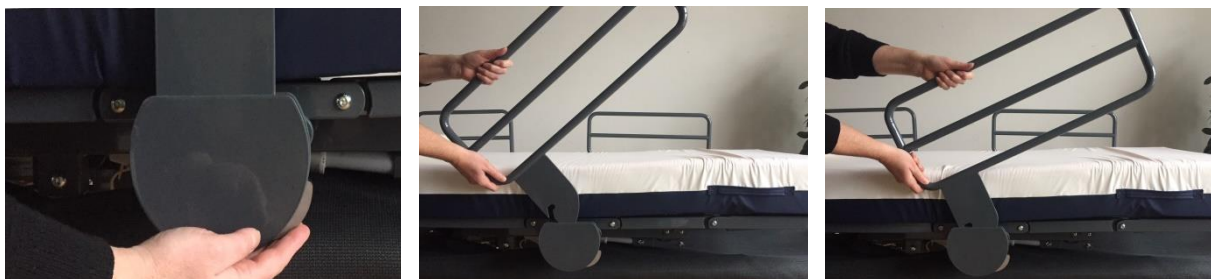

Tryk på det lille beslag fornedet samtidig med, at sengehesten løftes. Sengehestene sættes på igen og låser automatisk.

NB! Sengehestene skal enten være monteret eller tages af. Lad dem ikke stå løse lodret i beslaget, da dette kan forårsage klemfare og skade på sengen under rotation.

## Hjul og bremser



Ulåste hjul

Sengen er som standard udstyret med integral Tente Linea dobbelthjul.

Hjulene er drejelige og parvis bremsebare, og de kan betjenes fra begge sider af sengen.



Låste hjul

**OBS:** RotoBed®Free bør ikke benyttes af personer uden introduktion i brugen af sengen. Sengen er testet efter de nyeste gældende normer og regler for plejesenge. RotoBed®Free skal udelukkende betjenes med fjernbetjeningen. Vær opmærksom på, at hverken børn eller dyr befinder sig under sengen, når sengens dele indstilles. Når sengens ben-del er hævet, må denne ikke belastes af personer eller tunge genstande. Sengen må benyttes af brugere indenfor følgende kriterier: Vægt 40-190 kg. Højde  $\geq$  146 cm. BMI  $\geq$  17.

## Betjening af RotoBed® Free



**Udstigning:** Hold tasten **Stole-position** inde, til sengen standser i udstigningsposition. For at lette udstigningen, kan ryglænet køres det sidste stykke frem og sengen hæves lidt i højden.



Standard er skrå udstigning for at lette overgang til kørestol eller rollator. For vinkelret udstigning, se manualen.




**Indstigning:** Skub enden så langt tilbage som muligt for bedste komfort. Hold tasten **Liggeposition** inde, indtil sengen er drejet rundt, og liggefladen er vandret. Nu fungerer RotoBed®Free som en almindelig plejeseng.



Standard sædehøjde uden madras er 32 cm over gulvet. For individuel indstilling, se manualen.

## Fjernbetjening

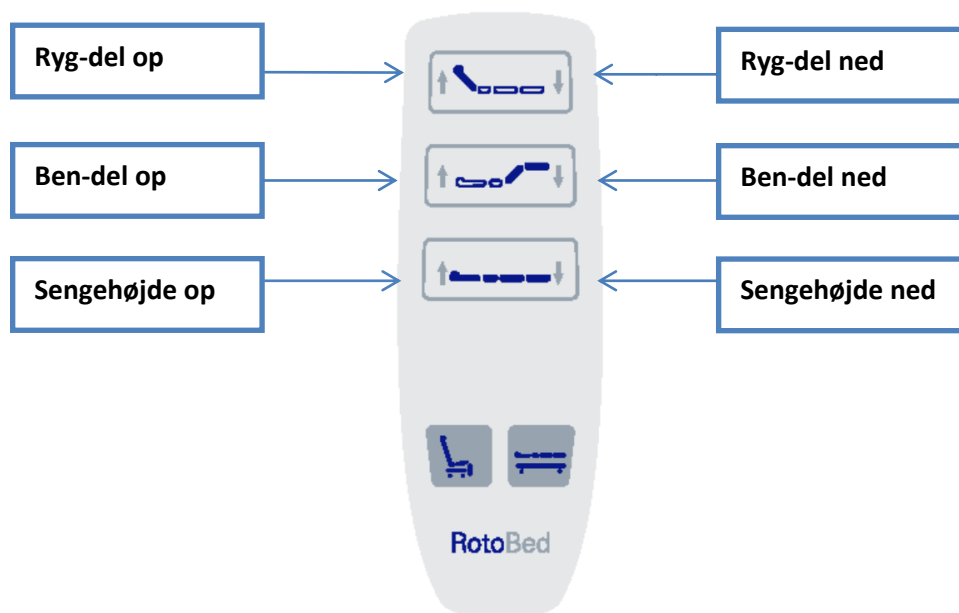

RotoBed®Free kan dreje enten til højre eller venstre.

Fjernbetjeningen kan derfor valgfrit tilsluttes højre eller venstre side af sengen. Efter ønske kan tilkøbes ekstra fjernbetjening. Når fjernbetjeningen ikke anvendes, hænges den på sengehesten.