

## Montering af madras

---

Til RotoBed® Home hører en madras bestående af en hoveddel samt en fod-del.


Hovedmadrassen er udstyret med 5 knapper på bagsiden. Anbring først de tre nederste knapper i rillerne nederst i liggefladen. Skub madrassen mod fodenden. Nu trykkes de to knapper midt på madrassen ned i de tilhørende huller midt på liggefladen.

Tilsvarende har fodmadrassen to knapper, som trykkes ned i de to knaphuller i liggefladen.

## Montering af sengeheste

---

RotoBed® Home kan leveres med sengeheste af metal eller egetræsfinér. Uanset model monteres og fjernes sengehestene på samme måde:

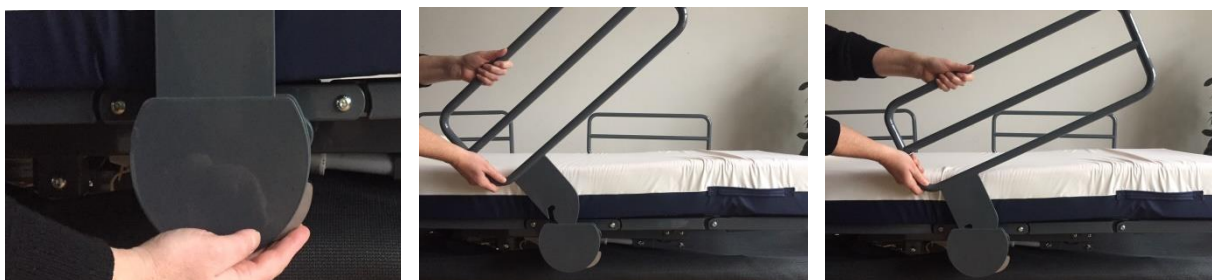

Tryk på det lille beslag fornedet samtidig med, at sengehesten løftes.

Sengehestene låser automatisk, når de sættes på plads igen.

Lad ikke sengehestene stå opret i beslagene. Dette kan medføre klemfare og skader på sengen under rotation.

---

**OBS:** RotoBed® Home bør ikke benyttes af personer uden introduktion i brugen af sengen. RotoBed® Home er CE-mærket i henhold direktiv (EU) 2006/42/EF.

RotoBed® Home skal udelukkende betjenes med fjernbetjening. Sørg for, at børn i nærheden er opmærksomme på klemfare, når sengens positioner justeres. Når sengens ben-del er hævet, må denne ikke belastes af personer eller tunge genstande.

---

## Quick guide for RotoBed® Home



**Indstigning:** Skub enden så langt tilbage som muligt for bedste komfort. Hold tasten

**Liggeposition** inde, indtil sengen er drejet rundt, og liggefladen er vandret. Nu kan ryglæn og ben-del justeres som ønsket.




**Udstigning:** Hold tasten **Stoleposition** inde, til sengen standser i udstigningsposition. For at lette udstigningen, kan ryglænet køres det sidste stykke fremad.



Obs: RotoBed®Home er ved levering indstillet til at køre til en skrå udstigning for at lette overgang til kørestol eller rollator. For at få en vinkelret udstigning, se brugermanualen.

## Fjernbetjening

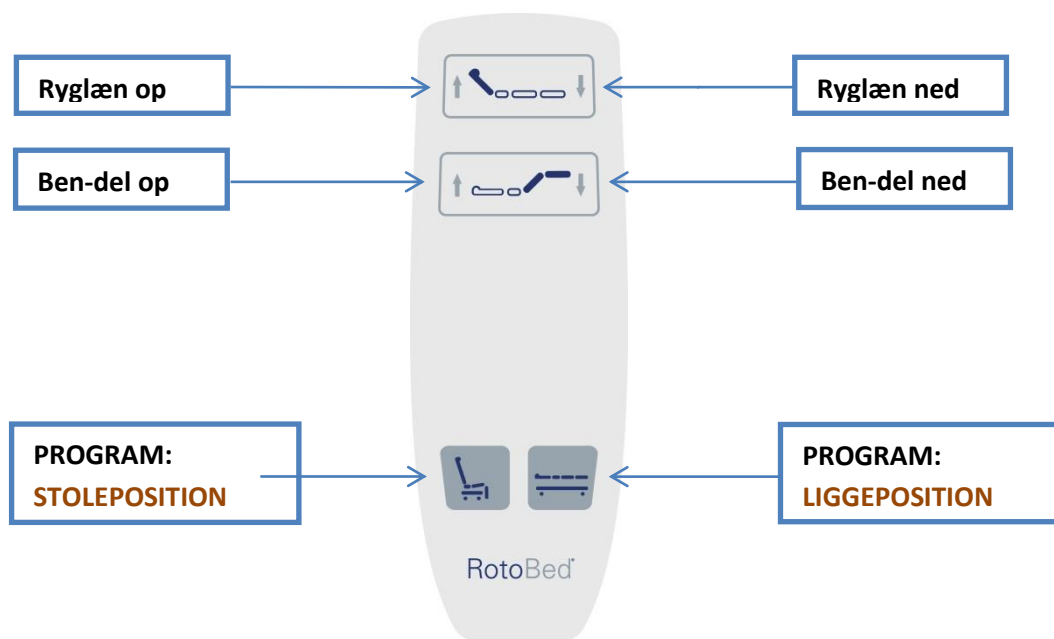

RotoBed®Home kan indstilles til at dreje enten til venstre eller til højre. Fjernbetjeningen kan ligeledes valgfrit tilsluttes højre eller venstre side af sengen. Når fjernbetjeningen ikke anvendes, kan den hænges på sengehesten