

Korrekt indstilling af Hybrid pude m. ROHO-indlæg

1. Åben de to ventiler på hver side af puden (Drej i retningen mod uret).
Pump luft i – indlægget skal fyldes helt med luft.
2. Fjern pumpen og lad ventilerne stå åben i ca. 1 min, så der opstår atmosfærisk tryk (Det gennemsnitlige lufttryk af jordens atmosfære ved havets overflade).
3. Luk ventilerne (Drej i retningen med uret).
4. Placer brugeren på puden.
5. Åben den ene ventil og lad en smule luft sive ud. Luk straks ventilen igen. Gentages med den anden ventil.
6. Læg hånden mellem puden og brugerens dybeste knoglefremspring og kontrollér, at brugeren ikke sidder igennem. Der skal kunne være 2 fingre (ca. 2,5cm) mellem knoglefremspringet og pudens bund. Hvis der er plads til mere gentages punkt 5. Hvis der ikke er plads til 2 fingre, er der lukket for meget luft ud og så skal punkt 1-5 gentages. (OBS. Brugeren må ikke være placeret i puden ved gennemførelse af punkt 1-3)