

STOLENS FUNKTIONER

**INDSTIL NAKKEPUDE**

- Skub nakkepuden opad eller nedad for ønsket højde.

INDSTIL ARMLÆN

- Hiv op i håndtaget og skub/træk samtidig armlænet til den ønskede højde. Slip håndtaget for at låse armlæns højden.

BREMSE

- Tryk bremsepedalen ned for at bremse stolens baghjul. Bremsepedalen kan betjenes fra begge sider af stolen. **Rød** for at bremse / **Grøn** for at oplåse bremse.

STRØMKABEL OG BATTERI*

Strømkablet rulles ud/ind vha. en kabeltromle. Kablet skal rulles ind før stolen flyttes. Med batteriet* kan alle elektriske funktioner betjenes uden tilkobling til stikkontakt. Batteriet oplader, når strømkablet er sat i stikkontakt. (* tilvalg)

HÅNDBETJENING



Håndbetjeningen skal altid føres bag om stolen for at undgå at klemme ledningen.



SÆDEHØJDE

Hold inde på knap til venstre (A) for at køre stolen ned.
Hold inde på knap til højre (B) for at køre stolen op.

SÆDEVINKEL OG FODHVILER

Hold inde på knap til venstre (C) for udstigningshjælp.
Hold inde på knap til højre (D) for hvilestilling.
(Fodhviler følger med sædevinkel ind/ud)

RYGVINKEL

Hold inde på knap til venstre (E) for at vinkle ryggen fremad.
Hold inde på knap til højre (F) for at vinkle ryggen bagud.

NEUTRAL OG TRENDELENBURG*

Hold inde på (grøn) knap til venstre (G) for at indstille stolen tilbage til neutral position.
Hold inde på (rød) knap til højre (H)* for at vinkle stolen i Trendelenburg. (* tilvalg)