

Sådan bruger du siddepuden fra Oliz! Dette gælder også for den med øje og hale.

For at få den rigtige virkning af puden, skal sømmen, som er på puden vende ned mod stolesæddet. Dette er for at undgå skader på stoffet, da forkert brug af puden ikke bliver dækket af garantien. Skal bruges i tidsintervaller, når behovet er der. (Puden med øje og hale, her skal øje altid vende op)

Eva hård, kun vat på undersiden, og sømmen vender ned mod sæddet.
Her vender den rigtig!



Eva blød, vat på begge sider, og sømmen vender både op og ned mod sæddet. kan ikke vende forkert!



Har du spørgsmål om brugen af den så kontakt Oliz på 20787954 / 60383700

Oliz -Bornholmsvej 10 -7400 Herning- Mail:mh@oliz.dk / th@oliz.dk