


Instrumentbordets funktioner

Inden du kører på scooteren, skal du sørge for, at du har en fuld forståelse af alle dens funktioner, og hvordan du betjener kontrolpanelet korrekt.

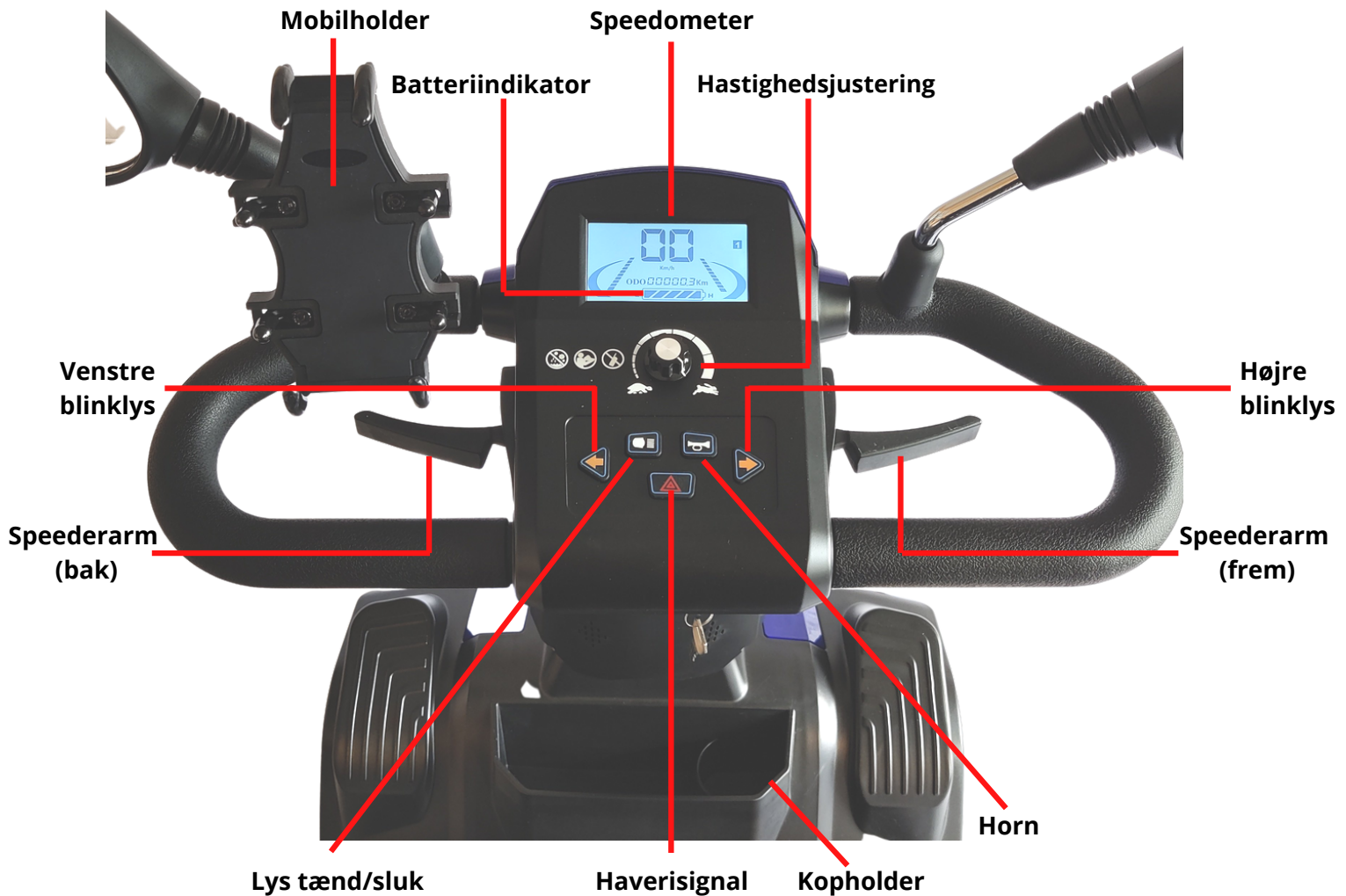

Tændingslås

Drej nøglen med uret for at tænde el-scooteren.
Sluk ved at dreje mod uret.

Lys

Tryk på lyskontakten for at tænde og slukke for scooterens lys foran og bagved.
Der skal lovpligtigt være lys på scooteren efter mørkets frembrud.

Blinklys

Tryk på venstre eller højre blinklyskontakt, for at vise hvilken vej du ønsker at dreje.
Tryk igen for at slukke for blinklyset.

Horn

Tryk på denne kontakt for at aktiverer hornet.

Havari signal

Tryk på denne kontakt for at aktiverer havari signalet for og bag.
Tryk igen for at slukke havari signalet.

Mobilholder

Træk forsigtigt de to øverste kroge op, placer mobilen i holderen.
Slip derefter forsigtigt de 2 kroge, så telefonen fastgøres.

Kopholder


Kopholderen er placeret foran trinbrættet.

Justering af styr

Tryk håndtaget ned og justér styret til den ønskede vinkel.
Slip håndtaget igen for at låse styret.

Højtaler & USB-tilslutning

1. Åben Bluetooth menuen på din telefon
2. Tryk "søg" eller "dan par" - vælg "bao jie"
3. Din telefon er nu tilsluttet

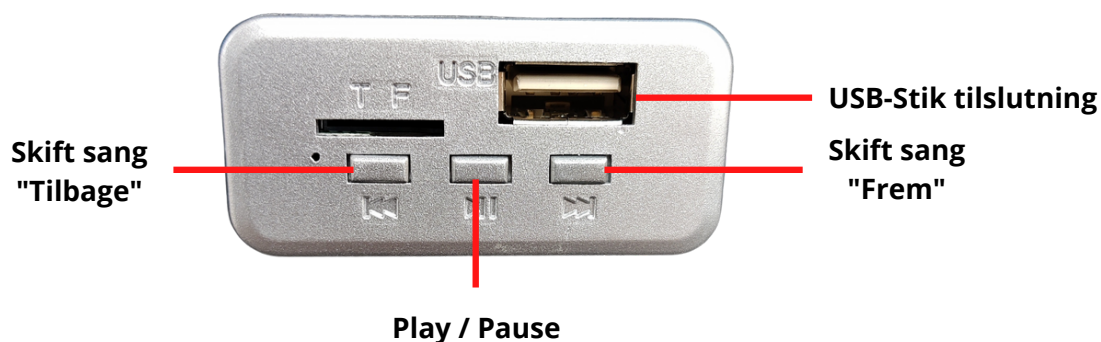


Speedometer

Digital speedometer udstyret med:

Hastighedsmåler/speedometer viser hvor hurtigt du kører.

Triptæller viser hvor mange kilometer elscooteren har kørt i alt.

Batteriindikator angiver køretøjets aktuelle strøm niveau.

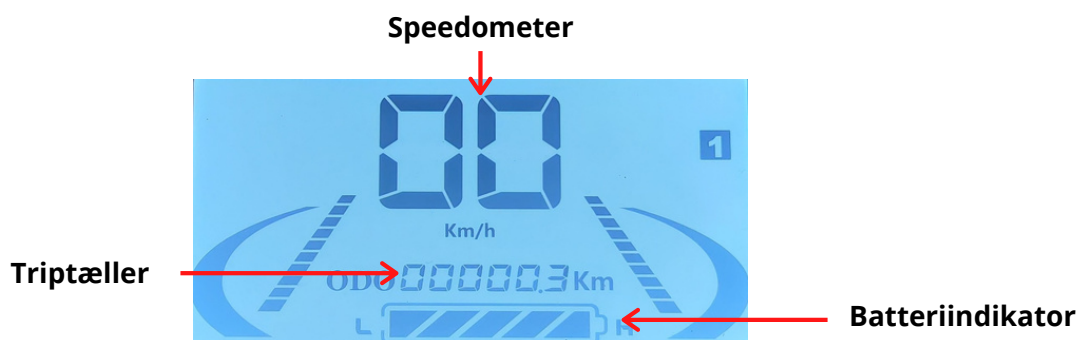


Batteriindikator

Angiver det aktuelle strøm niveau.


L = Lav strøm

H = Høj strøm

Når batteriindikatoren viser **fem hele streger**, er batteriet fuldt opladt.

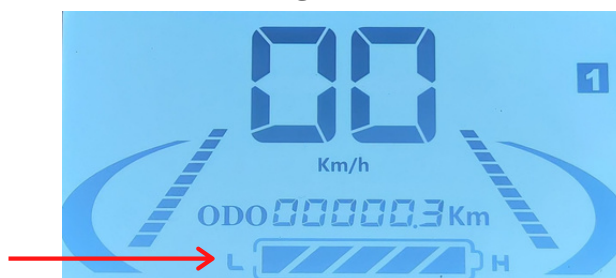

I takt med strømmen bliver brugt, slukker én streg ad gangen.

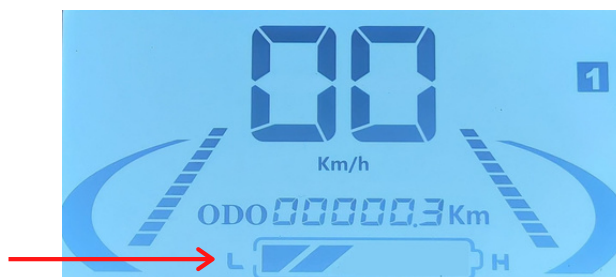

Er batteriet nedladt til den sidste streg, anbefaler vi, at du hurtigst muligt, får sat scooteren til ladning. Derved undgår du at køre tør for strøm.

Hastighedsjustering

Justerer scooterens mindste og højeste hastighed. Skildpadde-symbolet angiver laveste fart, mens kanin-symbolet angiver højeste fart.

Tænd-/slukindikator / funktionsfejl

Er scooteren tændt, lyser denne indikatorlampe konstant.

Ved funktionsfejl blinker indikatorlampen.

Antallet af gange lampen blinker, indikerer fejlen.

Se fejlkoder på sidste side i denne manual.

Speederarm

Bruges til at få scooteren til, at køre frem eller tilbage, samt kontrollere fart og acceleration.

- Træk højre side ned mod dig, selv for at køre frem. Skub den frem for at bakke.
- Træk venstre ned mod dig selv, for at bakke. Skub den frem for at køre frem.
- Farten stiger i takt med, at speederarmen trækkes tilbage.
- Scooteren kan køres med én hånd.