


## Samling ad New classic kørestol



Kørestol i løsdele

Aksel sættes gennem hjul og gennem rør i ramme

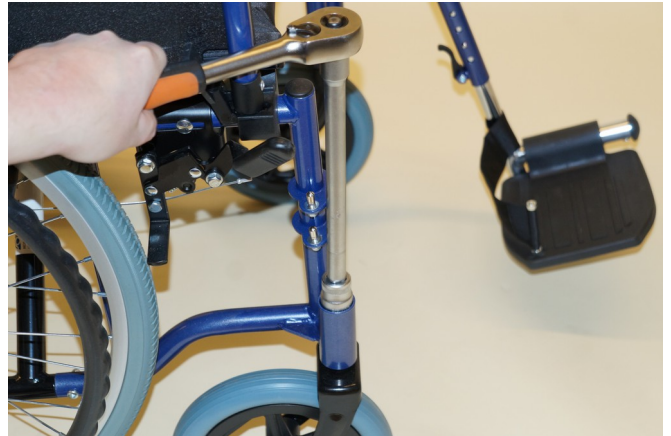


Forgaffel monteres nedefra gennem lejer

Møtrik spændes med f.eks topnøgle



Afdækningsprop monteres uden brug af værktøj

Benstøtte sættes på ved og dreje den 90 grader ud fra rammen og sætte den ned på de to blanke stifte

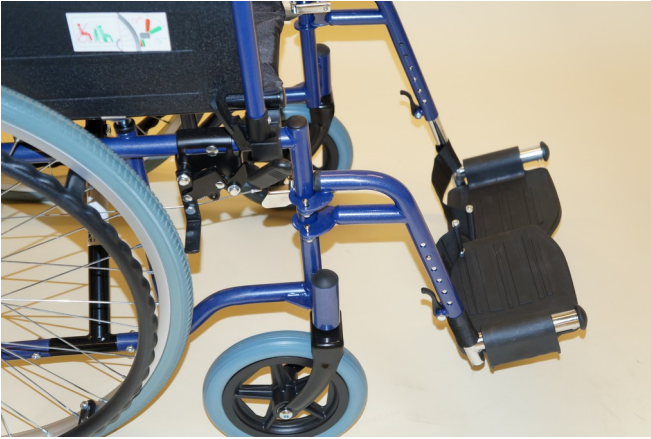

Når benstøtten skubbes på plads låses den automatisk



V trække udløserbeslag ind mod stolen , kan benstøtten foldeud til siden



Benstøtter indstilles i højden ved og sætte den sorte plastbeslag i vanret position og tryk de to låse stifter ind



Plast beslag foldes i lodret for at låse benstøtte



Kørestol klar til brug