

## Installationsguide



Börja med att ta bort den befintliga madrassen och höja sängen. RotoBed® AirSleep hybridmadrass består av en huvuddel och en fotdel. Huvudmadrassen har 5 ankare på baksidan. Placera först de tre nedre ankarna i spåren på undersidan av den liggande ytan. Skjut sedan madrassen mot fotändan. Skjut nu in de två ankarna i mitten av madrassen i motsvarande hål i mitten av liggytan.



Ryggstödet höjs och luftslangen förs genom liggytan mellan sätet och ryggstödet.

OBS! det är viktigt att det finns lite överflödigt luftslang så att det finns plats för sängen att rotera till utgångsläget. Placera en remsa runt mittramen och luftslangen (1) så nära rotationsaxeln som möjligt. För luftslangen mot fotändan, sätt in luftslangen i pumpen och fäst slangen under sängen med remsor. Luftslangen måste följa ramens nedre kant, den får inte hänga ner.



Ta bort de 4 bultarna på trågaveln, ta bort trågaveln och lägg kroken ner över kanten på textilplåt. Sätt tillbaka trågaveln och placera pumpen på kroken.