

SmartVision 3



Hurtig Start Guide

www.instrulog.dk

Bemærk venligst

Det anbefales at gennemlæse den komplette brugervejledning førend du tager din SmartVision 3 i brug.

En elektronisk version af dette dokument er tilgængelig på websitet www.kapsys.com under sektionen Support og den er ligeledes at finde på www.instrulog.dk.

Kassens indhold

SmartVision 3 leveres sammen med:

En 220/110 Volts strømforsyning - 5 Volts USB

Et USB kabel (Type C)


Et sæt stereo hovedtelefoner med en mikrofon






5 NFC tags

Redskab til SIM port

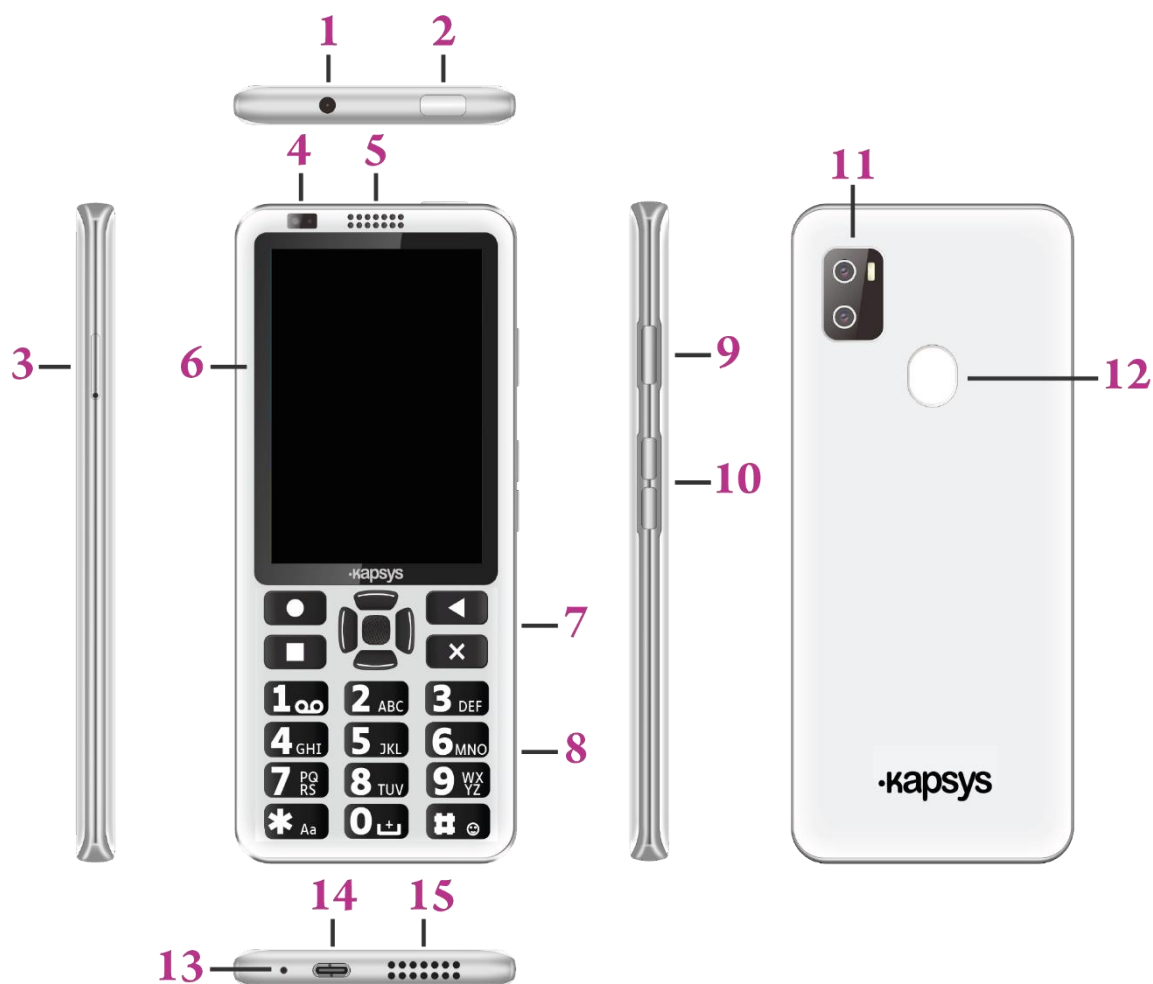En Hurtig Start Guide

Overblik



Nummer	Element	Beskrivelse
1	3.5 mm hovedtelefon JACK	Tilslutning af stereo hovedtelefoner.
2	Tænd / Sluk knap	Tryk og hold for at tænde eller slukke for SmartVision 3. Tryk for at aktivere eller deaktivere skærmen (standby tilstand).
3	SIM kort port	Her indsættes dit SIM kort og SD kort.
4	Frontkamera	Benyttes til portrætbilleder og online videochat.
5	Ørehøjtaler	Højtaler til brug ved opkald.
6	Skærm	Præsenterer indholdet visuelt og indbygget touch.
7	Kontrolpanel samt navigationstaster	 Naviger rundt på skærmen i forskellige retninger (op, ned, højre, venstre) og en centralt placeret OK knap.
		 Spring tilbage til Hjemmeskærm.
		 Kontekst menu tast til menuen for aktuelle placering.
		 Spring tilbage til forrige skærmbillede.
		 Slette tegn.
8	Alpha-numerisk tastatur	Benyttes til at indskrive karakterer.
9	Tale kommando tast	Benyttes ved diktering og til aktivering af specifikke funktioner.
10	Lydstyrke knapper	Juster lydstyrken op eller ned.
11	To bagudrettede kameraer	Opløsning på henholdsvis 16 Megapixels og 2 Megapixels.
12	Fingeraftrykssensor	Benyttes til at låse SmartVision 3 op eller godkende betalinger.
13	Indbygget mikrofon	Primær mikrofon til at foretage opkald og Talegenkendelse.
14	USB C	Opladning af batteriet samt synkronisering / kopiering af data.

15	Højtaler	Hovedhøjtaler til afspilning af musik og lignende.
----	----------	--


Kom godt i gang

Indsæt dit NANO SIM kort og et SD hukommelses kort

SmartVision 3 er udstyret med dual SIM og SD kort læser. Du har mulighed for at indsætte to SIM kort eller et SIM kort og et SD kort. Du kan ikke have både to NANO SIM kort samt også et micro SD hukommelseskort installeret på samme tid. SmartVision 3 understøtter udelukkende SIM kort i NANO SIM formatet. Et modificeret SIM kort som er tykkere end et standard NANO SIM kort vil ikke passe ordentligt til bakken og kan beskadige SIM forbindelsen. Et micro SD hukommelseskort er tilbehør og følger ikke med ved køb af SmartVision 3. SmartVision 3 understøtter SD kort med en hukommelse på op til 128 GB.


1. Få SIM bakken ud:

Placer din SmartVision 3 telefon på en plan overflade foran dig med skærmen opad. Indsæt nu spidsen af SIM port redskabet som medfølger ind i hullet ved siden af SIM bakken, som du finder på venstre side. Vær sikker på at du holder redskabet vinkelret i forhold til hullet til bakken. Vær forsigtig, du kan beskadige enheden hvis ikke redskabet er vinkelret. Når du indsætter SIM port redskabet skal du sørge for ikke at holde for eller dække selve SIM porten, som er placeret lige til højre for hullet, for derved at undgå a beskadige fjedermekanismen. Skub roligt redskabet ind i hullet indtil du registrerer at SIM bakken skubbes ud, og du kan nu trække bakken helt ud med dine fingre. SIM bakken består af to beholdere. I den første beholder kan du indsætte et SIM kort eller et SD kort. I den anden beholder kan der kun indsættes et SIM kort.

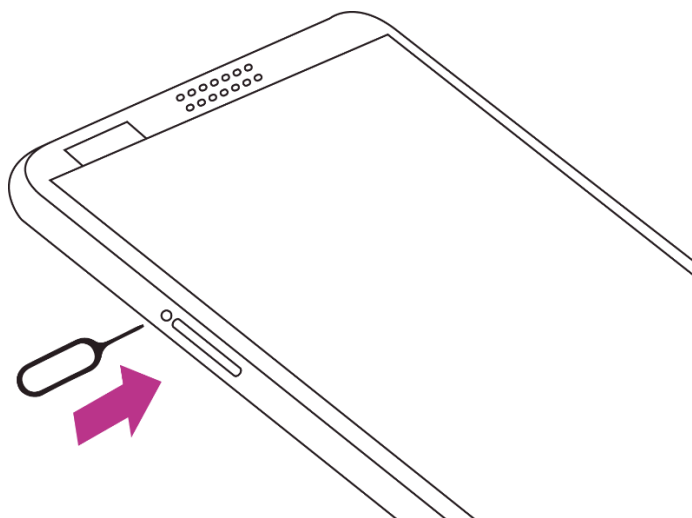

2. Monter SIM kort og et SD kort (valgfrit):


Placer dit SD kort i den første beholder, som er længst ude mod kanten af din SmartVision 3, når bakken er installeret, med metalsiden nedad og det afskårne hjørne vender ind mod siden af din telefon. Herefter kan du montere dit SIM kort i den anden beholder i bakken, metal siden nedad igen og det afskårne hjørne ned mod bunden af din telefon. Herefter kan du forsigtigt indsætte SIM kort bakken ind i din SmartVision 3 igen. Når du indsætter SIM bakken skal du være sikker på at du holder bakken horisontalt således at hverken SD kortet eller SIM kortet falder ud. Bakken skal kunne skubbes forsigtigt helt ind i din SmartVision 3 telefon og ikke stikke en smule ud.

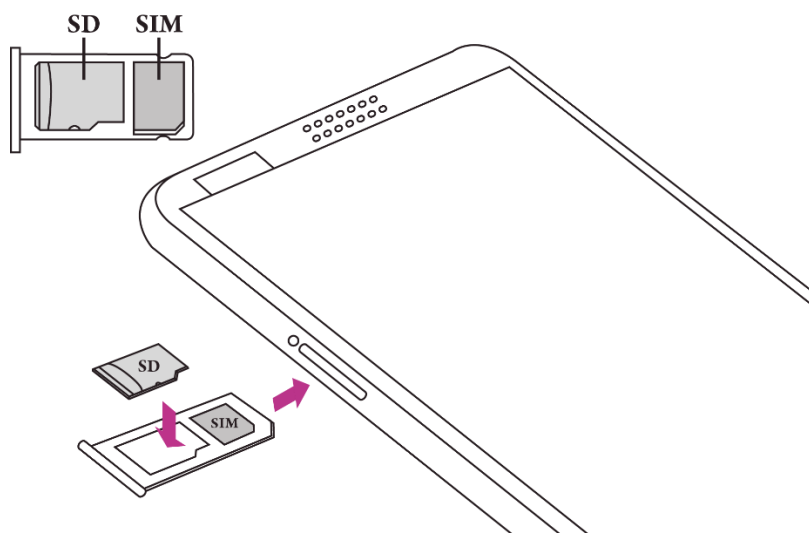

3. Indsæt to SIM kort:

Placer det SIM kort du ønsker skal være SIM 1 i den første beholder, metal siden nedad og det afskårne hjørne skal vende ned mod bunden af telefonen. Udfør samme handling på samme måde for det SIM kort du ønsker skal være SIM 2. Herefter kan du forsigtigt indsætte SIM kort bakken ind i din SmartVision 3 igen. Når du indsætter SIM bakken skal du være sikker på at du holder bakken horisontalt således at dine SIM kort ikke falder ud. Bakken skal kunne skubbes forsigtigt helt ind i din SmartVision 3 telefon og ikke stikke en smule ud eller falde ud.

Det er ikke afgørende hvilket SIM kort du benytter som SIM 1 og som SIM 2. Du kan senere hen konfigurere dine SIM kort som du ønsker det via din SmartVision 3's "Indstillinger" i sektionen "Netværk og Internet".

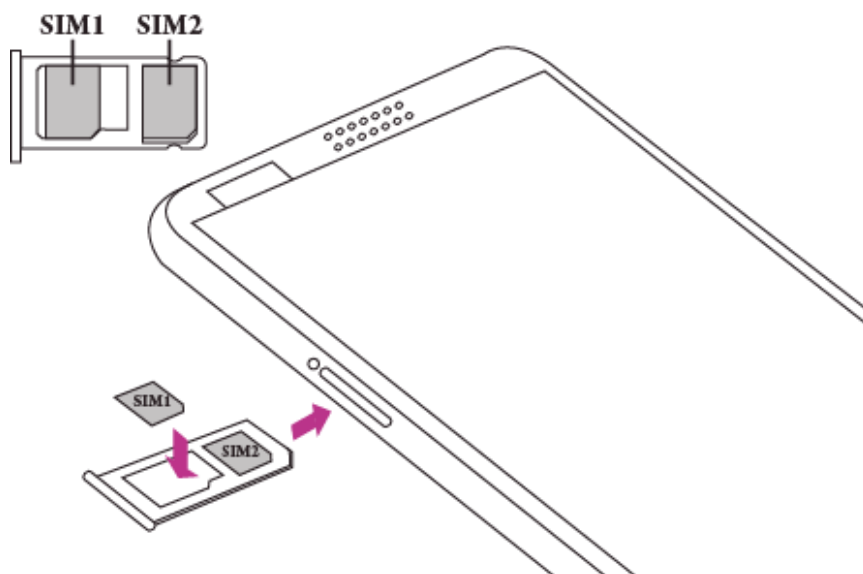

Opladning af batteriet

Oplad batteriet i din SmartVision 3 før du begynder at bruge den for første gang, samt også når du ikke har benyttet den i længere tid. Benyt altid kun en kompatibel strømforsyning og kabel til din enhed. Gør du brug af en inkompatibel strømforsyning og kabel kan beskadige din SmartVision 3. Du kan oplade batteriet ved at tilslutte USB C kablet til din SmartVision 3 USB port og til strømforsyningen. Indsæt selve strømforsyningen til et strømstik. Når opladningen af batteriet er færdigt skal du afbryde forbindelsen mellem strømstik og SmartVision 3.

Tænd / Sluk for din SmartVision 3

For at tænde for din SmartVision 3 skal du trykke og holde på Tænd / Sluk knappen som du finder øverst oppe på kanten. Så snart din SmartVision 3 vibrerer kan du slippe knappen. Såfremt den ikke starter op skal du tjekke om batteriet er monteret korrekt.

For at slukke for den skal du trykke og holde på Tænd / Sluk knappen igen. Efterfølgende skal du navigere til elementet "Afbryderknap", trykke OK, navigere til "Sluk" og tryk OK igen.

Genstart din SmartVision 3

Du kan genstarte din enhed ved at trykke og holde på Tænd / Sluk knappen. Efterfølgende skal du igen navigere til elementet "Afbryderknap", trykke OK, navigere til "Genstart" og tryk OK igen. Skulle det ske at din enhed fryser eller ikke responderer på dine handlinger, tryk og hold da på Tænd / Sluk knappen i mindst ti sekunder for at tvinge en genstart igennem.

Standby tilstand

Når din SmartVision 3 er tændt vil et hurtigt tryk på Tænd / Sluk knappen bringe dig til standby tilstand (skærmen slår fra), eller vende tilbage til aktiv tilstand (skærmen slår til). Standby tilstand aktiveres automatisk efter en periode med inaktivitet for at spare på batteriet.

I standby tilstand vil din skærm være slået fra og tastaturet vil være deaktiveret, mens alle andre funktioner stadig er aktive. Du kan altså stadig modtage opkald, beskeder, e-mails og så videre.

Juridisk information og reklamation

1. FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER FOR BRUG

Gennemgå venligst alle informationer før du begynder at bruge din enhed, det vil sikre korrekt og sikker brug.

- Håndter din KAPSYS enhed og tilbehør med forsigtighed, tab eller stød det ikke
- Forsøg ikke at udføre reparationer på enheden da dette resulterer i øjeblikkeligt ophør af garanti og reklamation samt risiko for at skade enheden unødigt.
- Benyt kun producentens godkendte strømforsyninger, datakabler og andet tilbehør for på den måde at undgå potentielle farlige situationer, eksempelvis elektrisk stød, brand, eksplosion og andet.
- Forsøg ikke på at reparere eller skille din enhed ad da dette vil resultere i at reklamationen bliver ugyldig Bagcoveret hverken kan eller skal fjernes.
- Rengør kun enheden ved at benytte en blød, let fugtig klud. Benyt ikke kemikalier, rengøringsmidler eller slibemidler.
- Dette produkt er ikke vandtæt. Beskyt det fra damp og stænk af væsker.
- Opbevar aldrig din enhed i ekstrem varme eller kolde miljøer. Opbevaringstemperaturen er minus 20°C til plus 45°.
- Udsæt ikke din enhed for direkte sollys i længere tid. Brugstemperaturen går fra minus 5°C til plus 40°C.
- Når enheden lader op skal den placeres i et tilpas ventileret område. Oplad kun enheden i et temperaturmiljø op mellem plus 5°C og plus 35°C.
- Benyt ikke produktet tæt på magnetiske felter.
- Benyt ikke enheden hvis skærmen er ødelagt eller knækket da dette kan resultere i skader. Såfremt en del af din enhed knækker eller bliver beskadiget skal du kontakte din forhandler.
- Benyt ikke enheden i eksplosionsfarlige områder
- Under længerevarende aktiv brug af din enhed kan det forventes at den bliver varm. Hvis din enhed overopheder og rammer en bestemt temperatur vil dens funktioner og ydeevne blive begrænset, og din enhed kan slukke for at køle ned.
- Vær forsigtig ikke at udsætte kameranlinsen for stærkt lys, eksempelvis direkte sollys. Hvis linsen udsættes for stærkt lys, eksempelvis direkte sollys eller en laserstråle, kan det resultere i at kameras billedsensor beskadiges. Skader til billedsensoren kan resultere prikker og pletter i billeder.
- Hvis støv eller fremmedlegemer kommer ind i mikrofonen, i højttaleren eller ørehøjttaleren kan det resultere i at lyden i din enhed bliver forringet og enkelte funktioner vil potentielt ikke virke. Forsøger du at fjerne støv eller fremmedlegemer med et skarpt objekt kan du beskadige enheden og det kan påvirke dens funktionalitet.
- Forbindelsesproblemer og problemer med afladning af batteriet kan opstå i følgende situationer:
 - Hvis du monterer metalklistermærker i nærheden af den indbyggede antenne.
 - Hvis du monterer et beskyttelsescover lavet af metalliske materialer.
 - Hvis du dækker området med antenner med dine hænder eller andre objekter mens du benytter bestemte funktioner såsom opkald eller data.
- For optimalt brug anbefales det at slukke helt for enheden fra tid til anden og fjerne batteriet.

- Anvendelse af en godkendt KAPSYS Skærmbeskyttelse anbefales. Uautoriseret skærmbeskyttelse kan resultere i at sensorer fejler.
- Benyt aldrig blottede eller beskadigede kabler, ej heller beskadiget eller defekte strømforsyninger.

2. SIKKERHED OG SUNDHED

- Hold produktet væk fra små børn.
- Benyt aldrig din smartphone og forhold dig altid til alle sikkerhedsforeskrifter når du kører bil.
- Pas på din hørelse: Undgå længere tids eksponering for høje lydniveauer når du benytter hovedtelefonerne, højttalerne eller modtageren.
- Benyt ikke enheden ved sundhedsfaciliteter og spørg altid om tilladelse før du benytter telefonen nær medicinsk udstyr.
- Mennesker med elektroniske implantater (eksempelvis pacemaker, insulinpumper, neurostimulatorer og lignende) bør placere deres smartphone mindst 15 centimeter væk fra implantatet.

3. REKLAMATION

Reklamationen er kun gældende såfremt produkter benyttes under normale omstændigheder. Alle selvforskyldte skader og enhver af de følgende forhold vil ikke være dækket af reklamation:

- Reklamationsperioden er udløbet.
- Normal slitage af produktet (såsom beklædningen, tastaturet, den visuelle skærm, antennen samt brug af tilbehør).
- Skader som et resultat af forkert brug, eksponering af fugt eller væske eller for kort afstand til en varm kilde.
- Knækkede eller ødelagte enheder, eller enheder med visuelle tegn på stød.
- Manglende overholdelse af forholdsreglerne for brugen af enheden, uheld, uagtsom hed, forkert brug eller ej i overensstemmelse med instruktionerne tilhørende enheden, samt kommerciel brug af produktet.
- Brugen af tilbehør eller tilslutninger som ikke er godkendt af producenten.
- Reparationer eller fysiske ændringer udført af kunden selv, eller andre, uden specifik skriftlig godkendelse fra KAPSYS, eller reparationer eller forsøg på reparationer udført af tredjepart som ikke er autoriseret af KAPSYS.
- Skader forårsaget af force majeure, såsom oversvømmelser, brand, jordskælv og lynnedslag.
- Fejl eller funktionsfejl forårsaget af internettet eller trådløse service udbydere (operatøren) dækkes ej heller af reklamationen. I sådanne tilfælde skal du tage direkte kontakt til din tjenesteudbyder for yderligere assistance.
- En reduktion af batterikapaciteten. Under hele reklamationsperioden bør du kun forvente et mindre fald i kapaciteten. Efter denne periode vil ethvert fald i kapacitet eller tab af funktionalitet blive anset som værende normalt.

I nogen tilfælde kan en reparation uden reklamationsretten blive præsenteret og tilbud for brugerens egen regning. I tilfælde af defekter, kontakt venligst din forhandler.

Det anbefales at tage regelmæssigt backup af dine data. KAPSYS og deres forhandlere kan på ingen måde blive holdt ansvarlige for mistet data eller funktionalitet på baggrund af en defekt, reparation, ombytning eller lignende.

4. ABOUT SPECIFIC ENERGY ABSORPTION RATE* (ENGELSK)

Your SmartVision 3 by KAPSYS is a radio transmitter/receiver. It is designed and manufactured to comply with the radiofrequency (RF) exposure thresholds recommended by the European Union.

This device meets the requirements of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and European Standard for mobile radio devices.

The guidelines use a unit of measurement known as Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2.0W/kg when tested at the head or worn on the body, 4.0W/kg when worn on the limbs.

For body-worn operation, this phone has been tested use with accessories that contain no metal and that position the handset a minimum of 1.5 cm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure. If you do not use a body-worn accessory and are not holding the phone at the ear, position the handset a minimum of 1.5 cm from your body when phone is switched on.

During use, the actual SAR level is usually much lower than the maximum value. In general, the closer you are to the base station, the lower the transmission output of your mobile telephone. To reduce exposure to RF energy, use a hands-free accessory or other similar option to keep the device away from your head and your body.

The highest SAR average value over 10g of body tissue of this device is listed below:

Head: 0,498 W/kg

Body: 0,765 W/kg

Limbs: 1,485 W/kg

5. Restrictions in 5GHz band (ENGELSK)

According to Article 10 of directive 2104/53/EU, the WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5.15 to 5.35 GHz frequency range in the following countries: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, IS, LV, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK.

5. KUNDESERVICE

For yderligere information, kontakt venligst din forhandler eller importøren Instrulog A/S:

Instrulog A/S, Bjerringbrovej 116 – 2610 Rødovre. Telefonnummer: 44 97 94 77.

Du kan også besøge vores website: www.instrulog.dk.

6. TRADEMARKS (ENGELSK)

Company and product brands referred to in this document, are trademarks, either registered or not, and owned by the respective holder as follows:

KAPSYS words, brands and logos are registered trademarks of KAPSYS SAS.

Android, Google, Google Play, Chromecast built-in, YouTube and other marks and logos are trademarks of Google LLC.

Bluetooth names, brands and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc.

7. OM DETTE DOKUMENT

Informationen publiceret i dette dokument kan ændres uden varsel. KAPSYS forbeholder sig retten til at ændre indholdet af dette dokument uden forpligtelse til at informere personer eller virksomheder. KAPSYS kan ikke holdes ansvarlige i tilfælde af tekniske eller udgivelsesfejl samt udeladelser herom, eller i tilfælde af utilsigtet eller indirekte tab eller skade som følge af produktets operation eller afvigelse fra dette dokumentets vejledninger. KAPSYS bestræber sig på løbende at

forbedre kvaliteten og funktionerne af deres produkter. KAPSYS opfordrer derfor til regelmæssigt at besøge hjemmesiden (www.kapsys.com) for at hente de seneste opdateringer og dokumentation omhandlende brugen af produkterne.

RoHS COMPLIANCE (ENGELSK)

This product is compliant with the 2015/863/EC Directive of European Parliament amending ROHS directive 2011/65/EU, on the use restriction of certain hazardous substances (RoHS) in electrical and electronic equipment and its amendments.

CE MARKING (ENGELSK)

This product complies with the CE marking requirements for use in residential, commercial or light industry installations, and satisfies with the provisions of the R&TTE (2014/53/EU/RED) Directive. For more information about CE marking, you can also visit our website at www.kapsys.com.

WEEE DIREKTIV

Symbolet på produktet eller på produktets indpakning indikerer at dette produkt under ingen omstændigheder må bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. I henhold til det Europæiske direktiv 2012/19/EU omhandlende Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE) må dette produkt under ingen omstændigheder bortskaffes uden at blive sorteret på en sorterings facilitet. Bortskaf venligst produktet ved at returnere det til din forhandler eller ved nærmeste offentlige genbrugs/sorterings facilitet.

ADVARSEL:

Der er risiko for permanent høretab hvis hovedtelefoner benyttes ved høj lydstyrke i længere tid.