

# Go-box

## Opsætningsvejledning

---

*Tillykke med din helt egen*

*Go-box!*



*Dette er en vejledning der gør dig i stand til hurtigt og nemt at opsætte din Go-box, så du kan komme i gang med at få oplæst underteksterne på dit TV.*

*Vi ønsker dig god fornøjelse med din Go-box.*

1. Pak din Go-box ud af kassen og placér den ved siden af dit TV og din TV-boks. En TV-boks kan være en TV modtager som eksempelvis en boks fra Yousee, Waoo, et Apple TV, en Chromecast, en DVB-C Tuner eller anden boks der sender digitalt signal ud via HDMI.
2. Tilslut HDMI kabel fra din TV-boks til porten DECODER / HDMI IN i din nye Go-box.
3. Tilslut nu HDMI kabel fra porten TV / HDMI OUT i din Go-box til HDMI IN på dit TV.
4. Tænd for din almindelige TV-boks og for dit TV og vælg et program eller en serie.

5. Din Go-box tænder automatisk op og læser dine undertekster højt, når et program eller en serie starter.
6. Du kan justere talehastigheden ved at trykke på PLUS og MINUS ved ikonet af en løbende person. Knapperne er placeret næstøverst i venstre side af fjernbetjeningen.



7. Du kan også slå talen over til hovedtelefoner ved at trykke på talebobleikonet. Herved får du almindelig tale på TV og læste undertekster i hovedtelefoner. Knappen er placeret øverst i venstre side på fjernbetjeningen.



# Illustration af opsætning



## Gode råd

- Sørg for at din TV-boks har et output på 1080i eller 1080p (Full HD).
- Har du et trådløst netværk (Wi-Fi) bør du forbinde din Go-box til dette, for løbende opdateringer.
  - Husk popcorn.

## Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt din forhandler.

Sørg for at have dit serienummer klar.



Instrulog A/S  
Bjerringbrovej 116  
2610 Rødovre  
[www.instrulog.dk](http://www.instrulog.dk)