

Quick-start-guide



Companion
by Audientes

General information

Companion af Audientes er en avanceret høre og kommunikationsmiddel i ét.

Companion af Audientes er designet og udviklet i Danmark og booster din hørelse efter behov og præferencer i situationer og miljøer hvor du finder det nødvendigt; i samtaler, ved sociale sammenkomster, over telefonen, på arbejde, i bil eller bare når du slapper af derhjemme og ser tv eller lytter til musik.

Software opdateringer

Audientes vil fra tid til anden frigive softwareopdateringer. Disse opdateringer vil automatisk blive gjort tilgængelige i Audientes-appen.

Smartphone kompatibilitet

Audientes-appen er kompatibel med:

- Android-telefoner, der kører version 7 eller nyere, med mindst 2 GB RAM.
- iPhones, iOS der kører version 7 eller nyere

Kundeservice

Hvis du har spørgsmål om dit Audientes-produkt, eller hvis du har brug for teknisk assistance, bedes du sende en e-mail til support@audientes.com.


Kontakt

Audientes


Audientes HQ
Teknikerbyen 5
2830 Virum
Denmark

Hvad er der i æsken


HEADSET

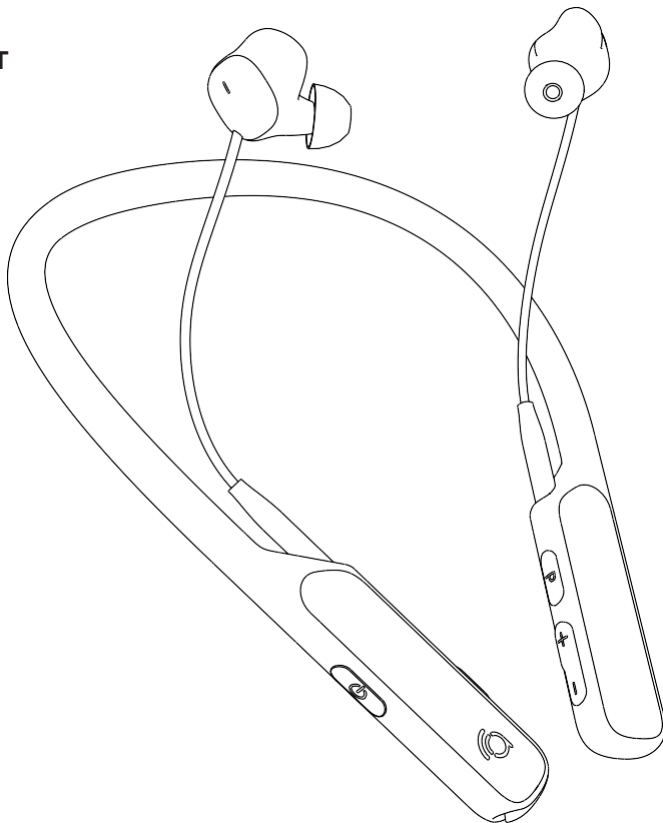


SILIKONE ØRÆRMER

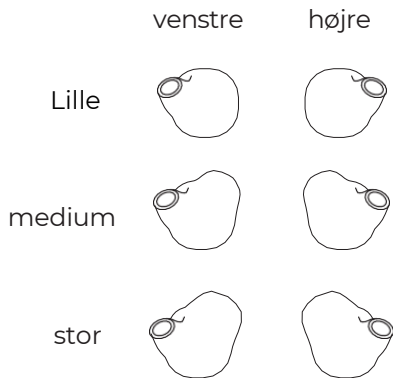


SILIKONE ØRETIPPER

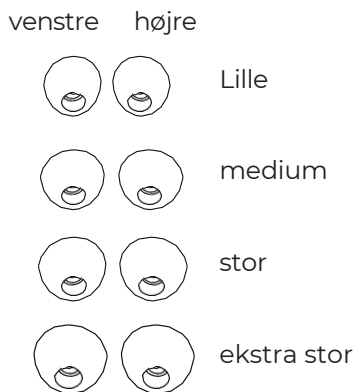

REJSETASKE

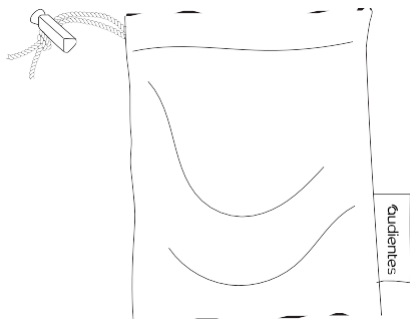


USB-LADEKABEL

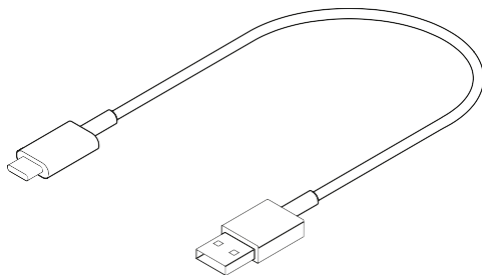


Lær Companion at kende

Alt, hvad du har brug for, for at høre bedre, indbygget i ét headset:


SET FORFRA

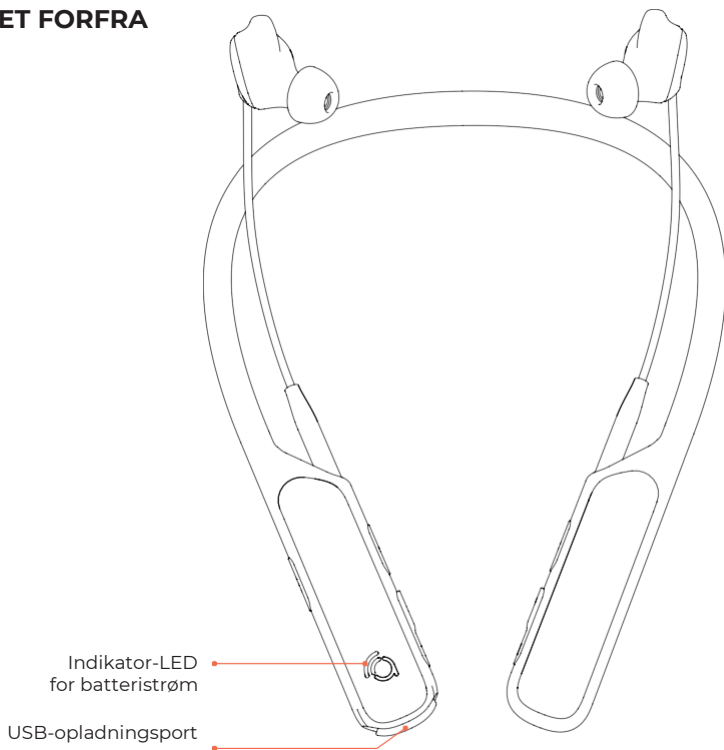

SET FRA HØJRE SIDE

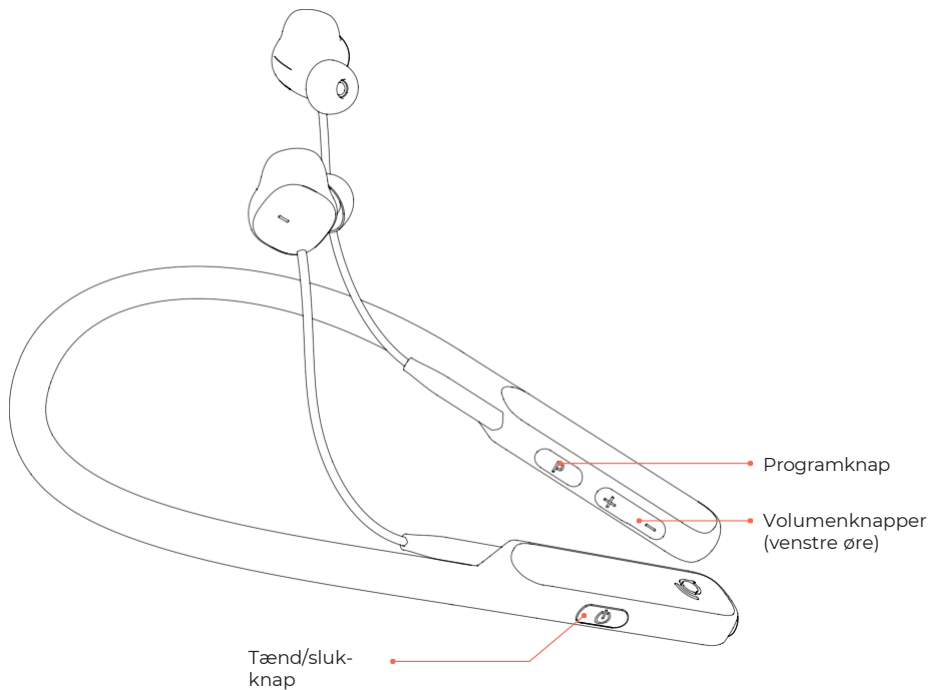

SET FRA VENSTRE SIDE

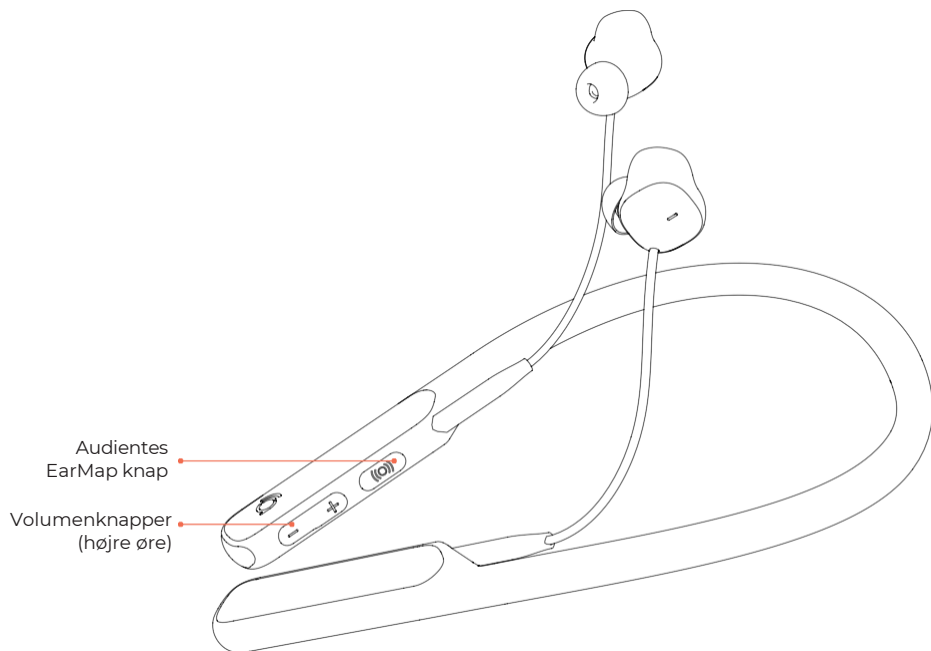


Opsætning af Companion

OPLADNING AF HEADSETTET

Før du bruger din Companion, skal du oplade den.

- 1** Sæt den mindre ende af USB-opladningskablet ind i USB-porten på Companion.

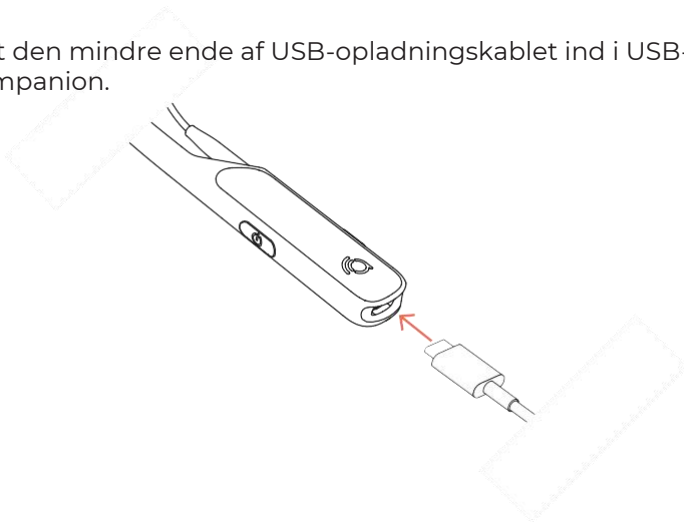


- 2** Sæt den større ende af USB-opladningskablet i en standard USB-oplader [5W/5V/1A] (medfølger ikke).

Sådan konfigurerer du Companion

OPLADNING AF HEADSETTET (FORTSAT)

- 3 Sæt opladeren (medfølger ikke) i en stikkontakt.
- 4 Ved opladning lyser Companions indikatorlampe konstant gult. Når Companion er fuldt opladet, bliver indikatorlampen grøn. Hvis Companion ikke oplader korrekt, f.eks. på grund af høje temperaturer, er indikatorlampen konstant magenta.

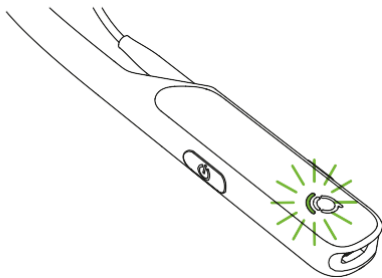


Sådan konfigurerer du Companion


FIND DE RIGTIGE ØRETIPS & ØREÆRMER

Din Companion leveres med fire øretipsstørrelser: Lille, medium, stor og ekstra stor samt tre øreærmer: Lille, medium og stor.

Din Companion kommer med de mellemstore øreærmer og medium øretipper fastgjort til den. Hvis denne størrelse ikke passer til dit øre, kan du prøve de små eller større størrelser. Ørestykket skal sidde behageligt inde i øret. Det bør ikke være for stramt eller for løst.

TÆND FOR COMPANION

Når Companion er fuldt opladet, er du klar til at begynde at bruge det. Hvis du vil tænde for Companion, skal du trykke på knappen  og holde den nede (se side 6).

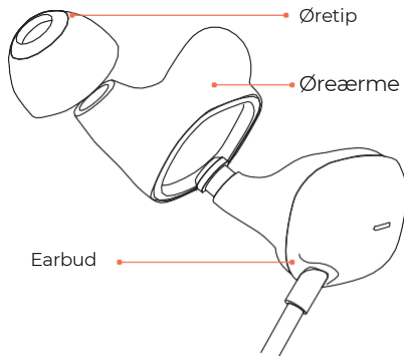

Sådan konfigurerer du Companion

DOWNLOAD AUDIENTES-APPEN

For at udnytte det fulde funktionssæt i Companion kan du downloade Audientes-appen. Du bør opdatere Companion via appen mindst en gang om måneden. For at opdatere Companions firmware skal du gå til Indstillinger ⇒ "Opdater Audientes-software" ⇒ tryk på den blå knap for at starte opdateringen.

Brug appen til at:

- 1 Opret dit Audientes EarMap.
- 2 Se dit Audientes EarMap.
- 3 Skift mellem forskellige lydprogrammer.

For at hente appen skal du scanne QR-koden nedenfor (ved hjælp af din smartphones-kamera) eller downloade den fra Google Play eller App Store og søg derefter efter "Audientes."



Sådan konfigurerer du Companion

SKAB DIT EARMAP

Første gang du begynder at bruge Companion, bør du oprette dit Audientes EarMap. Sørg for, at du er et roligt sted, før du starter kortlægningen. Du kan oprette dit Audientes EarMap på to måder:


- A. Brug Audientes appen.
- B. Brug dit Audientes Companion headset.

A - Brug af Audientes-appen

Når du har downloadet Audientes-appen (se side 11 for mere information), skal du åbne appen på din smartphone. Følg vejledningen på skærmen for først at oprette forbindelse til Companion og derefter oprette dit Audientes EarMap.

B - Brug af Companion


Følg instruktionerne i næste afsnit af denne vejledning (se side 13). Audientes EarMap tager normalt mindre end 5 minutter at gennemføre.

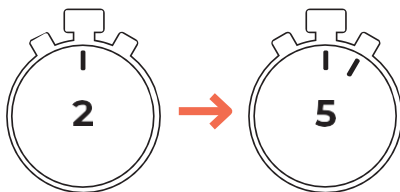

Sådan konfigurerer du Companion


UDFYLD DIN AUDIENTES-ØREKORTLÆGNING (FORTSAT)

1

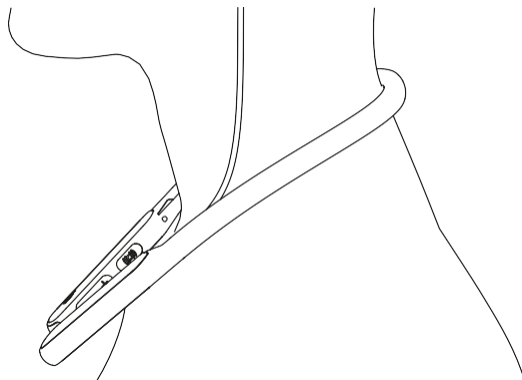

Placer dit headset rundt om halsen (1), og indsæt ørepropperne i begge dine ører (2).

2

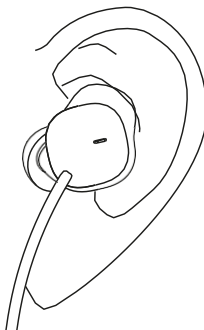

Sådan konfigurerer du Companion

TILPAS DIT AUDIENTES-EARMAP (FORTSAT)

- 1 Sørg for, at du sidder et roligt sted, hvor du ikke bliver afbrudt. Tryk og hold ((O))knappen nede i mindst et sekund.
- 2 En prompt starter Audientes EarMap. Når kortlægningen begynder, vil du høre forskellige toner i dit venstre og højre øre. Hver gang du hører en tone, skal du hurtigt trykke på en vilkårlig knap på headsettet.
- 3 Audientes EarMap er færdig, når du har gennemført kortlægningen i begge ører. En stemmemeddelelse afspilles for at fortælle dig, hvornår du har gennemført kortlægningen.

BEMÆRK: Hvis du har brug for at stoppe kortlægningen, før den er færdig, skal du trykke på ((O))knappen og holde den nede.

Sådan konfigurerer du Companion

SÅDAN PARRER DU COMPANION MED EN SMART BLUEETOOTH ENHED.

Hvis du vil parre Companion med en smartenhed, f.eks. en smartphone, et smart-tv eller en lydenhed via Bluetooth, skal du trykke på P-tasten og holde den nede i 4 sekunder. Dette vil starte parring. Find derefter Bluetooth-indstillingerne på smartphonen, smart-tv'et eller en anden Bluetooth-enhed, og søg efter og par med Companion.

Når du konfigurerer forbindelsen for første gang, kan det være nødvendigt at holde "P" -knappen nede i 4 sekunder for at starte en ny Bluetooth-søgning, eller når du skifter fra at være tilsluttet en enhed til en anden.


Hvis enheden tidligere har været parret med smartenheden, skal du gå ind i smartenhedens Bluetooth-indstillinger og glemme/fjerne/ophæve parringen af den parrede enhed fra Bluetooth-indstillingerne.

For at nulstille Bluetooth skal du trykke på P-tasten i 8 sekunder. Dette sletter alle tidligere Bluetooth-parringen og starter en ny parring.

Brug af Companion

Når du har gennemført Audientes EarMap, er Companion klar til brug. Her er et par tips til at bruge din Companion.

- 1 Justering af lydstyrken.** Brug volumenknapperne til at justere lydniveauet for hvert øre.

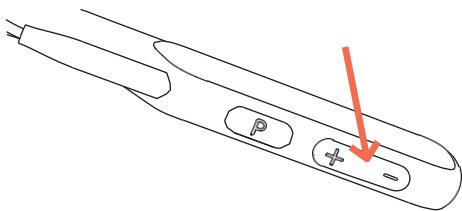


- 2 Valg af lydprogram.** Companion har en række lydprogrammer, der er designet til at hjælpe dig med at høre tydeligt i forskellige situationer. Tryk på **P**-knappen for at bladre gennem lydprogrammerne.

- 3 Yderligere funktioner i tasterne på Companion:**

- Tryk på **P**-tasten i 4 sekunder: Start en ny Bluetooth-parring for at oprette forbindelse til smartphone eller lignende.
- Tryk på **P**-tasten i 8 sekunder: Slet tidligere Bluetooth-parring, og start en ny parring.
- Tryk på Tænd/Sluk og **P**-tasten i 15 sekunder for at nulstille Companion (dette vil også slette enhver Audientes EarMap, der er lavet).

Brug af Companion

- 4 Batteritilstand af Companion.** Magenta-indikatorlampen (se side 9) blinker, når du skal oplade Companion. Du vil også høre en stemmemeddelelse, der siger "Batteriet er lavt.". Du kan altid kontrollere dit batteriniveau ved hurtigt at trykke på  knappen.

BATTERIETS STATUS

Tryk kort på "Tænd/sluk" - knappen, og hvis den vises:	Du har:
Grøn	Batteriet er opladet
Gul	Et par timer tilbage af opladning
Magenta	Et par minutter tilbage af opladning
Magenta blinker	Oplad batteriet hurtigst muligt

FCC CAUTION:

Eventuelle ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

VIGTIG BEMÆRKNING:

Bemærk: Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- **Skift retning på**, eller flyt modtageantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

FCC-strålingseksponeringserklæring:

Dette udstyr overholder FCC-strålingseksponeringsgrænser, der er angivet for et ukontrolleret miljø.

IC CAUTION:

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme Après examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d'acquérir les informations correspondantes.

www.audientes.com