

## Quickguide Badebænk med håndtag

### Samling af stolen:

Badebænken leveres i en papkasse, hvori de nederste dele af fødderne er inkluderet separat. For at samle stolen klar til brug skal du indsætte de 4 fodstøtter i de medfølgende rør og fastgøre dem i den ønskede højde ved hjælp af de medfølgende clips (se illustrationen nedenfor). Kontroller også, at det bløde PUR-sæde sidder korrekt på stellet, da det kan have løsnet sig fra stolen under transporten. Det kan være nødvendigt at trykke knapperne på undersiden af PUR-sædet ind i hullerne på rammen.

### Bemærk! Kontroller, at alle 4 fødder er indstillet i samme højde.

For at kontrollere det skal du tælle hullerne i højdejusteringen, hvor clipsene er placeret.

### Håndtering ved transport

Ved transport kan benene enten afmonteres eller placeres i højeste position for at reducere størrelsen. Den smalle model (302070-71) og standard modellen (302072-73) leveres med 3 stk. i hver kasse og den brede model (302078-79) og XL-modellen (30207X) med 2 stk. i hver kasse. Badebænkene fra Mobilex kan nemt stables.

### Montering af ryglæn (Tilbehør, ikke en del af denne levering)

Badebænkens ryglæn (tilbehør) monteres enkelt ved at indsætte de medfølgende 4 låseclips i de dertilhørende rør under sædet.



### Samlevejledning

Indstilling af sædehøjde (benhøjde): Sædehøjden bør indstilles ergonomisk korrekt så den passer til brugeren. Som tommelfingerregel er sædehøjden korrekt indstillet når brugeren kan nå underlaget med begge fødder.

- Fjern låseclips (A) fra stolens ben
- Juster det teleskopberbare ben til den ønskede højde
- Indsæt låseclips (A) i benets dertilegnede låsehul (B)
- Gentag 1-3 for de øvrige 3 ben



**Vigtigt:** Indstil ikke sædehøjden mens brugeren anvender stolen og sørg altid for at alle 4 ben er en samme højde og låseclips er korrekt monteret. Benene er monteret med skridsikre dupsko

-----