

Quickguide Toiletforhøjer med armlæn og justerbar højde

Beskrivelse af samling

Indstil den ønskede højde som beskrevet i afsnittet

Funktionsbeskrivelse.

Fjern det eksisterende toiletsæde og låg. Juster placeringen af monteringsbeslagene, så de passer til monteringshullerne på toiletkummen. Fastgør toiletsædet med plastikmonteringsskiverne og møtrikkerne som vist nedenfor.



Funktionsbeskrivelse

Justering af højden

Fjern først dækslerne fra hullerne i den ønskede højdeindstilling (I). Fjern de to håndskruer, der holder den bageste stang, ved at skrue dem ud mod uret. Monter bagstangen på den ønskede højdeindstilling og fastgør den med håndskruer på begge sider ved at skrue dem i med uret. Sæt stikdækslerne ind i de tomme huller.


Fjern armlænen (hvis de er monteret), og læg sædet på hovedet.

Træk den forreste teleskopstang opad og ud af sædet, og indstil dens afstand til den tilsvarende højdeindstilling (II). For at justere afstanden mellem de forreste stænger skal du tage låseclipsene ud ved at skubbe metalstifterne ind og flytte plastteleskopdelene til den valgte indstilling på begge sider. Sæt clipsene tilbage i stangen for at låse de teleskopiske dele i den valgte indstilling, og skub stangens sider ind i de tilsvarende slidser (III). Armstøtterne sættes på.

ADVARSEL! Sørg for, at alle komponenter er indstillet til samme højdeindstilling.

Montering og afmontering af armlæn

For at montere en armlænsstøtte skal du trykke på og holde låseknappen nede og sætte armlænet ind i slidsen ved lågets hængsel, og gentag for den anden side. Hvis du vil afmontere en armlænsstøtte, skal du trykke på og holde låseknappen nede og trække armlænet ud, gentag for den anden side.

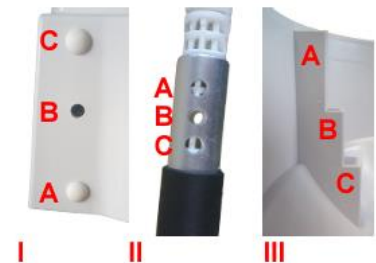

Indstillingsmuligheder for højde på forskellige komponenter