

# SENSOR

Quick Guide (DA)



REHASENSE



**Varenummer:  
RRSENCHL600  
RRSENCHM500**

	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Låsemekanisme og bærehåndtag</li> <li>2. Solidt sæde</li> <li>3. Bremsehåndtag</li> <li>4. Skrueknop til højdejustering</li> </ol>	<p><b>Udfoldning af SENSOR-rollatoren</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk sædet frem og ned for at åbne rollatorrammen</li> </ol>
	
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tryk hårdt på sædet for at sikre, at låsen er på plads</li> </ol>	<p><b>Sammenfoldning af SENSOR-rollatoren</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk på den røde låseknop på rammens forkant</li> </ol>
	
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Løft sædehåndtaget op og tilbage for at folde rollatoren sammen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Når foldet sammen, kan rollatoren stå selvstændigt i opretstående stilling, trædepedalen yder yderligere stabilitet i sammenfoldet stilling.</li> </ol>



### Højdejustering af SENSOR-håndtagene

1. Løsn knappen for højdejustering



### Højdejustering af SENSOR-håndtagene

2. Skub håndtaget opad/nedad til den ønskede højde
3. Brug markeringerne på indersiden sammen med fordybningerne på røret for sikkert at sikre højden
4. Stram knappen igen for højdejustering



### Anbefalet højdeposition for håndtag

5. Håndtaget skal ideelt set placeres i samme højde som brugerens håndled, når man står med en let bøjet albue.



### Øget stabilitet og mere opret gangfunktion

1. Løft det solide sæde opad/fremad, indtil det er lodret
2. Sædet vil stå ubetinget i denne position



3. Brugeren er nu i stand til at gå inden for rammens base
4. Dette giver mulighed for øget stabilitet såvel som større rækkevidde



### Aktiv bremsning

Klem bremsehåndtaget på begge sider for at bremse og forhindre rollatoren i at bevæge sig



### **Parkeringsbremse**

1. Tryk bremsehåndtaget ned i låst position for at forhindre rollatoren i at rulle, selv når brugeren slipper håndtagene
2. Af sikkerhedsmæssige årsager skal parkeringsbremsen aktiveres, når brugeren ønsker at sidde på rollatorsædet
3. Af sikkerhedshensyn skal parkeringsbremsen aktiveres, når brugeren ønsker at rejse sig eller sætte sig ned under brug af rollatoren