

Bano vaske / monteringsbeslag / afløbsrør / højdejusteringsmodul

Pleje og vedligeholdelses dokumentation



BANO DANMARK A/S

Møllehaven 8
4040 Jyllinge - Danmark

1-5

Produkter:**5200/R (højre) og 5200/L (venstre)**

Standardvask gråt støttehåndtag

5200/R-W (højre) og 5200/L-W (venstre)

Standardvask hvid støttehåndtag

5200/R-B (højre) og 5200/L-B (venstre)

Standardvask sort metallic støttehåndtag

5202/R (højre) og 5202/L (venstre)

Hygiejnevask gråt støttehåndtag

5202/R-B (højre) og 5202/L-B (venstre)

Hygiejnevask sort metallic støttehåndtag

5202/R-W (højre) og 5202/L-W (venstre)

Hygiejnevask hvid støttehåndtag

7200 Bano universalvask uden støttehåndtag uden højdejustering**7201** Bano universalvask med monteringsbeslag gråt støttehåndtag- uden højdejustering**7201-W** Bano universalvask med monteringsbeslag hvid støttehåndtag- uden højdejustering**7201-B** Bano universalvask med monteringsbeslag sort metallic støttehåndtag- uden højdejustering**7202-02** Bano universalvask gråt støttehåndtag med højdejustering**7202-W-02** Bano universalvask hvid støttehåndtag med højdejustering**7202-B-02** Bano universalvask sort metallic støttehåndtag med højdejustering**6300/R (højre) og 6300/L (venstre)** Bano Mini vask med monteringsbeslag og gråt støttehåndtag - uden højdejustering**6300/R-W (højre) og 6300/L-W (venstre)** Bano Mini vask med monteringsbeslag og hvid støttehåndtag - uden højdejustering**6300/R-B (højre) og 6300/L-B (venstre)** Bano Mini vask med monteringsbeslag og sort metallic støttehåndtag - uden højdejustering**6301/R-R, 6301/R-L, 6301/L-R og 6301/L-L** Bano Mini vask med monteringsbeslag og gråt støttehåndtag- uden højdejustering**6301/R-R-W, 6301/R-L-W, 6301/L-R-W og 6301/L-L-W** Bano Mini vask med monteringsbeslag og hvid støttehåndtag- uden højdejustering**6301/R-R-B, 6301/R-L-B, 6301/L-R-B og 6301/L-L-B** Bano Mini vask med monteringsbeslag og sort metallic støttehåndtag- uden højdejustering

Materialspecifikation

- **Vaskene** er fremstillet i mineralpulver (knust marmor), og overfladen er beskyttet af en gelcoat med en tykkelse på 1,0 mm. Mineralpulveret er knust marmor, som er sammenpresset og hærdet med et kunststofbindemiddel. 78 % af materialet er knust marmor. 22 % er kunststofbindemiddel, hovedsageligt polyester. Gelcoat-belægningen er af højeste kvalitet, er slidstærk og bliver ikke misfarvet, når det udsættes for sollys eller sæbe.
- **Integreret støttehåndtag på vask:** polyester-pulverlakeret stål.

Test

Vasken choktestes ved spuling med vand, der er 10 °C varmt i 1,5 min, hvorefter det spules med 80 °C varmt vand i 1,5 min. CMI-kravet (Cultured Marble Institute) for test er minimum 500 cyklusser, og vores test viser, at produktet er uforandret efter 2000 cyklusser.

Tolerancegrænser

Længdemål: -1/+1 mm eller 0/+2 mm.
Planhedstolerance: 0 mm.

Produktion

Materialet til vasken er nemt at forme og har en lav krympeprocent. Det er derfor muligt at skabe produkter med en helt lige og jævn overflade og små tolerancegrænser sammenlignet med håndvaske i keramik/porcelæn. Alle materialer er godkendt til indendørs brug i sanitære produkter.

Vedligeholdelse

Rengør med almindelige flydende rengøringsmidler. Polér med et finkornet slibemiddel, og voks derefter (anvend bilprodukter). Hvis du gør dette jævnligt, vil produktet blive ved med at være fint i mange år.

Advarsel

Udsæt ikke produkter for syrer, ammoniak, afløbsrens eller klorin. Hvis overfladen skulle blive ridset eller mat, skal du polere og vokse den som vist herover. Dybere ridser kan slibes forsigtigt med sandpapir til vådslibning, cirka 1200.

Produkter 8200 standard HC-vask



Vedligeholdelse

Vasken, som er fremstillet i porcelæn, kræver minimal vedligeholdelse. Anvend en blød klud eller en svamp sammen med et mildt rengøringsmiddel. Hvis du vil have en skinnende overflade, kan du anvende vinduesrens.

Fjernelse af genstridige pletter

Genstridige pletter fra hårdt eller rustholdigt vand kan ofte fjernes med pletfjerner, men sørg for at håndvasken skylles grundigt efter rengøringen. Regelmæssig rengøring er med til at beskytte produktets overflade mod vandpletter. Når tiden er moden til det, kan du friske overfladens udseende op med et poleremiddel.!

5207-02 Bano monteringsbeslag med højdejustering-grå

52088 Bano monteringsbeslag uden højdejustering

63070 Bano monteringsbeslag uden højdejustering

52093 Bano fleksible afløbsrør



Materialspecifikation

- **Monteringskinner/højdejustering:** natur-eloxeret aluminiumlegering 6063
- **Vandlås og afløbsrør:** polypropenenplast
Pakning: TPE-plast
Pladedele: rustfrit stål, 18/8
Forkromede dele: ABS-plast

Vedligeholdelse

Ved rengøring kan der anvendes almindelige rengøringsmidler. Anvend en blød klud eller en svamp sammen med et mildt rengøringsmiddel. Gør objektet vådt, og tør af med en fugtig klud. Skurepulver og ståluld bør ikke anvendes, da det ødelægger finishen. Rengøringsmidler, som indeholder alkohol og anvendes i lægemiddelindustrien, kan bruges.

Advarsel

Anvend aldrig skurepulver eller rengøringsmidler, som indeholder skrappe kemikalier. Syrer, metanol, husholdningssprit, mineralsk terpentin og lynol må ikke anvendes. Tak, fordi du tager dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem – det er en god investering!

Bano højdejusteringsmodul

Pleje og vedligeholdelses dokumentation

Produkter:

5207-EL Bano højdejusteringsmodul elektrisk til hygiejnevask 5202

5207-MA Bano højdejusteringsmodul manuelt med håndtag til hygiejnevask 5202

52070 Bano monteringsbeslag uden højdejustering til hygiejnevask 5202

Produktinformation

Bano højdeindstilling med elmotor er et vægbeslag til montering af vasken. Beslaget kan bruges med Bano hygiejnevask artikel nr. 5202. Beslaget kan højdejusteres 200 mm ved hjælp af den elektriske motor. Højdejusteringen betjenes ved hjælp af kontrolpanelet som er monteret på vasken.

Materialspecifikation

5207-EL/MA og 52070:

Hovedramme: El galvaniseret stål
Afskærmningsdæksel: ABS/ PMMA plast i farvekode RAL 9016.
Maks vægt statisk belastning: 300 kg

5207-EL: Strømforsyning: Linak: CB8001T50-0010
U In: 230 V AC /50Hz, I In: Max. 0.63A, U Out: 24V DC,
max. 120 VA IPX5

Tilkobling: Vægmonteret koblingsboks min IP44. Tilkobling udføres af elektriker.



5207-EL



5207-MA



52070



Rengøring og vedligehold

Der kan bruges almindeligt mildt rengøringsmiddel til rengøring. Brug en blød klud eller svamp sammen med et mildt rengøringsmiddel. Skyl med vand og tør af med en fugtig klud. Rengøringsmidler som indeholder alkohol og bruges i lægemiddelindustrien, er OK. Andet vedligehold af bevægelige del er ikke nødvendig, men Bano anbefaler regelmæssig brug af højdejusteringen. Såfremt højdejusteringen ikke fungerer, kontakt venligst Bano for vejledning og assistance.

Advarsel

Brug aldrig skuremidler eller rengøringsmidler som indeholder stærke kemikalier, skurepulver, klor, syrer, metanol, sprit, terpentin eller lynol.

Affaldshåndtering og genanvendelse

Produktet kan genanvendes. Elektriske komponenter kan let afmonteres og leveres til genanvendelse i overensstemmelse med myndighedskrav.

Tak fordi du tager dig tid til at læse denne instruktion grundigt igennem – det er en god investering!