

Audinor Soundfield 3.0

Quick Guide DK_2022-01-02_01



Trådløs soundfield højttaler som fungerer sammen med Audinor 3.0 trådløst mikrofonsystem, ofte brugt i forbindelse med skole/undervisning. Findes i version med (A20) og uden (P20) genopladeligt batteri.

Højttaleren er beregnet til indendørs brug.

Opladning (gælder model A20 med genopladeligt batteri)


Højttaleren bør lades op før brug. Hvis batteriet er tomt, vil det tage flere timer at lade op. Lampen på strømforsyningen lyser rødt når enheden oplades og grønt når enheden er fuldt opladet. Højttaleren kan stadig bruges under opladning.

Brug Audinor Microphone T20 som lærer/undervisermikrofon. Man kan bruge T20 med eller uden hovedbøjlemikrofon.

Audior Soundfield 3.0

Quick Guide DK_2022-01-02_01

Højttalerens bagpanel

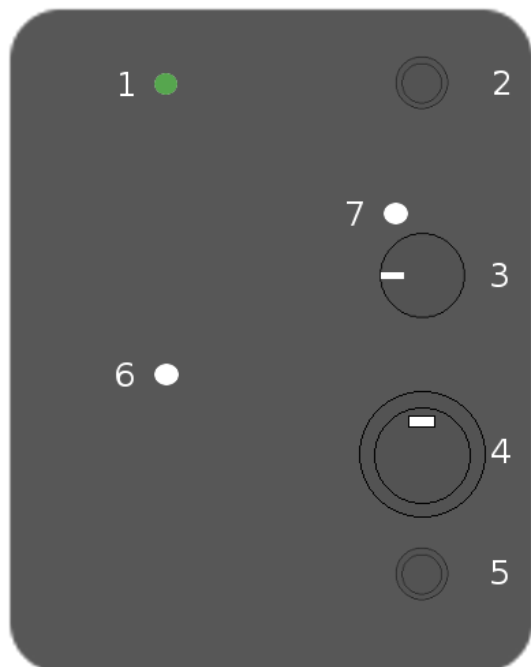

1. LED lampe
2. Audio ind/ud
3. Volumenkontrol
4. Tænd "On" / Sluk "Off"
5. Strøm/ladestik
6. Hul for tilkobling/paring
7. Maks. anbefalet lydstyrke

Tænd/sluk

Tænd/sluk vippebryderen (4) findes på bagsiden af højttaleren. Tryk på knappen – på siden med det hvide "On" symbol - for at tænde for højttaleren. Lampen (2) vil lyse når enheden er tændt.

Start med at skrue ned for lydstyrken (3) på højttaleren. Hvis systemet har en hovedbøjlemikrofonen, tages denne på, hvorefter du tænder for senderen. Skru forsigtigt op på højttaleren til ønsket lydstyrke. Hvis man benytter T20 mikrofon uden hovedbøjlemikrofon, anbefales at lydstyrken ikke reguleres højere end (7) maksimalt anbefalet niveau.

Hvis man oplever akustisk tilbagekobling (feedback), bør lydstyrken reguleres ned. Alternativt, kan højttaleren placeres længere væk. Vi anbefaler at T20 senderen tilkobles en hovedbøjlemikrofon ved behov for stor forstærkning.

Audior Soundfield 3.0

Quick Guide DK_2022-01-02_01

Radioforbindelse

Lampen på højttalerens bagside lyser konstant grønt når højttaleren har forbindelse med en sender. Hvis senderen er enten slukket, midlertidig dæmpet ("mute") eller udenfor rækkevidde, vil lampen lyse rødt.

Rengøring af højttaleren

Rengør enheden med en helt tør klud. Fronten på højttaleren kan tages af og rengøres separat. Den klikkes på igen og holdes på plads ved hjælp af magneter.

Problemløsning

Jeg kan ikke tænde for højttaleren

A20: Sørg for at højttaleren er fuldt opladet.

P20: Forsikre dig om, at strømkablet er korrekt sat i, og at strømforsyningen er tilkoblet, og at strømsvitchen på væggen er tændt. Sørg for, at (4) tænd/sluk bryderen er tændt "On".

Radioforholdene / rækkevidden er ikke god

Forsøg om muligt at reducere afstanden mellem mikrofon og modtager. Mennesker og andre fysiske forhindringer kan reducere den effektive rækkevidde. Det samme gælder trådløse routere (trådløst internet) og andet udstyr som benytter 2.4GHz området.

Lydkvaliteten er ikke god

Forkort mikrofonafstanden ved at regulere længden på halssnoren. Oplad højttaleren og senderen. Skru op for lydstyrken indenfor anbefalet lydniveau (7).

Jeg kan ikke høre noget

Forsikre dig om, at alle enhederne er tændt, at de er korrekt parret og at volumenkontrollen ikke er skruet helt ned. Ved korrekt radioforbindelse vil lampen på højttaleren vil lyse grønt.

Kontaktoplysninger:

Audior ApS - Benediktevej 5, DK-3480 Fredensborg
info@audior.dk , www.audior.dk , Mob:(+45)42180685