


Quick Guide Kørestols Stol M5V2L

INDSTILLING AF STOL Placer kørestolen i stolen

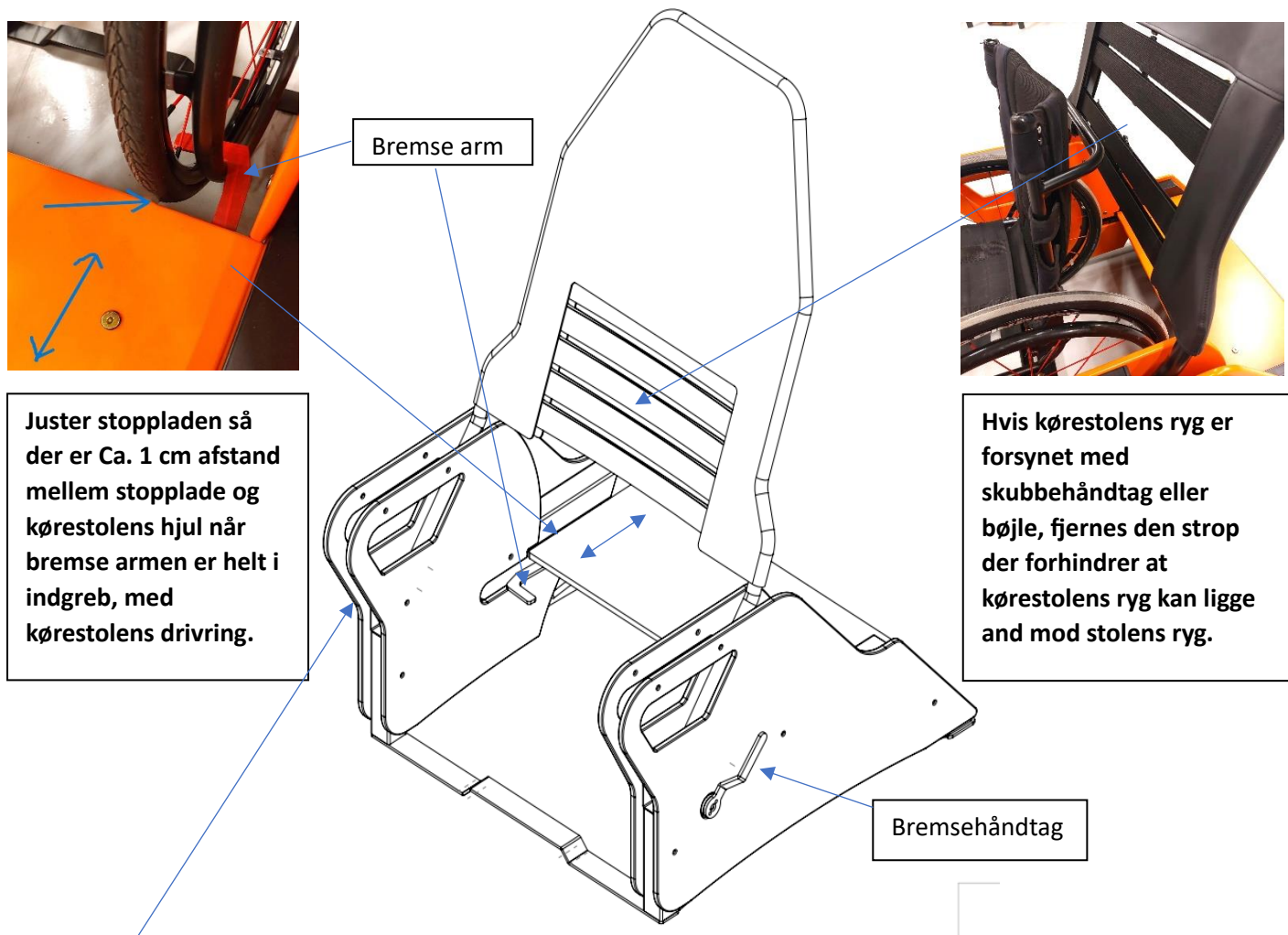

BRUG AF STOL

Bak kørestolen ind i stolen, slå højre og venstre bremse til (kørestolens egen hjulbremse skal ikke være aktiveret). TJEK AT BEGGE ARME ER I INDGREB

Hvis kørestolen er forsynet med elektriske hjul, skal disse være slukkede.

Hvis kørestolen er forsynet med antitip skal disse være slået op.

Aktiver udløserhåndtag til ryg og tilt bagover. Når ryggen er i ønsket tilt position, slippes udløserhåndtag, og ryggen er i låse position.

Udløserhåndtag kan forblive aktiveret ved skub til siden ved fuld aktivering



Advarsel! Benyt aldrig stolen, uden at den er korrekt tilpasset brugeren og brugerens kørestol.