


Med Lexilens ændres synet




*Académie
Nationale
de Médecine*

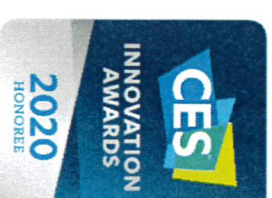

92 % af Lexilens brugere siger, at det har ændret deres liv



Funktioner

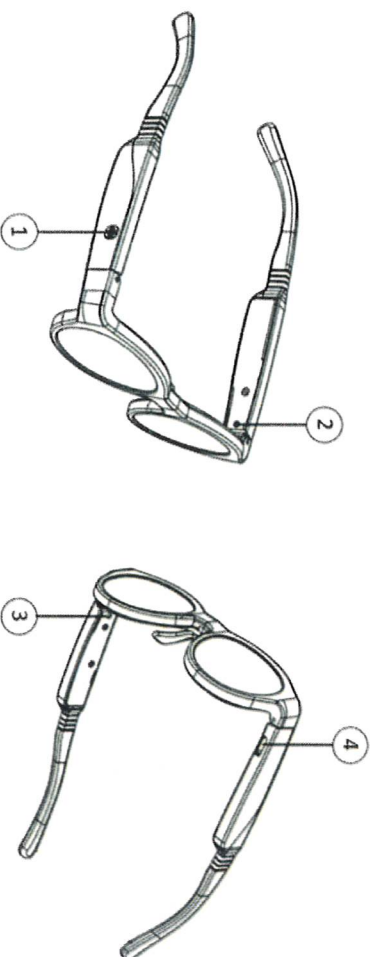

- ① Tænd/sluk knap - Bluetooth®
- ② Batteriopladerindikator (LED)
- ③ Tænd/Sluk/Bluetooth® indikatorlys (LED)
- ④ USB-C port


Tænd og sluk Lexilens® med én knap

- 1 Klik på knappen for at tænde for Lexilens®
 - 2 LED'en på højre arm lyser op, og brilleglassene bliver mørke."
- Lexilens er TÆNDT.

BEMÆRKNINGER

Lexilens® slukker automatisk efter en times kontinuerlig brug. Det anbefales at tage en 5 minutters pause, før du bruger Lexilens® igen.

lunettes de nouveau.

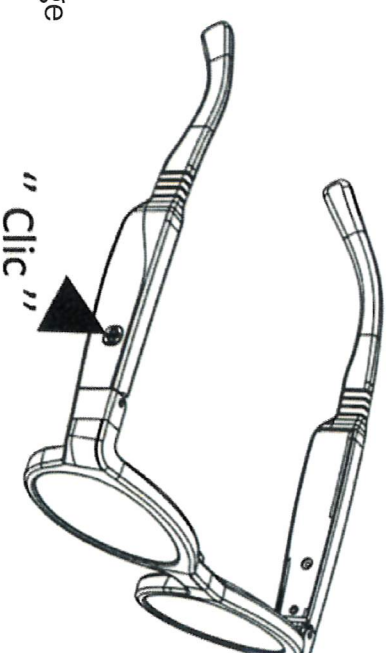

Indstillinger via mobilapplikation




- App “Lexilens”
- En indstilling per person
- Parametre gemmes i Lexilens®
- Smartphone ikke nødvendig hereafter.



Oplad Lexilens®

Lexilens® oplades som en smartphone

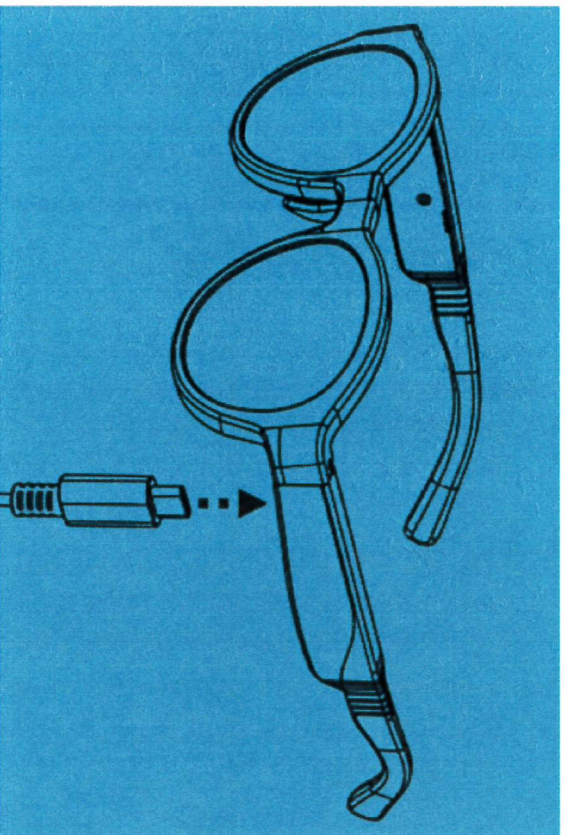

Stik Lexilens® under venstre arm.

LED'en på venstre arm bliver orange

Batteriet er ved at oplade.

LED'en på venstre arm bliver grøn

"Batteriet er opladet"

Bemærkning

5 timer for fuld opladning

"En fuld opladning giver mulighed for at bruge Lexilens® i 20 timer.