

Fjernkontroll - betjening

Justering av rygg:
Opp - ned

Justering av ben-del:
Opp - ned

Justering av hele sengen:
Hev og senk.

Sekvens 1 left:
Sekvens som tar sengen
til sittende posisjon rotert
90 grader til venstre.


Sekvens 3 home:
Sekvens som tar sengen
til liggende posisjon i
lengdeaksen.

Rotasjon venstre:
Justering av rotasjonen på
sengen til venstre.

Symbol som viser
hvilke av funksjonene
som man kan låse
med låsemenyen

Sekvens 2 right:
Sekvens som tar sengen
til sittende posisjon rotert
90 grader til høyre.

Rotasjon høyre:
Justering av rotasjonen på
sengen til høyre.

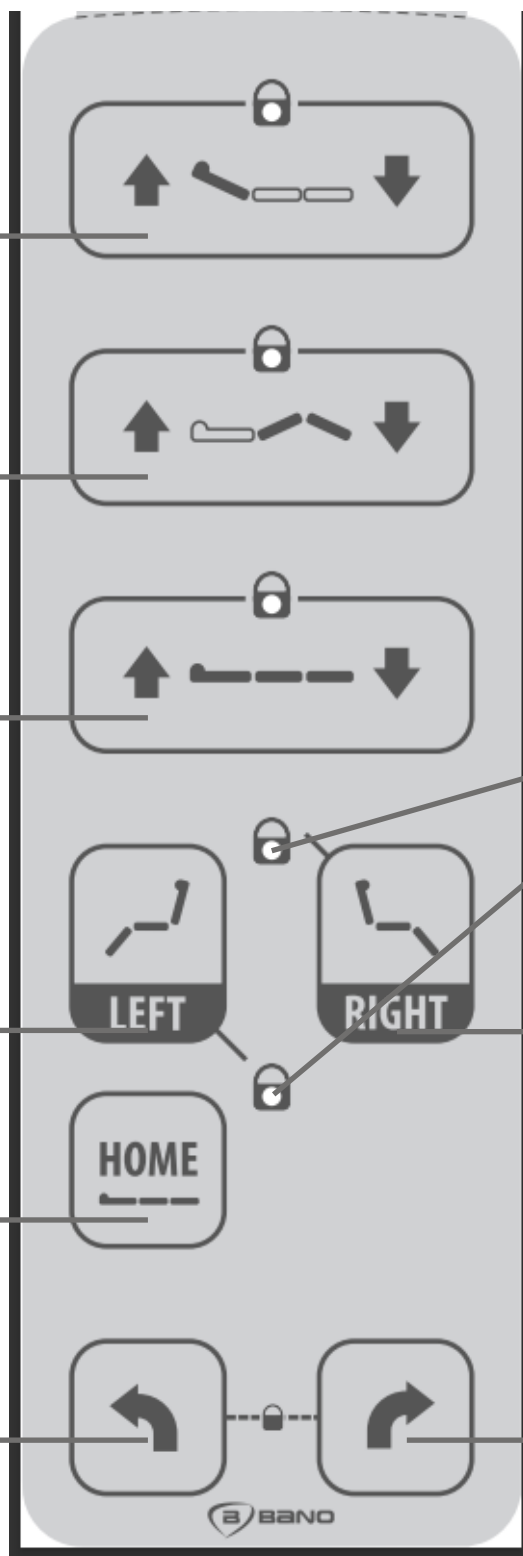

Sekvenser

Sekvens	Utgangsposisjon	Bevegelsesmønster
Sekvens 1 left: Tar sengen til sittende posisjon rotert 90 grader til venstre.	Flatt liggende, men kan startes i hvilken som helst posisjon.	Flatt liggende (utgangsposisjon - rygg-del og ben del opp - rotasjon venstre til 90 grader på lengdeaksen - bendel foldes ned til siden - rygg følger på for oppreist sittestilling.
Sekvens 2 right: Tar sengen til sittende posisjon rotert 90 grader til høyre.	Flatt liggende, men kan startes i hvilken som helst posisjon.	Flatt liggende (utgangsposisjon - rygg-del og ben del opp - rotasjon høyre til 90 grader på lengdeaksen - bendel foldes ned til siden - rygg følger på for oppreist sittestilling.
Sekvens 3 home: Tar sengen til flatt liggende posisjon.	Sittende rotert til en av sidene, men kan startes i hvilken som helst utgangsposisjon.	Oppreist sittestilling rotert 90 grader til en av sidene (utgangsposisjon) - ben-del løftes - ryggdel går litt bakover. Sengen roteres 90 grader tilbake til lengderetningen - ryggdel senkes og ben-del senkes.
Rotasjon venstre: Kan styre rotasjonen av sengen mot venstre innenfor programmerte områder.	• Hevet rygg- og ben-del. • 90 grader rotert i oppreist sittestilling.	• Utgangsposisjon hevet rygg og ben-del: Sengen kan roteres fritt mot venstre. • Utgangsposisjon 90 grader rotert i oppreist sittestilling: Sengen kan roteres innenfor område på ca. 10 grader.
Rotasjon høyre: Kan styre rotasjonen av sengen mot høyre innenfor programmerte områder.	• Hevet rygg- og ben-del. • 90 grader rotert i oppreist sittestilling.	• Utgangsposisjon hevet rygg og ben-del: Sengen kan roteres fritt mot høyre. • Utgangsposisjon 90 grader rotert i oppreist sittestilling: Sengen kan roteres innenfor område på ca. 10 grader.

Feilsøking / nullstilling av sengens elektronikk

Sengens elektronikk kan nullstilles ved behov. Dette vil være nødvendig dersom sengen sine bevegelser er låst. Når du prøver å betjene sengen vil den ikke bevege seg, men avgi et lydsignal.


Neste steg er å holde nede knappene for fot-del nede samtidig. Sengen vil gi et lydsignal i ca. 10 sekunder. Ved lydsignalet slutt vil sengen være nullstilt. Sengen skal nå kunne beveges normalt.

Dersom sengens funksjoner fremdeles er låst og den avgir et lydsignal, er feilen ikke løst. Sjekk alle koblinger for å forsikre deg om at alle konnectorer er riktig tilkoblet.

Hvis kablene er riktig tilkoblet og problemer verdvarer, kontakt deretter Bano for videre assistanse.

Nullstilling av sengens elektronikk:

Hold nede knappene i 10 sek. Sengen vil avgi lydsignal til den er nullstilt

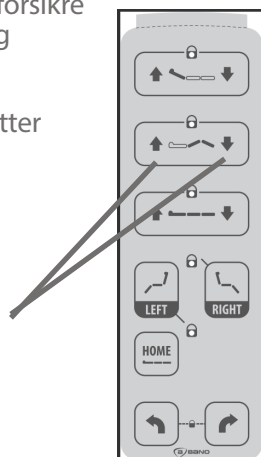

Låse/låse opp BVS

Orientering og funksjonslås-menyen aktiveres ved å holde nede de to rotasjonsknappene samtidig i 5 sekunder, til pipelyden endres fra rask til sakte.

I løpet av de neste fem sekundene kan en funksjonsknapp trykkes i 5 sekunder for å slå en lås på eller av for den aktuelle funksjonen.

Orienteringslåsen vil spesifikt begrense den bakre delen av sengen fra å senkes når pasienten vender mot henholdsvis venstre eller høyre side av sengen.

Dette gir mulighet for plassering av sengen betydelig nærmere en vegg enn i ulåst posisjon.

Hold nede samtidig i 5 sekund for å få tilgang til låse meny

