

bide™

Oversigt

Optageknap

Tryk her for at indtale din egen personlige besked

Lydstyrkeknapper

Tryk for at justere lydstyrken

Bide-knap

Tryk her for at slå notifikationen fra

Hurtig opsætningsvejledning

1.

Tilslut

Placer blot Bide i nærheden af din seng, f.eks. på et natbord, og sæt den i en stikkontakt.

2.

Optag

Tryk på optageknappen, og følg stemmeinstruktionerne for at gemme dine egne personlige beskeder.

3.

Tilpas

Indstil lydstyrken til det ønskede niveau ved at trykke på + og - knapperne.

4.

Afbryd

Bide kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på den midterste Bide-knap.

Bide registrerer, når du vågner om natten og afspiller en af dine gemte lydbeskeder samt giver et dæmpet baggrundsllys, der hjælper dig med at finde vej sikkert om natten.



Mere information på www.getbide.com

