

*V-serie*  
*JLR-serie*



*Tilbehør*

# Indhold

Hvad finder du i tilbehørskataloget

## V-serie

### Styr

- Standard styr
- Bøjlestyr
- 2-delt styr
- Ledsagerhåndtag til 2-delt styr
- Ledsagerhåndtag til standard styr
- Vertikalt greb

### Pedaler

- Standard pedal
- Skridsikker pedal
- Unionpedal med vægtklods
- Unionpedal med vægtklods og Velcro
- Unionpedal med Velcro og indvendig sidestøtte
- Fodplade metal model JI
- Fodplade plast
- Vægtklods

### Pedaler diverse

- Pedaladapter
- Pedalforlænger
- Pedalarm kort
- Pedalarm med knæled
- Støtte til stift ben eller protese

### Sadler

- Standard sadel
- Luft sadel
- Oval sadel
- Damesadel
- Bred gelsadel
- Unisadel
- Unisadel med beslag
- Kropsstøtte med beslag
- Sadelpind vinkel til kropsstøttebeslag

### Kurve og tasker

- Kurv front
- Kurv bag
- Cykeltaske
- Bagageboks

### Diverse

- Cykellygte - diodelys
- Cykellås med nøgle
- Lav gearing 26 tand
- Høj gearing 18 tand
- Cykelcomputer
- Spejl
- Trinplade
- Stokkeholder
- Bakgear
- Rollatorstativ
- Overtræksgarage
- Skubbestang inkl. bundrør
- Hydraulisk bremse

- 3 Motor fjeder til Yamaha motor 18
- Batteri - gl. model 19
- 4** Ladeapparat til Yamaha batteri 19
- Batteri - MPF 19
- 4** Ladeapparat til MPF batteri 19

## J-L-R serie

### Styr

- 5 Standard styr til Jørn 20
- 5 Standard styr til Line og Rasmus 20
- 5 2-delt styr 21
- 6 Ledsagerhåndtag 21
- 6 Ledsagerhåndtag til standard styr 21
- 6 Skubbestang højdeindstillelig 21

### Pedaler

- 7 Unionpedal med vægtklods 22
- 7 Unionpedal med vægtklods og Velcro 22
- 7 Unionpedal med Velcro og indvendig sidestøtte 22
- 8 Fodplade med Velcro 23
- 8** Vægtklods 23

### Sadler

- 8 Almindelig sadel 24
- 9 Unisadel med beslag til kropsstøtte 24

### Sadelpinde

- 9 Sadelpind lige 25
- 10** Sadelpind lige + 10 cm 25
- Sadelpind vinkel 26
- 10 Sadelpind vinkel + 10 cm 26
- 10 Besalg til kropstøtte nederst 26

### Kropsstøtter

- 11 Kropsstøtte med beslag 27
- 11 Kropsstøtte, høj med beslag 27
- 12 Kropsstøtte med vest og beslag 27
- 12 Vest til kropsstøtte 28
- 13** Brystbånd til kropsstøtte 28

### Modeloversigt V-Serie

### Modeloversigt J-L-R serie

## 20

## 20

## 22

## 24

## 25

## 27

## 30

## 31

# Hvad finder du i tilbehørskataloget

Nærværende tilbehørskatalog indeholder standard tilbehør til cykler fra Jørn Iversen ApS, til følgende modeller:

## V-serie:

Viktor  
Viktor Power MPF  
Viktoria  
Viktoria Power MPF  
Vik  
Vik Power MPF  
Viki

## J-L-R-serie:

Jørn  
Line  
Rasmus

## Sådan er tilbehørskataloget opbygget

Tilbehørskataloget er opdelt i sektioner, således at du finder tilbehør til V-serie først. Sidernes yderkanter er markeret med grøn kant. J-L-R seriens sidekanter er markeret med blå kant. Bagest i kataloget finder du en oversigt over de forskellige V-serie og J-L-R serie modeller.

Hver tilbehørsdel er beskrevet med en illustration, en kort beskrivelse og en monteringsvejledning. Nogle tilbehørsdele skal monteres af fagpersonale - det vil i langt de fleste tilfælde være på vores fabrik i Sønderjylland eller vores "rullende montør", der kommer over hele landet. Når denne slags tilbehør bestilles, vil vi kontakte dig og aftale det videre forløb.

## Tilbehørskataloget er også på internettet

Tilbehørskataloget findes også på vores hjemmeside: [www.ji.dk/shop/tilbehoer-cykler-15c1.html](http://www.ji.dk/shop/tilbehoer-cykler-15c1.html)

## Hvordan man finder tilbehøret

Start i indholdsfortegnelsen på side 2, hvor alt tilbehør er angivet med sidenummer. Hvis du har brug for at se, hvordan tilbehøret ser ud, kan du selvfølgelig også bladre i kataloget og finde det, du har brug for.

Det er vigtigt at du ved, hvilken model, tilbehøret skal bruges til.

I beskrivelsen af tilbehøret finder du varenummeret på tilbehørsdelen. Dette varenummer skal bruges ved bestilling.

## Hvordan man bestiller tilbehør

Tilbehør kan bestilles på følgende måder:

Telefon 74 66 92 42

E-mail [iversen@ji.dk](mailto:iversen@ji.dk)

Web [www.ji.dk](http://www.ji.dk)

HMI basen

## Hvordan man bestiller tilbehør, der ikke findes i kataloget

Hvis en bruger har behov for tilbehør, som ikke findes i tilbehørskataloget, vil vi meget gerne hjælpe med at skaffe det hjem. Måske er brugeren i den situation, hvor tilbehøret slet ikke findes - også der hjælper vi med at finde en løsning, simpelt hen ved at lave tilbehøret.

## Fejl i beskrivelser/illustrationer

Vi prøver at være så omhyggelige som muligt når vi laver beskrivelserne i tilbehørskataloget. Men vi er mennesker, og kan fejle. Det kan også være, at tilbehør udgår af vores sortiment, eller at der er kommet noget nyere og bedre siden tilbehørskataloget blev lavet, sådan at det tilbehør, der bestilles, kan se lidt anderledes ud end på illustrationerne. Der tages forbehold for sådanne fejl og produktændringer.

## Udgået tilbehør

Det hænder, at tilbehør ikke længere er aktuelt, eller bliver erstattet af andet tilbehør, som opfylder behovet bedre. I disse tilfælde kan det forekomme, at det tilbehør, som er bestilt, vil vise sig at være lidt anderledes end det er beskrevet i dette tilbehørskatalog. Der tages forbehold for udgået tilbehør, men vi vil altid bestræbe os på at levere alternativt tilbehør, der kan erstatte det bestilte tilbehør.

# V-serie

V-serien består af følgende modeller:

Viktor, Viktor Power  
 Viktoria, Viktoria Power  
 Vik  
 Viki

## Note

Hvor intet andet er angivet, passer tilbehøret til Viktor og Viktoria også til Viktor Power og Viktoria Power.

## Styr

Til V-serien findes der forskellige slags styr og håndtag. Det er vigtigt at der vælges det rigtige styr, så brugerens behov er bedst muligt dækket. F.eks. er bøjlestyret velegnet, hvor der er behov for at kunne holde fat på forskellige steder, i stedet for på det traditionelle styr.

Alle cykler leveres med standard styr. Et andet styr kan eftermonteres uden brug af fagpersonale.

### Standard styr



Vare nr	Passer til
VL-160	Viktor
VJL-160	Viktoria
VIK-L-36	Vik
VIKI-L-36	Viki
HMI	

#### Beskrivelse:

Styret kan drejes i forskellige vinkler, hvis det er monteret i en indstillelig frempind, Afstanden til styret ændres ved at vinkle frempinden op eller ned, for optimal komfort.

#### Montering:

Afmonter det gamle styr på de 2 umbraco skruer på frempinden. Styret monteres med samme skruer. Styret justeres op eller ned før det spændes på skrue. Ved indstillelig frempind løsnes umbracoskruen *under* frempinden og frempindens vinkel ændres. Stram umbracoskrue igen.

### Bøjlestyr



Vare nr	Passer til
VT01	Viktor
VJT01	Viktoria
VKT01	Vik
HMI	47822

#### Beskrivelse:

Bruges til personer med dårlig ryg, svage eller gigt-rante hænder, enhåndsbrugere. Styret er monteret med behageligt blødt mosgummi.

#### Montering:

Monteres som standard styr. Styret indstilles så brugeren holder fast med hånden omkring den forreste del af styret. Styret vinkles op, så det støtter underarmen. Sidestillingen ændres ved skiftevis at holde på den forreste eller bagerste del af styret.

## 2-delt styr



Vare nr	Passer til
VIKT16	Vik
VIKIT16	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Vælges hvis cyklisten har brug for at få styret tæt ind på kroppen, eller kun har lidt bevægelse i armene. Man kan hvile hånden mange steder på styret.

### Montering:

Det 2-delte styr monteres i frempinden ved at løsne for beslag og hurtigspænderen på styret, hvorefter styret justeres op, ned, frem og tilbage.

## Ledsagerhåndtag til 2-delt styr



Vare nr	Passer til
VIKT17	Vik
VIKIT17	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Anvendes hvis brugeren ikke selv kan eller må styre cyklen. Hjælperen bruger ledsagerhåndtaget til at hjælpe med at styre og trække cyklen. Fordelen ved at bruge ledsagerhåndtag er, at der bevarer god kontakt mellem bruger og hjælper, da man er tæt på hinanden.

### Montering:

Nederste u-bøjle af styret udskiftes med den nye. Derefter monteres ledsagerhåndtaget i enden af den nye u-bøjle. Ledsagerhåndtaget indstilles i den ønskede højde ved at vippe håndtaget frem eller tilbage. Fastspændes med medfølgende styrclamps.

## Ledsagerhåndtag til standard styr



Vare nr	Passer til
VT41	Viktor
VJT41	Viktoria
VIKT41	Vik
VIKIT41	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Anvendes hvis brugeren ikke selv kan eller må styre cyklen. Hjælperen bruger ledsagerhåndtaget til at hjælpe med at styre og trække cyklen. Fordelen ved at bruge ledsagerhåndtag er, at der bevarer god kontakt mellem bruger og hjælper, da man er tæt på hinanden.

### Montering:

Den ene del af rørbæringsbeslaget monteres omkring frempinden på cykelstyret. Derefter indstilles ledsagerhåndtaget i den ønskede højde ved at vippe håndtaget frem eller tilbage. De 4 umbracoskruer spændes.

## Vertikalt greb



Vare nr	Passer til
VT48	Viktor
VJT48	Viktoria
VIKT48	Vik
VIKIT48	Viki
HMI	47852

### Beskrivelse:

Bruges for at få bedre greb flere steder på styret. Ideelt til brugere, hvis håndledsstilling gør, at det er nemmere at holde fast og dreje på styret hvis man holder fast lodret på styret. Derved undgås, at hånden mister grebet, når styret drejes.

### Montering:

Monteres ved siden af de originale styrhåndtag. Justeres, så de står lodret op fra styret.

# Pedaler

Der findes flere forskellige pedaler til Viktor-Viktoria-Vik- og Viki cyklerne. Valget af pedaler er utrolig vigtigt for at gøre brugeren så selvhjulpne som muligt. Der kan bl.a. fås pedaler med Velcro over pedalen, så foden ikke hopper af pedalen så nemt, som den kan ved de almindelige.

## Specialtilpassede pedaler fremstilles efter brugerens ønske og behov.

Alle unionpedaler er forsynet med vægtklods, så pedalerne altid står vandret.

## Standard pedal



### Venstre

Vare nr	Passer til
VL-550	Viktor
VJL-550	Viktoria
VIK-L-04	Vik
VIKI-L-04	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Skridsikker gummi på trædefladerne. Gule reflekser i siderne.

### Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

**OBS:** Vær opmærksom på, at venstre pedal har linksgvind.

### Højre

Vare nr	Passer til
VL-540	Viktor
VJL-540	Viktoria
VIK-L-10	Vik
VIKI-L-10	Viki
HMI	

## Skridsikker pedal



### Venstre

Vare nr	Passer til
VT26	Viktor
VJT26	Viktoria
VIKT26	Vik
VIKIT26	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Bred trædeflade med skridsikre knopper.

### Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

**OBS:** Vær opmærksom på, at venstre pedal har linksgvind.

### Højre

Vare nr	Passer til
VT25	Viktor
VJT25	Viktoria
VIKT25	Vik
VIKIT25	Viki
HMI	

## Unionpedal med vægtklods



### Venstre

Vare nr	Passer til
VT30	Viktor
VJT30	Viktoria
VIKT30	Vik
VIKIT30	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Hård plastrem over wrist. Stigbøjlefunktionen sikrer, at foden fastholdes, så den ikke skrider fremad eller til siden.

### Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

**OBS:** Vær opmærksom på, at venstre pedal har linksgvind.

### Højre

Vare nr	Passer til
VT29	Viktor
VJT29	Viktoria
VIKT29	Vik
VIKIT29	Viki
HMI	

## Unionpedal med vægtsklods og Velcro



### Venstre

Vare nr	Passer til
VT28	Viktor
VJT28	Viktoria
VIKT28	Vik
VIKIT28	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Justerbar rem med Velcro over vríst. Foden fastholdes, så den ikke skrider fremad eller til siden.

### Højre

Vare nr	Passer til
VT27	Viktor
VJT27	Viktoria
VIKT27	Vik
VIKIT27	Viki
HMI	

### Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

**OBS:** Vær opmærksom på, at venstre pedal har linksgjvind.

## Unionpedal med Velcro og indvendig side-støtte



### Venstre

Vare nr	Passer til
VT32	Viktor
VJT32	Viktoria
VIKT32	Vik
VIKIT32	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Justerbar vristrem med Velcro. Sidestøtten sikrer, at foden ikke roterer indad mod pedalarmen.

### Højre

Vare nr	Passer til
VT31	Viktor
VJT31	Viktoria
VIKT31	Vik
VIKIT31	Viki
HMI	

### Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle

**OBS:** Vær opmærksom på, at venstre pedal har venstre gjvind.

## Fodplade metal model JI



Vare nr	Passer til
VR215	Viktor
VR215	Viktoria
HMI	

### Beskrivelse:

Leveres stykvis. Er som standard forsynet med vægtsklods, der sikrer, at fodpladen altid står vandret. Bred justerbar vristrem med Velcro. Passer til skostørrelse 40-47.

### Montering:

De 4 medfølgende skruer løsnes. Fodpladen skubbes ind over pedalen. Spænd de 4 skruer igen.

## Fodplade plast



Vare nr	Passer til
RT28	Viktor
RT28	Viktoria
RT28/LT27*	Vik
LT27/JT26*	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Leveres sætvis. Justerbar vristrem og ankelrem med Velcro.

### Montering:

Monteres på standard pedal. Plastrmellemstykket lægges under fodpladen. Monteres på pedalen med forreste skrue imellem pedalen, og bageste skrue bag ved og uden for pedalen. Metalslutstykket monteres under pedalen. Spænd møtrikkerne.

\*)

RT28 = skostørrelse 37-42  
LT27 = skostørrelse 31-36  
JT26 = skostørrelse 24-30

## Vægtklods



Vare nr	Passer til
RT29	Viktor
RT29	Viktor
LT29	Vik
JT29	Viki
HMI	

### Beskrivelse:


Leveres sætvis.  
Vægtklodsens sikrer, at pedalen altid står vandret.

### Montering:

Fladjernet, der følger med fodpladen, erstattes af vægtklodsens.  
Fastgøres med skruer og møtrikker fra det overskydende fladjern.  
Før fastspænding justeres vægtklodsens indtil fodpladen står vandret.

## Pedaler diverse

### Pedaladapter

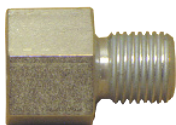

#### Venstre

Vare nr	Passer til
VR-331-02	Passer til pedaler med 1/2" gevind
HMI	

### Beskrivelse:

Anvendes til montering af JI specialpedaler på andre cykler/motionscykler.


### Montering:

Fastgør adapteren til pedalen.  
Adapteren fastgøres på pedalarmen.  
**OBS:** Pedaladapter til venstre pedal har linksgevind.

#### Højre

Vare nr	Passer til
VR331	Passer til pedaler med 1/2" gevind
HMI	

### Pedalforlænger

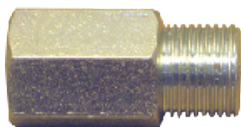

#### Venstre

Vare nr	Passer til
VR-329-2	Viktor
VR-329-2	Viktor
VR-329-2	Vik
VR-329-2	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Anvendes til at flytte pedalen 2 cm ud fra pedalarmen for bedre plads til foden.

### Montering:

Afmonter pedalen.  
Fastgør forlængerstykket til pedalen.  
Pedalforlængerens fastgøres på pedalarmen.  
**OBS:** Pedalforlænger til venstre pedal har linksgevind.

#### Højre

Vare nr	Passer til
VR-329	Viktor
VR-329	Viktor
VR-329	Vik
VR-329	Viki
HMI	



## Pedalarm kort



### Venstre

Vare nr	Passer til
VT60	Viktor (140 mm)
VJT60	Viktoria (115 mm)
VIKT60	Vik (90 mm)
HMI	

### Beskrivelse:

Anvendes af brugere med nedsat bevægelighed i knæene. Formindsker bevægelse i knæ og hofter.

### Montering:

Fjern krankbolten på de originale pedalarme og afmonter kæden. Aftrækerværktøj benyttes.

De nye pedalarme monteres og spændes med krankbolten. Påmonter kæden igen.

**OBS:** Skal monteres af fagpersonale, da specialværktøj skal anvendes.

### Højre

Vare nr	Passer til
VT59	Viktor (140 mm)
VJT59	Viktoria (115mm)
VIKT59	Vik (90 mm)
HMI	

## Pedalarm med knæled



### Venstre

Vare nr	Passer til
VT62	Viktor
VJT62	Viktoria
VIKT62	Vik
HMI	

### Beskrivelse:

Anvendes af brugere der har meget ringe eller ingen bevægelse i knæ og/eller hoftelæd.

### Montering:

Afmonter pedalarmen ved at skruer krankbolten ud, derefter bruges aftrækker. Længden kan justeres ved at løsne for holderen med umbraconøgle. Pedalarmen monteres og spændes med krankbolten. Pedalen kan monteres i 3 forskellige positioner.

**OBS:** Skal monteres af fagpersonale, da specialværktøj skal anvendes.

## Pedalarm med knæled



### Højre

Vare nr	Passer til
VT61	Viktor
VJT61	Viktoria
VIKT61	Vik
HMI	

### Beskrivelse:

Anvendes af brugere der har meget ringe eller ingen bevægelse i knæ og/eller hoftelæd.

### Montering:

Afmonter pedalarmen ved at skruer krankbolten ud, derefter bruges aftrækker. Længden kan justeres ved at løsne for holderen med umbraconøgle. Pedalarmen monteres og spændes med krankbolten. Pedalen kan monteres i 3 forskellige positioner.

**OBS:** Skal monteres af fagpersonale, da specialværktøj skal anvendes.

## Støtte til stift ben eller protese



### Venstre

Vare nr	Passer til
VT64	Viktor
VJT64	Viktoria
VIKT64	Vik
HMI	

### Beskrivelse:

Cyklen trædes med ét ben. En tilbagetræksfjeder hjælper pedalen rundt.

### Montering:

Monteres af fagpersonale.

### Højre

Vare nr	Passer til
VT63	Viktor
VJT63	Viktoria
VIKT63	Vik
HMI	

# Sadler

For at forbedre oplevelsen og komforten ved cykelturen er det vigtigt at vælge en sadel, der ergonomisk passer bedst til brugerens sæde.

## Standard sadel



Vare nr	Passer til
VL-700	Viktor
VJL-700	Viktoria
VIK-L-14	Vik
VIKI-L-14	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Sadel i god kvalitet med fin siddekomfort.

### Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

## Luft sadel



Vare nr	Passer til
VT52	Viktor
VJT52	Viktoria
VIK52	Vik
VIKIT52	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Sadlen er luftfyldt. Det justerbare tryk aflaster ryggen ved cykling. Anvendes af brugere med dårlig ryg og af brugere, der ønsker ekstra siddekomfort.

### Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel. Trykket i sadlen justeres igennem ventilen under sadlen. Almindelig cykelpumpe anvendes til at pumpe luft i sadlen.

## Oval sadel



Vare nr	Passer til
VT49	Viktor
VJT49	Viktoria
VIKT49	Vik
VIKIT49	Viki
HMI	47860

### Beskrivelse:

For anderledes trykafledning af bagdelen. Den ovale form giver ingen gener i skridtet.

### Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

## Damesadel



Vare nr	Passer til
VT57	Viktor
VJT57	Viktoria
VIKT57	Vik
VIKIT57	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

I modsætning til almindelige sadler er sadelspidsen ganske kort, hvilket forhindrer gener i skridtet.

### Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

## Bred gelsadel



Vare nr	Passer til
VT53	Viktor
VJT53	Viktoria
VIKT53	Vik
VIKIT53	Viki
HMI	47863

### Beskrivelse:

Den ekstra brede gelfyldte sadel giver brugeren behagelig siddekomfort og god understøttelse.

### Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

## Unisadel



Vare nr	Passer til
10857	Viktor
10857	Viktoria
10857	Vik
10851	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Smal og lang bananformet sadel. Den specielle form sikrer, at brugeren ikke rutsjer bagud. Forkantens skridtkile sørger for, at lårene holdes adskilt. Ingen generende syninger.

### Montering:

BN beslaget monteres på unisadlen med de 4 møtrikker under sadlen. Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

### Note:

Beslag bestilles separat. Varenummer VT33

## Unisadel med beslag



Vare nr	Passer til
VT54	Viktor
VJT54	Viktoria
VIKT54	Vik
VIKIT54	Viki
HMI	

### Beskrivelse:

Smal og lang bananformet sadel. Den specielle form sikrer, at brugeren ikke rutsjer bagud. Forkantens skridtkile sørger for, at lårene holdes adskilt. Ingen generende syninger.

### Montering:

Bruges i forbindelse med vinkelsadelpind. De vandrette rør sættes ind i vinkelsadelpinden. Nu kan sadlen justeres frem og tilbage.

### Note:

Vinkelsadelpind bestilles separat.

## V-serie

### Kropsstøtte med beslag



Vare nr	Passer til
VT20	Viktor
VJT20	Viktoria
VKT20	Vik
VKIT20	Viki
HMI	47841

#### Beskrivelse:

Anvendes af brugere med balanceproblemer i overkroppen. Den justerbare rem med klikspænde fastholder brugeren i en komfortabel kørestilling.

#### Montering:

Monteres i vinkelpinden. Den modsatte ende af vinkelpinden sættes ind i vinkelsadelpinden (bestilles separat). Kropsstøtten kan nu justeres frem og tilbage samt op og ned.

### Sadelpind vinkel til kropsstøttebeslag



Vare nr	Passer til
VT14	Viktor
VJT14	Viktoria
VKT14	Vik
VKIT14	Viki
HMI	47837

#### Beskrivelse:

Anvendes i forbindelse med kombination af kropsstøtte og/eller unisadel/multisadel.

#### Montering:

Afmonter den originale sadelpind ved at løsne for sadelclamps, derefter monteres den nye sadelpind. Sædet kan nu justeres frem og tilbage.

# Kurve og tasker

Tilbehørsprogrammet omfatter forskellige kurve og tasker til montering foran eller bag på cyklen..

## Kurv front



Vare nr	Passer til
VT03	Viktor
VJT03	Viktoria
VIKT03	Vik
VIKIT03	Viki
HMI	47785


### Beskrivelse:

Metaltrådkurv til montering foran styret. Brugeren har overblik over indholdet, hvilket giver sikkerhed og tryghed.

### Montering:

Frontkurven monteres ved at spænde de 2 medleverede rørbærringsbeslag omkring styrstamme og fladjernsbeslaget på inder-siden af kurven.

## Kurv bag

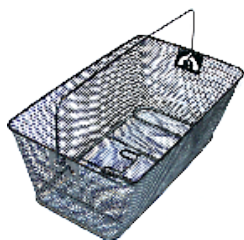

Vare nr	Passer til
VT05	Viktor
VJT05	Viktoria
VIKT05	Vik
HMI	47825

### Beskrivelse:

Metaltrådkurv til montering på bagagebæreren. Hvis brugeren ønsker det, kan kurven fastmonteres med medfølgende strips.

### Montering:

Kurven monteres på bagagebæreren.

## Cykeltaske



Vare nr	Passer til
VT10	Viktor
VJT10	Viktoria
VIKT10	Vik
HMI	47832

### Beskrivelse:

To store tasker med 4 rum i hver. Hver taske rummer ca. 28 liter. Fordelagtige, hvis brugeren har svært ved at løfte varer højt. Lynlåse sikrer indholdet.

### Montering:

Taskerne lægges ind over bagagebæreren, og stropperne spændes fast omkring denne. På taskens inderside findes der stropper til fastgøring på bagagebærerens ben.

## Bagageboks



Vare nr	Passer til
VT87	Viktor
VJT87	Viktoria
HMI	47880

**Beskrivelse:**

Til montering på bagagebærer.

Stødsikkert hårdt plastmateriale.

Aflåseligt låg.

**Montering:**

Fastgøres på bagagebæreren med medfølgende beslag.

Til V-serien fås mange dele, som forbedrer oplevelsen, når brugeren er ude og cykle.

## Cykellygte - diodelys



Vare nr	Passer til
VT12	Viktor
VJT12	Viktoria
VIKT12	Vik
VIKIT12	Viki
HMI	47790

### Beskrivelse:

Lygtesæt med diodelys i forlygte og baglygte. Forlygten kan afmonteres og bruges som lommelygte. Baglygten monteres på bagagebæreren

### Montering:

Forlygtens beslag klemmes rundt om styret og lygten sidder fast. Ved afmontering løsnes beslaget og lygten kan tages med. Den fabriksmonterede refleks afmonteres, og baglygten monteres på bagagebæreren.

## Cykellås med nøgle



Vare nr	Passer til
VT69	Viktor
VJT69	Viktoria
VIKT69	Vik
HMI	47879

### Beskrivelse:

Forsikringsgodkendt nøgellås. Leveres med reservenøgle. Standardmonteret på Viktor og Viktoria modellerne. Kan bruges på Vik.

### Montering:

Afmonter de to 5 mm låsemøtrikker og monter den nye lås i beslaget på cyklen..

## Lav gearing 26 tand



Vare nr	Passer til
VT18	Viktor
VJT18	Viktoria
VIKT18	Vik
VIKIT18	Viki
HMI	47839

### Beskrivelse:

Fordelagtig til brugere med ringe muskelkraft eller færdsel i bakket terræn.

### Montering:

Skal monteres af fagpersonale.

## Høj gearing 18 tand



Vare nr	Passer til
VT19	Viktor
VJT19	Viktoria
VKT19	Vik
VKIT19	Viki
HMI	47840

### Beskrivelse:

Til brugere, der ønsker højere fart.

### Montering:

Udskiftes af fagpersonale

## Cykelcomputer



Vare nr	Passer til
VT13	Viktor
VJT13	Viktoria
VKT13	Vik
VKIT13	Viki
HMI	47834

### Beskrivelse:

Cykelcomputer med kilometertæller. Brugsanvisning medfølger. God til at brugeren kan holde styr på den daglige træning.

### Montering:

Ifølge brugsanvisningen.

## Spejl



Vare nr	Passer til
VT09	Viktor
VJT09	Viktoria
VKT09	Vik
VKIT09	Viki
HMI	47831

### Beskrivelse:

Til montering på styrets venstre og/eller højre side. Fordelagtig især til brugere, der har svært ved at dreje hovedet langt nok til at kunne orientere sig bagud.

### Montering:

Monteres på cyklens venstre og/eller højre side, så langt ude mod styrhåndtaget som muligt.

## Trinplade



Vare nr	Passer til
VT40	Viktor
VJT40	Viktoria
VKT40	Vik
HMI	47851

### Beskrivelse:

Den skridsikre trinplade monteres på cykelstellet, hvilket letter af- og påstigning.

### Montering:

Rørbæring spændes omkring hovedstellet, så det sidder 5-10 cm foran kædeskærmsrørene.





## Stokkeholder



Vare nr	Passer til
VT06	Viktor
VJT06	Viktoria
VIKT06	Vik
HMI	47826

### Beskrivelse:

Stokkeholderen giver brugeren mulighed for at medbringe stok/stokke. Den smarte kliklås holder stokken fast og sikkert under transporten. Hvis brugeren anvender to stokke, monteres en stokkeholder på hver side af baghjulet.

### Montering:

Stokkeholderen kan monteres på højre og venstre side af baghjulet. Nederste del af stokkeholderen monteres i baghjulsbeslaget med medfølgende skrue. Øverste del fastspændes til bagagebæreren med medfølgende strip.

## Bakgear



### 3-gears model

Vare nr	Passer til
VL-617	Viktor
VJL-617	Viktoria
VIKT15	Vik
HMI	

### Beskrivelse:

Til brugere, der har svært ved at komme på og af cyklen. Baggearet gør det muligt at anbringe cyklen, hvor det er mest fordelagtigt for brugeren.

### Montering:

Skal monteres af fagpersonale.

### 7-gears model

Vare nr	Passer til
VL-616	Viktor
VJL-616	Viktoria
VIKT15-01	Vik
HMI	

## Rollatorstativ



Vare nr	Passer til
VT90	Viktor
VJT90	Viktoria
HMI	

### Beskrivelse:

Rollatorstativet monteres foran på cyklen, hvor det er nemt at håndtere det. Stativet kan justeres, så det passer til alle rollatormodeller.

### Montering:

Rørbærringsbeslagene monteres omkring forbroen. Den medfølgende strop monteres omkring styrstammen. Juster beslagene så de passer til rollatoren.

## Overtræksgarage



Vare nr	Passer til
VT07	Viktor
VJT07	Viktoria
HMI	47827

### Beskrivelse:

Til opbevaring af cyklen, hvor det ikke er muligt at parkere den i skur eller garage..

### Montering:

Læg forsigtigt overtrækket ind fra forenden af cyklen, træk derefter overtrækket ned over hele cyklen. I bunden er der en elastisksnor, der kan trækkes stramt.

Vare nr	Passer til
VIKT07	Vik
VIKIT07	Viki
HMI	31109

## V-serie

### Skubbestang inkl. bundrør



Vare nr	Passer til
VT21	Viktor
VJT21	Viktoria
VKT21	Vik
VKIT21	Viki
HMI	47842

#### Beskrivelse:

Giver hjælperen mulighed for at skubbe samt støtte cyklistens balance.

#### Montering:

##### Viki og Vik:

På stellet er monteret et bundrør på venstre side ved baghjulet. Skubbestangen monteres heri.

##### Viktor og Viktoria:

Det medsendte bundrør monteres på stellet til venstre for baghjulet. Brug de medsendte rørbærringsbeslag.

#### Note:

Anvendes bedst sammen med lav gearing.

### Hydraulisk bremse



#### Forhjul

Vare nr	Passer til
VR192	Viktor
VR192	Viktoria
VR192	Vik
HMI	

#### Beskrivelse:

Til brugere med ringe muskelkraft i fingrene. Sikrer optimal bremseeffekt uden at overbelaste fingre, hænder og håndled.


#### Montering:

Skal monteres af fagpersonale.

#### Baghjul

Vare nr	Passer til
VR300	Viktor
VR300	Viktoria
VR300	Vik
HMI	

### Motorfjeder til Yamaha motor

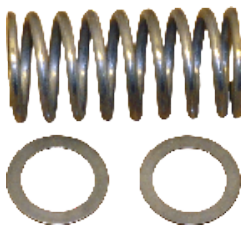

Vare nr	Passer til
VP-L-980	Viktor Power
VJP-L-980	Viktoria Power
HMI	

#### Beskrivelse:

Motorfjederen øger motorens moment. Som standard yder motoren ca. 50% af den kraft, cyklisten træder med på pedalen. Ved at udskifte motorfjederen ændres motordelen til 80%. Brugeren skal være opmærksom på, at motoren bruger mere strøm, og at batteriets brugstid (og dermed cyklet distance) bliver kortere.

#### Montering:

Skal monteres af fagpersonale.

## Batteri - gl. model til Yamaha



Vare nr	Passer til
VP-L-2114	Viktor Power
VJP-L-2114	Viktoria Power
HMI	

### Beskrivelse:

Brugere, der kører lange distancer, kan medbringe et ekstra opladet batteri. Dette batteri kan kun bruges på cykler med Yamaha motor.

### Montering:

Det brugte batteri fjernes fra batteriholderen, hvorefter det fuldt opladede batteri placeres heri.

## Ladeapparat til Yamaha batteri



Vare nr	Passer til
VP-L-2176-01	Viktor Power
VJP-L-2176-01	Viktoria Power
HMI	

### Beskrivelse:

Ladeapparat til opladning af Yamaha batteri.

### Montering:

Sæt ladeapparatets stik i stikkontakten, tænd for stikkontakten og derefter sæt batteriet til opladning.

## Batteri - MPF



Vare nr	Passer til
MPF-L-155	Viktor Power
MPF-L-155	Viktoria Power
HMI	

### Beskrivelse:

Brugere, der kører lange distancer, kan medbringe et ekstra opladet batteri.

### Montering:

Det brugte batteri fjernes fra batteriholderen, hvorefter det fuldt opladede batteri placeres heri.

## Ladeapparat til MPF batteri



Vare nr	Passer til
MPF-L-150-1	Viktor Power
MPF-L-150-1	Viktoria Power
HMI	

### Beskrivelse:

Ladeapparat til opladning af MPF batteri.

### Montering:

Sæt ladeapparatets stik i stikkontakten, tænd for stikkontakten og derefter sæt batteriet til opladning.

# J-L-R serie

J-L-R serien består af følgende modeller:

Jørn

Line

Rasmus

## Styr

Til Jørn—Line—Rasmus serien findes der forskellige slags styr og håndtag. Det er vigtigt, at der vælges det rigtige styr, så ens behov er bedst muligt dækket. Der findes f.eks. 2-delt styr, hvor der kan gribes fat forskellige steder, i stedet for på det traditionelle styr.

### Standard styr til Jørn



Vare nr	Passer til
JT02	Jørn
HMI	

#### Beskrivelse:

Styret kan drejes i forskellige vinkler, hvis det er monteret i en indstillelig frempind, Afstanden til styret ændres ved at vinkle frempinden op eller ned, for optimal komfort.

#### Montering:

Afmonter det gamle styr på de 2 umbraco skruer på frempinden. Styret monteres med samme skruer. Styret justeres op eller ned før det spændes på skruerne. Ved indstillelig frempind løsnes umbracoskruen *under* frempinden og frempindens vinkel ændres. Stram umbracoskruerne igen.

### Standard styr til Line og Rasmus



Vare nr	Passer til
LT02	Line
RT02	Rasmus
HMI	

#### Beskrivelse:

Styret kan drejes i forskellige vinkler, hvis det er monteret i en indstillelig frempind, Afstanden til styret ændres ved at vinkle frempinden op eller ned, for optimal komfort.

#### Montering:

Afmonter det gamle styr på de 2 umbraco skruer på frempinden. Styret monteres med samme skruer. Styret justeres op eller ned før det spændes på skruerne. Ved indstillelig frempind løsnes umbracoskruen *under* frempinden og frempindens vinkel ændres. Stram umbracoskruerne igen.

## 2-delt styr



Vare nr	Passer til
JT03	Jørn
LT03	Line
RT	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Vælges hvis brugeren har brug for at få styret tæt ind på kroppen, eller kun har lidt bevægelse i armene. Man kan holde hånden mange steder på styret. Det 2-delte styr er ideelt til brugere, der også har monteret kroppsstøtte på cyklen.

### Montering:

Det 2-delte styr monteres i styrstammen, ved at løsne for beslag og hurtigspænderen på styret, hvorefter styret justeres op, ned, frem og tilbage.

## Ledsagerhåndtag



Vare nr	Passer til
JT40	Jørn
LT40	Line
RT40	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Anvendes hvis brugeren ikke selv kan eller må styre cyklen. Hjælperen bruger ledsagerhåndtaget til at hjælpe med at styre og trække cyklen. Fordelen ved at bruge ledsagerhåndtag er, at der bevares god kontakt mellem bruger og hjælper, da man er tæt på hinanden.

### Montering:

Nederste u-bøjle af styret udskiftes med den nye. Derefter monteres ledsagerhåndtaget i enden af den nye u-bøjle. Ledsagerhåndtaget indstilles i den ønskede højde ved at vippe håndtaget frem eller tilbage. Fastspændes med de medfølgende styrclamps

## Ledsagerhåndtag til standard styr



Vare nr	Passer til
JT41	Jørn
LT41	Line
T41	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Anvendes hvis brugeren ikke selv kan eller må styre cyklen. Hjælperen bruger ledsagerhåndtaget til at hjælpe med at styre og trække cyklen. Fordelen ved at bruge ledsagerhåndtag er, at der bevares god kontakt mellem bruger og hjælper, da man er tæt på hinanden.

### Montering:

Den ene del af rørbæringsbeslaget monteres omkring frempinden på cykelstyret. Derefter indstilles ledsagerhåndtaget i den ønskede højde ved at vippe håndtaget frem eller tilbage. De 4 umbracoskrues spændes.

## Skubbestang højdeindstillelig



Vare nr	Passer til
JT01	Jørn
LTO1	Line
RTO1	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Skubbestangen giver hjælperen mulighed for at skubbe samt støtte cyklistens balance. Skubbestangen kan indstilles i højden.

### Montering:

Monteres i rør bag på cyklen. Spændes med fingerskruerne.

# Pedaler

Der findes flere forskellige pedaler til Jørn-Line-Rasmus cyklerne.

Valget af pedaler er utrolig vigtigt for at gøre brugeren så selvhjulpent som muligt. Der kan bl.a. fås pedaler med velcro over vristen, så foden ikke hopper af pedalen så nemt, som den kan ved de almindelige.

**Specialtilpassede pedaler fremstilles efter brugerens ønske og behov.**

Alle unionpedaler er forsynet med vægtsklods, så pedalen altid står vandret.

## Unionpedal med vægtsklods



### Venstre

Vare nr	Passer til
JT60	Jørn
LT60	Line
RT60	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Hård plastrem over vrist. Stigbøjlefunktionen sikrer, at foden fastholdes, så den ikke skrider fremad eller til siden.

### Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

**OBS:** Vær opmærksom på at venstre pedal har linksgevind.

### Højre

Vare nr	Passer til
JT59	Jørn
LT59	Line
RT59	Rasmus
HMI	

## Unionpedal med vægtsklods og Velcro



### Venstre

Vare nr	Passer til
JT58	Jørn
LT58	Line
RT58	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Justerbar rem med Velcro over vrist. Foden fastholdes, så den ikke skrider fremad eller til siden.

### Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

**OBS:** Vær opmærksom på at venstre pedal har linksgevind.

### Højre

Vare nr	Passer til
JT57	Jørn
LT57	Line
RT57	Rasmus
HMI	

## Unionpedal med Velcro og indvendig side-støtte



### Venstre

Vare nr	Passer til
JT52	Jørn
LT52	Line
RT52	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Justerbar vristrem med Velcro. Sidestøtten sikrer, at foden ikke roterer indad mod pedalarmen.

### Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

**OBS:** Vær opmærksom på at venstre pedal har linksgevind.

### Højre

Vare nr	Passer til
JT51	Jørn
LT51	Line
RT51	Rasmus
HMI	

## Fodplade med Velcro



Vare nr	Passer til
JT26	Jørn
LT27	Line
RT28	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Barnet kan bedre holde fødderne fast på pedalerne, da der er velcro og støtte omkring foden.

### Montering:

Monteres på standard pedal eller på fiberklodsen. Plastmellestykket lægges under fodpladen. Monteres på pedalen med forreste skrue imellem pedalen, og bageste skrue bag ved og uden for pedalen. Metaslutstykket monteres under pedalen.

Ved dobbeltkrank anvendes de to huller i fiberklodsen.

\*J

RT28 = skostørrelse 37-42

LT27 = skostørrelse 31-36

JT26 = skostørrelse 24-36

## Vægtklods



Vare nr	Passer til
JT29	Jørn
LT29	Line
RT29	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Leveres sætvis. Vægtklodsen sikrer, at pedalen altid står vandret.

### Montering:

Fladjernet, der følger med fodpladen erstattes af vægtklodsen.

Fastgøres med skruer og møtrikker fra det overskydende fladjern.

Før fastspænding justeres vægtklodsen indtil fodpladen står vandret.

For at forbedre din oplevelse når du cykler har vi flere forskellige sadler til din cykel. Vi har derfor sadler til alle behov.

## Almindelig sadel



Vare nr	Passer til
JT04	Jørn
LT04	Line
RT04	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Sadel i god kvalitet med fin siddekomfort.

### Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

## Unisadel med beslag til kropsstøtte



Vare nr	Passer til
JT06	Jørn
LT06	Line
RT06	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Smal og lang bananformet sadel. Den specielle form sikrer, at brugeren ikke rutsjer bagud. Forkantens skridtkile sørger for, at lårene holdes adskilt. Ingen generende syninger.

### Montering:

Bruges i forbindelse med vinkelsadelpind. De vandrette rør sættes ind i vinkelsadelpinden. Nu kan sadlen justeres frem og tilbage.

### Note:

Vinkelsadelpind bestilles separat.



# Sadelpinde

Til alle cykler kan fås andre sadelpinde end standarden. Sadelpinde vælges efter behov og er nemme at udskifte.

## Sadelpind lige



Vare nr	Passer til
JT12	Jørn
LT12	Line
RT12	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Anvendes til almindelig sadel.

### Montering:

Firkantet sadelpind sættes i røret på cyklen, og derefter kan almindelig sadel monteres på den runde del af pinden.

## Sadelpind lige + 10 cm



Vare nr	Passer til
JT13	Jørn
LT13	Line
RT13	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Anvendes til almindelig sadel, hvor der er behov for større skridtlængde.

### Montering:

Firkantet sadelpind sættes i røret på cyklen, og derefter kan almindelig sadel monteres på den runde del af pinden.

## J-L-R-serie **Sadelpind vinkel**



Vare nr	Passer til
JT14	Jørn
LT14	Line
RT14	Rasmus
HMI	

### **Beskrivelse:**

Anvendes sammen med unisadel. Sadlen kan justeres frem og tilbage for bedre tråd.

### **Montering:**

Den lange ende monteres i røret på cyklen, og derefter kan unisadel eller multisadel (med beslag) monteres indvendig i vandret firkantør.

## **Sadelpind vinkel + 10 cm**



Vare nr	Passer til
JT15	Jørn
LT15	Line
RT15	Rasmus
HMI	

### **Beskrivelse:**

Anvendes sammen med unisadel, hvor der er brug for større skridtlængde. Sadlen kan justeres frem og tilbage for bedre tråd.

### **Montering:**

Den lange ende monteres i røret på cyklen, og derefter kan unisadel eller multisadel (med beslag) monteres indvendig i vandret firkantør.

## **Beslag til kropstøtte nederst**



Vare nr	Passer til
JT18	Jørn
LT18	Line
RT18	Rasmus
HMI	

### **Beskrivelse:**

Anvendes til alm. sadel i forbindelse med kombination af kropstøtte

### **Montering:**

Sadelpinden monteres lodret ned igennem kropstøttebeslaget, og derefter kan kropstøtten monteres på enden af beslaget. De medfølgende fingerskruer spændes godt.

**\*)**

Til jørn cyklen er beslaget mindre, men monteres på samme måde.

# Kropsstøtter

Der findes flere forskellige former for kropsstøtter til J-L-R serien. Kropsstøtter bruges hvis barnet har svært ved at holde sig selv oprejst under cykelturen, eller hvis det har svært ved at holde balancen.

## Kropsstøtte med beslag



Vare nr	Passer til
JT20	Jørn
LT20	Line
RT20	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Anvendes af brugere med balanceproblemer i overkroppen. Den justerbare rem med klikspænde fastholder brugeren i en komfortabel kørestilling.

### Montering:

Monteres i modsatte vinkelpind. Modsatte ende af vinkelpinden sættes ind i det vandrette firkant-rør under sadlen. De medfølgende fingerskruer spændes godt.

## Kropsstøtte, høj med beslag



Vare nr	Passer til
JT21	Jørn
LT21	Line
RT21	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Den høje ryg giver ekstra støtte til brugere med balanceproblemer i overkroppen. Det brede Velcrobånd fastholder brugeren i en komfortabel kørestilling.

### Montering:

Monteres i modsatte vinkelpind. Modsatte ende af vinkelpinden sættes ind i det vandrette firkant-rør under sadlen. De medfølgende fingerskruer spændes godt.

## Kropsstøtte med vest og beslag



Vare nr	Passer til
JT22	Jørn
LT22	Line
RT22	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Bruges til børn med balanceproblemer, hvor de fx. falder forover. Vesten sikrer en komfortabel og oprejst kørestilling.

### Montering:

Monteres i modsatte vinkelpind. Modsatte ende af vinkelpinden sættes ind i det vandrette firkant-rør under sadlen. De medfølgende fingerskruer spændes godt.

## Vest til kropsstøtte



Vare nr	Passer til
JT23	Jørn
LT23	Line
RT23	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Forhindrer at barnet hænger forover på cyklen. Bruges kun i forbindelse med høj ryg.

### Montering:

Hæftes med Velcro bag på den høje ryg. Vær opmærksom på at stropperne ikke nager på halsen.

## Brystbånd til kropsstøtte



Vare nr	Passer til
JT24	Jørn
LT24	Line
RT24	Rasmus
HMI	

### Beskrivelse:

Forhindrer at barnet hænger forover på cyklen. Bruges kun i forbindelse med høj ryg.

### Montering:

Brystbåndet slås omkring høj ryg, og hæftes ved hjælp af velcro.



# Modeloversigt V-Serie



	<b>Viktor / Viktor Power</b>	<b>Viktoria / Viktoria Power</b>	<b>Vik / Vik Power</b>	<b>Viki</b>
Indstigningshøjde	16 cm / 18 cm*	18 cm	12,5 cm	12 cm
Styrhøjde	105-123 cm	95-113 cm	80-98 cm	60-78 cm
Skridtlængde	76-96 cm	63-76 cm	50-65 cm	35-50 cm
Længde x bredde	173 x 86 cm	150 x 78 cm	125 x 73 cm	100 x 60 cm
Vægt	25 kg / 40 kg*	25 kg / 40 kg*	20 kg	15 kg
Gear	3 el. 7 / 7*	3 el. 7 / 7*	0, 3 el. 7	0, 3 el. 7
Bremser forhjul	Tromlebremse	Tromlebremse	Tromlebremse	Tromlebremse
Bremser baghjul	Navbremse	Navbremse	Fodbremse el. fast nav	Fodbremse el. fast nav
Farver	Kongeblå, cremehvid el. rossorød	Grøn, pink el. kongeblå	Pink, el. sort med nister	Gul el. creme-hvid
Specielt for model- len	Specialtilpasninger efter opgave	Specialtilpasninger efter opgave	Specialtilpasninger efter opgave. Fast nav eller friløb med fodbremse	Specialtilpasninger efter opgave. Fast nav eller friløb med fodbremse

\*1) Angivelse gælder for Power modellen

# Modeloversigt J-L-R serie



	<b>Jørn</b>	<b>Line</b>	<b>Rasmus</b>
Styrhøjde	Justerbar	Justerbar	Justerbar
Skridtlængde	30-40 cm	40-55 cm	53-65 cm
Længde x bredde	77 x 50 cm	107 x 65 cm	125 x 75 cm
Vægt	14 kg	18 kg	22 kg
Gear			
Bremser forhjul		Fælgbremse	Fælgbremse
Bremser baghjul			
Farver	Grøn	Gul	Turkis
Specielt for modellen	Fast nav, enkel eller dobbelt pedalarm. Specialtilpasninger efter opgave	Fast nav eller friløb med fodbremse. Specialtilpasninger efter opgave	Fast nav eller friløb med fodbremse. Specialtilpasninger efter opgave



**Jørn Iversen Rødekro ApS**

Hydevadvej 48 • Hydevad • 6230 Rødekro  
Telefon +45 74 66 92 42 • iversen@ji.dk • www.ji.dk