

LAGNER TIL  
VENDLET®




OVERSKUD TIL OMSORG


  
VENDLET

# LAGNER TIL VENDLET

VENDLET-systemet består bl.a. af et glidelagen og et træklagen.

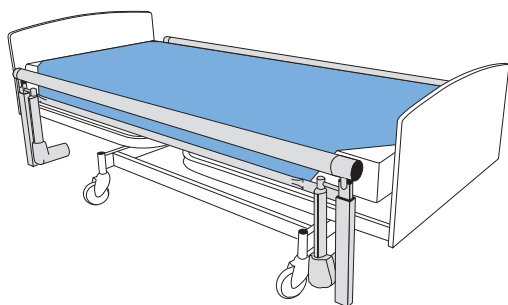


*Glidelagnet placeres direkte på sengens madras*

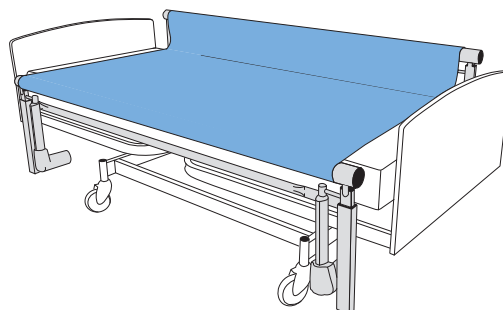

*Træklagnet fæstnes på VENDLET-systemets to motorruller*

Glidelagnet monteres direkte på sengens madras og sikrer, at træklagnet kan glide let og ubesværet hen over madrassen. Glidelagnet fæstnes med elastikker rundt om madrassens hjørner samt med velcro bændler rundt om madras rammen.

Træklagnet fæstnes med velcro på VENDLET-systemets to motorruller, som er placeret på hver side af sengen. Lagnet skal køre OVER motorrullerne.

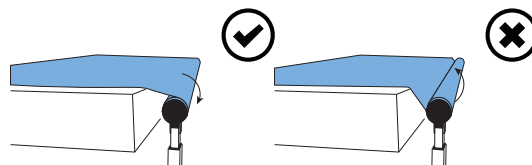

## LAGEN TYPER

Både glidelagnet og træklagnet kan fås som henholdsvis engangslagner og som lagner, der kan vaskes. Valg af lagentype afhænger af plejesituationen og den sengeliggendes behov.

## LAGEN STØRRELSER

De vaskbare glidelagner og træklagner fås i tre forskellige bredder. Engangslagnerne fås kun i én bredde, men kan til gengæld bruges til både almindelige madrasbredder samt lidt bredere madrasser.



## GLIDELAGEN - VASKBART

### PRODUKTINFO

Glidelagnet er fremstillet af 100% nylon. Lagnet har en meget høj slidstyrke. Overfladen er anti-bakteriel behandlet, anti-statisk behandlet og biokompatibel.

Der følger 1 stk. vaskbar standard glidelagen med ved køb af nyt VENDLET-system.

### VASKEANVISNING



Anbefalet vasketemperatur 60° C



Må ikke tørretumbles



Må ikke stryges

### MONTERING



Scan QR koden og se hvordan glidelagnet monteres.

QR koden er også påsyet lagnet.

Du kan også se instruktionsfilm på vores hjemmeside [vendlet.dk](http://vendlet.dk)

Bredde	Passer til madrassbredde	Varenr.	HMI-nr.	Pris ex. moms
95 cm (standard)	80-90 cm (standard)	3601001	71723	Kr. 671,-
115 cm	95-110 cm	3601003	71725	Kr. 684,-
135 cm	115-130 cm	3601002	71727	Kr. 700,-



## GLIDELAGEN - ENGANGS

### PRODUKTINFO

Engangsglidelagnet er fremstillet i 100% polyester. Overfladen er anti-bakteriel behandlet, anti-statisk behandlet og biokompatibel.

Engangslagnerne er velegnet i situationer, hvor lagnet ofte forurenes, eller hvor der er særlige hensyn til infektionsrisiko. Vi anbefaler, at engangsglidelagnet benyttes sammen med engangstræklagnet. Træklagen og glidelagen bør skiftes samtidig.

Ved køb af nyt VENDLET-system kan du vælge at få 10 stk. engangs glidelagner i stedet for det vaskbare standard glidelagen.

### VASKEANVISNING



Engangsglidelagnet tåler ikke vask.

### MONTERING



Scan QR koden og se hvordan glidelagnet monteres.

QR koden er også påsyet lagnet.

Du kan også se instruktionsfilm på vores hjemmeside [vendlet.dk](http://vendlet.dk)

Bredde	Passer til madrassbredde	Varenr.	HMI-nr.	Antal pr. pk.	Pris pr. 40 stk. ex. moms
115 cm	80-110 cm	3601004	83324	4 x 10 stk	Kr. 1.972,-



## TRÆKLAGEN - VASKBART

### PRODUKTINFO

Træklagnet er fremstillet af 100% ren bomuld. Lagnet er meget kraftigt og har en høj slidstyrke.

Midt gennem lagnet er der en rød syning, der markerer centrum på lagnet.

Der kan forekomme overfladiske smuds-pletter på bomulden, som i reglen udvaskes ved første vask. Disse smudspletter er ikke reklamationsberettiget.

Der følger 1 stk. vaskbar standard træklagen med ved køb af nyt VENDLET-system.

### VASKEANVISNING



Max. 95° C.  
Krymp ved vask maks. 4%.



Må kun tørretumbles ved normal temperatur for at sikre velcrobåndets fortsatte vedhæftning.  
Bør trækkes i facon 2-3 gange under tør-ring for at undgå, at træklagnet ændrer facon.



Kan stryges eller rulles ved middel temperatur maks. 150° C for at sikre velcrobåndets fortsatte vedhæftning.

### MONTERING



Scan QR koden og se hvordan træklagnet monteres.

QR koden er også påsyet lagnet.

Du kan også se instruktionsfilm på vores hjemmeside [vendlet.dk](http://vendlet.dk)

Bredde	Passer til madrassbredde	Varenr.	HMI-nr.	Pris ex. moms
350 cm (standard)	80-90 cm (standard)	2600000	71719	Kr. 920,-
400 cm	95-110 cm	2600006	71720	Kr. 976,-
450 cm	115-130 cm	2600005	71721	Kr. 1.010,-



## TRÆKLAGEN - ENGANGS

### PRODUKTINFO

Engangstræklaget er fremstillet i 100% nonwoven polypropylene. Lagnet er vandafvisende, åndbart og antibakterielt samt antistatisk behandlet.

Engangslagene er velegnet i situationer, hvor lagnet ofte forurenes, eller hvor der er særlige hensyn til infektionsrisiko. Vi anbefaler, at engangstræklaget benyttes sammen med engangsglidelaget. Træklagen og glidelagen bør skiftes samtidig.

Ved hoved- og fodende er der en rød syning, der markerer centrum på lagnet.

Ved køb af nyt VENDLET-system kan du vælge at få 10 stk. engangs træklagner i stede for det vaskbare standard træklagen.

### VASKEANVISNING



Engangstræklaget tåler ikke vask.

### MONTERING



Scan QR koden og se hvordan træklaget monteres.

QR koden er også påsyet lagnet.

Du kan også se instruktionsfilm på vores hjemmeside [vendlet.dk](http://vendlet.dk)

Bredde	Passer til madrasbredde	Varenr.	HMI-nr.	Antal pr. pk.	Pris pr. 30 stk. ex. moms
400 cm	80-110 cm	2600007	83323	3 x 10 stk	Kr. 1.479,-



## INKONTINENSLAGNET INKOLET

INKOLET er et engangs inkontinenslagen med meget stor dækningsflade og høj sugeevne.

INKOLET indeholder fluff pulp, der sikrer en god sugeevne og en hurtig spredning af væske. Derudover indeholder INKOLET superabsorber (SAP), der giver ekstra absorption og reducerer risikoen for lugtgener. Indholdet i lagnet er placeret i væskekanaler, der sikrer spredning af væske og mindsker risikoen for lækager.

Oversiden er lavet af et væske absorberende nonwoven materiale, der virker tør og blød mod huden. Overfladen er antibakteriel behandlet og biokompatibel.

Undersiden er beklædt med en vandtæt PE-film. INKOLET er forsejlet på alle 4 kanter. Forsejlingen sikrer stabile og stærke kanter samt sikrer, at PE-bagsiden ikke kommer i kontakt med huden.

Med INKOLET har du en meget stor dækningsflade med ét enkelt lagen. Du undgår derfor at bruge to eller flere inkontinensstykker for at opnå tilstrækkelig dækning. Dermed øger du komforten for patienten og nedsætter risikoen for udvikling af tryksår.

Den store størrelse gør INKOLET særdeles velegnet til at bruge sammen med en VENDLET, idet den kan nå ud over VENDLET-systemets motorruller.

### VASKEANVISNING



INKOLET tåler ikke vask.

Størrelse	Varenr.	HMI-nr.	Sugeevne (Rothwell-testet)	Antal pr. pk.	Pris pr. 40 stk. ex. moms
90x150 cm	3601100	83635	3000 ml	4 x 10 stk	Kr. 764,-



