

V-serie
JLR-serie



Tilbehør

Indhold

Hvad finder du i tilbehørskataloget

V-serie

Styr

Standard styr
Bøjlestyr
2-delt styr
Ledsagerhåndtag til 2-delt styr
Ledsagerhåndtag til standard styr
Vertikalt greb

Pedaler

Standard pedal
Skridsikker pedal
Unionpedal med vægtklods
Unionpedal med vægtklods og Velcro
Unionpedal med Velcro og indvendig sidestøtte
Fodplade metal model JI
Fodplade plast
Vægtklods

Pedaler diverse

Pedaladapter
Pedalforlænger
Pedalarm kort
Pedalarm med knæklede
Støtte til stift ben eller protese

Sadler

Standard sadel
Luft sadel
Oval sadel
Damesadel
Bred gelsadel
Unisadel
Unisadel med beslag
Multisadel
Multisadel med beslag
Kropsstøtte med beslag
Sadelpind vinkel til kropsstøttebeslag

Kurve og tasker

Kurv front
Kurv bag
Cykeltaske
Bagageboks

Diverse

Cykellygte - diodelys
Cykellås med nøgle
Lav gearing 26 tand
Høj gearing 18 tand
Cykelcomputer
Spejl
Trinplade
Stokkeholder
Bakgear
Rollatorstativ
Overtræksgarage

3 Skubbestang inkl. bundrør 18
Hydraulisk bremse 18
4 Batteri 18
4 Motorfjeder 18

J-L-R serie

20

Styr

20

5 Standard styr til Jørn 20
5 Standard styr til Line og Rasmus 20
5 2-delt styr 21
6 Ledsagerhåndtag 21
6 Ledsagerhåndtag til standard styr 21
6 Skubbestang højdeindstillelig 21

Pedaler

22

6 Unionpedal med vægtklods 22
7 Unionpedal med vægtklods og Velcro 22
7 Unionpedal med Velcro og indvendig sidestøtte 22
7 Fodplade med Velcro 23
8 Vægtklods 23

Sadler

24

8 Almindelig sadel 24
8 Unisadel med beslag til kropsstøtte 24
9 Multisadel uden beslag til kropsstøtte 24
9 Multisadel med beslag 25

Sadelpinde

25

10 Sadelpind lige 25
10 Sadelpind lige + 10 cm 25
10 Sadelpind vinkel 26
10 Sadelpind vinkel + 10 cm 26

Kropsstøtter

27

11 Kropsstøtte med beslag 27
11 Kropsstøtte, høj med beslag 27
11 Kropsstøtte med vest og beslag 27
12 Vest til kropsstøtte 28
12 Brystbånd til kropsstøtte 28

Modeloversigt V-Serie

30

Modeloversigt J-L-R serie

31

13

13

13

13

14

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

Hvad finder du i tilbehørskataloget

Nærværende tilbehørskatalog indeholder standard tilbehør til cykler fra Jørn Iversen ApS, til følgende modeller:

V-serie:

Viktor
Viktor Power
Viktoria
Viktoria Power
Vik
Viki

J-L-R-serie:

Jørn
Line
Rasmus

Sådan er tilbehørskataloget opbygget

Tilbehørskataloget er opdelt i sektioner, således at du finder tilbehør til V-serie først. Sidernes yderkanter er markeret med grøn kant. J-L-R seriens sidekanter er markeret med blå kant. Bagest i kataloget finder du en oversigt over de forskellige V-serie og J-L-R serie modeller.

Hver tilbehørsdel er beskrevet med en illustration, en kort beskrivelse og en monteringsvejledning. Nogle tilbehørsdele skal monteres af fagpersonale - det vil i langt de fleste tilfælde være på vores fabrik i Sønderjylland eller vores "rullende montør", der kommer over hele landet. Når denne slags tilbehør bestilles, vil vi kontakte dig og aftale det videre forløb.

Tilbehørskataloget er også på internettet

Tilbehørskataloget findes også på vores hjemmeside: www.ji.dk/Produkter/Tilbehoer_-_cykler

Hvordan man finder tilbehøret

Start i indholdsfortegnelsen på side 2, hvor alt tilbehør er angivet med sidenummer. Hvis du har brug for at se, hvordan tilbehøret ser ud, kan du selvfølgelig også bladre i kataloget og finde det, du har brug for.

Det er vigtigt at du ved, hvilken model, tilbehøret skal bruges til.

I beskrivelsen af tilbehøret finder du varenummeret på tilbehørsdelen. Dette varenummer skal bruges ved bestilling.

Hvordan man bestiller tilbehør

Tilbehør kan bestilles på følgende måder:

Telefon 74 66 92 42

Fax 74 66 92 94

E-mail iversen@ji.dk

Via internettet www.aktivliv.dk/shop/cykel-tilbehoer-2c1.html

HMI basen

Hvordan man bestiller tilbehør, der ikke findes i kataloget

Hvis en bruger har behov for tilbehør, som ikke findes i tilbehørskataloget, vil vi meget gerne hjælpe med at skaffe det hjem. Måske er brugeren i den situation, hvor tilbehøret slet ikke findes - også der hjælper vi med at finde en løsning, simpelt hen ved at lave tilbehøret.

Fejl i beskrivelser/illustrationer

Vi prøver at være så omhyggelige som muligt når vi laver beskrivelserne i tilbehørskataloget. Men vi er mennesker, og kan fejle. Det kan også være, at tilbehør udgår af vores sortiment, eller at der er kommet noget nyere og bedre siden tilbehørskataloget blev lavet, sådan at det tilbehør, der bestilles, kan se lidt anderledes ud end på illustrationerne. Der tages forbehold for sådanne fejl og produktændringer.

Udgået tilbehør

Det hænder, at tilbehør ikke længere er aktuelt, eller bliver erstattet af andet tilbehør, som opfylder behovet bedre. I disse tilfælde kan det forekomme, at det tilbehør, som er bestilt, vil vise sig at være lidt anderledes end det er beskrevet i dette tilbehørskatalog. Der tages forbehold for udgået tilbehør, men vi vil altid bestræbe os på at levere alternativt tilbehør, der kan erstatte det bestilte tilbehør.

V-serie

V-serien består af følgende modeller:

Viktor, Viktor Power
 Viktoria, Viktoria Power
 Vik
 Viki

Note

Hvor intet andet er angivet, passer tilbehøret til Viktor og Viktoria også til Viktor Power og Viktoria Power.

Styr

Til V-serien findes der forskellige slags styr og håndtag. Det er vigtigt at der vælges det rigtige styr, så brugerens behov er bedst muligt dækket. F.eks. er bøjlestyret velegnet, hvor der er behov for at kunne holde fat på forskellige steder, i stedet for på det traditionelle styr.

Alle cykler leveres med standard styr. Et andet styr kan eftermonteres uden brug af fagpersonale.

Standard styr



| Vare nr | Passer til |
|-----------|------------|
| VL-160 | Viktor |
| VJL-160 | Viktoria |
| VIK-L-36 | Vik |
| VIKI-L-36 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Styret kan drejes i forskellige vinkler, hvis det er monteret i en indstillelig frempind, Afstanden til styret ændres ved at vinkle frempinden op eller ned, for optimal komfort.

Montering:

Afmonter det gamle styr på de 2 umbraco skruer på frempinden. Styret monteres med samme skruer. Styret justeres op eller ned før det spændes på skrue. Ved indstillelig frempind løsnes umbracoskruen *under* frempinden og frempindens vinkel ændres. Stram umbracoskrue igen.

Bøjlestyr



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT01 | Viktor |
| VJT01 | Viktoria |
| VKT01 | Vik |
| HMI | 47822 |

Beskrivelse:

Bruges til personer med dårlig ryg, svage eller gigt-rante hænder, enhåndsbrugere. Styret er monteret med behageligt blødt mosgummi.

Montering:

Monteres som standard styr. Styret indstilles så brugeren holder fast med hånden omkring den forreste del af styret. Styret vinkles op, så det støtter underarmen. Sidestillingen ændres ved skiftevis at holde på den forreste eller bagerste del af styret.

2-delt styr



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VIKT16 | Vik |
| VIKIT16 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Vælges hvis cyklisten har brug for at få styret tæt ind på kroppen, eller kun har lidt bevægelse i armene. Man kan hvile hånden mange steder på styret.

Montering:

Det 2-delte styr monteres i frempinden ved at løsne for beslag og hurtigspænderen på styret, hvorefter styret justeres op, ned, frem og tilbage.

Ledsagerhåndtag til 2-delt styr



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VIKT17 | Vik |
| VIKIT17 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Anvendes hvis brugeren ikke selv kan eller må styre cyklen. Hjælperen bruger ledsagerhåndtaget til at hjælpe med at styre og trække cyklen. Fordelen ved at bruge ledsagerhåndtag er, at der bevarer god kontakt mellem bruger og hjælper, da man er tæt på hinanden.

Montering:

Nederste u-bøjle af styret udskiftes med den nye. Derefter monteres ledsagerhåndtaget i enden af den nye u-bøjle. Ledsagerhåndtaget indstilles i den ønskede højde ved at vippe håndtaget frem eller tilbage. Fastspændes med medfølgende styrclamps.

Ledsagerhåndtag til standard styr



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT41 | Viktor |
| VJT41 | Viktoria |
| VIKT41 | Vik |
| VIKIT41 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Anvendes hvis brugeren ikke selv kan eller må styre cyklen. Hjælperen bruger ledsagerhåndtaget til at hjælpe med at styre og trække cyklen. Fordelen ved at bruge ledsagerhåndtag er, at der bevarer god kontakt mellem bruger og hjælper, da man er tæt på hinanden.

Montering:

Den ene del af rørbæringsbeslaget monteres omkring frempinden på cykelstyret. Derefter indstilles ledsagerhåndtaget i den ønskede højde ved at vippe håndtaget frem eller tilbage. De 4 umbracoscruer spændes.

Vertikalt greb



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT48 | Viktor |
| VJT48 | Viktoria |
| VIKT48 | Vik |
| VIKIT48 | Viki |
| HMI | 47852 |

Beskrivelse:

Bruges for at få bedre greb flere steder på styret. Ideelt til brugere, hvis håndledsstilling gør, at det er nemmere at holde fast og dreje på styret hvis man holder fast lodret på styret. Derved undgås, at hånden mister grebet, når styret drejes.

Montering:

Monteres ved siden af de originale styrhåndtag. Justeres, så de står lodret op fra styret.

Pedaler

Der findes flere forskellige pedaler til Viktor-Viktoria-Vik- og Viki cyklerne. Valget af pedaler er utrolig vigtigt for at gøre brugeren så selvhjulpne som muligt. Der kan bl.a. fås pedaler med Velcro over pedalen, så foden ikke hopper af pedalen så nemt, som den kan ved de almindelige.

Specialtilpassede pedaler fremstilles efter brugerens ønske og behov.

Alle unionpedaler er forsynet med vægthklods, så pedalerne altid står vandret.

Standard pedal



Venstre

| Vare nr | Passer til |
|-----------|------------|
| VL-550 | Viktor |
| VJL-550 | Viktoria |
| VIK-L-04 | Vik |
| VIKI-L-04 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Skridsikker gummi på trædefladerne. Gule reflekser i siderne.

Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

OBS: Vær opmærksom på, at venstre pedal har linksgjvind.

Højre

| Vare nr | Passer til |
|-----------|------------|
| VL-540 | Viktor |
| VJL-540 | Viktoria |
| VIK-L-10 | Vik |
| VIKI-L-10 | Viki |
| HMI | |

Skridsikker pedal



Venstre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT26 | Viktor |
| VJT26 | Viktoria |
| VIKT26 | Vik |
| VIKIT26 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Bred trædeflade med skridsikre knopper.

Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

OBS: Vær opmærksom på, at venstre pedal har linksgjvind.

Højre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT25 | Viktor |
| VJT25 | Viktoria |
| VIKT25 | Vik |
| VIKIT25 | Viki |
| HMI | |

Unionpedal med vægthklods



Venstre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT30 | Viktor |
| VJT30 | Viktoria |
| VIKT30 | Vik |
| VIKIT30 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Hård plastrem over wrist. Stigbøjlefunktionen sikrer, at foden fastholdes, så den ikke skrider fremad eller til siden.

Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

OBS: Vær opmærksom på, at venstre pedal har linksgjvind.

Højre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT29 | Viktor |
| VJT29 | Viktoria |
| VIKT29 | Vik |
| VIKIT29 | Viki |
| HMI | |

Unionpedal med vægtsklods og Velcro



Venstre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT28 | Viktor |
| VJT28 | Viktoria |
| VIKT28 | Vik |
| VIKIT28 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Justerbar rem med Velcro over vrist. Foden fastholdes, så den ikke skrider fremad eller til siden.

Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

OBS: Vær opmærksom på, at venstre pedal har linksgjvind.

Højre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT27 | Viktor |
| VJT27 | Viktoria |
| VIKT27 | Vik |
| VIKIT27 | Viki |
| HMI | |

Unionpedal med Velcro og indvendig side-støtte



Venstre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT32 | Viktor |
| VJT32 | Viktoria |
| VIKT32 | Vik |
| VIKIT32 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Justerbar vristrem med Velcro. Sidestøtten sikrer, at foden ikke roterer indad mod pedalarmen.

Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle

OBS: Vær opmærksom på, at venstre pedal har venstre gjvind.

Højre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT31 | Viktor |
| VJT31 | Viktoria |
| VIKT31 | Vik |
| VIKIT31 | Viki |
| HMI | |

Fodplade metal model JI



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VR215 | Viktor |
| VR215 | Viktoria |
| HMI | |

Beskrivelse:

Leveres stykvis. Er som standard forsynet med vægtsklods, der sikrer, at fodpladen altid står vandret. Bred justerbar vristrem med Velcro. Passer til skostørrelse 40-47.

Montering:

De 4 medfølgende skruer løsnes. Fodpladen skubbes ind over pedalen. Spænd de 4 skruer igen.

Fodplade plast



| Vare nr | Passer til |
|------------|------------|
| RT28 | Viktor |
| RT28 | Viktoria |
| RT28/LT27* | Vik |
| LT27/JT26* | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Leveres sætvis. Justerbar vristrem og ankelrem med Velcro.

Montering:

Monteres på standard pedal. Plastrmellemstykket lægges under fodpladen. Monteres på pedalen med forreste skrue imellem pedalen, og bageste skrue bag ved og uden for pedalen. Metalslutstykket monteres under pedalen. Spænd møtrikkerne.

*)

RT28 = skostørrelse 37-42
LT27 = skostørrelse 31-36
JT26 = skostørrelse 24-30

Vægtklods



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| RT29 | Viktor |
| RT29 | Viktor |
| LT29 | Vik |
| JT29 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:


Leveres sætvis.
Vægtklodsens sikrer, at pedalen altid står vandret.

Montering:

Fladjernet, der følger med fodpladen, erstattes af vægtklodsens.
Fastgøres med skruer og møtrikker fra det overskydende fladjern.
Før fastspænding justeres vægtklodsens indtil fodpladen står vandret.

Pedaler diverse

Pedaladapter

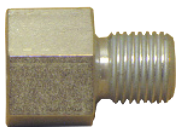

Venstre

| Vare nr | Passer til |
|-----------|------------------------------------|
| VR-331-02 | Passer til pedaler med 1/2" gevind |
| HMI | |

Beskrivelse:

Anvendes til montering af JI specialpedaler på andre cykler/motionscykler.


Montering:

Fastgør adapteren til pedalen.
Adapteren fastgøres på pedalarmen.
OBS: Pedaladapter til venstre pedal har linksgevind.

Højre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------------------------------|
| VR331 | Passer til pedaler med 1/2" gevind |
| HMI | |

Pedalforlænger

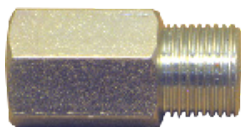

Venstre

| Vare nr | Passer til |
|----------|------------|
| VR-329-2 | Viktor |
| VR-329-2 | Viktor |
| VR-329-2 | Vik |
| VR-329-2 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Anvendes til at flytte pedalen 2 cm ud fra pedalarmen for bedre plads til foden.

Montering:

Afmonter pedalen.
Fastgør forlængerstykket til pedalen.
Pedalforlængerens fastgøres på pedalarmen.
OBS: Pedalforlænger til venstre pedal har linksgevind.

Højre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VR-329 | Viktor |
| VR-329 | Viktor |
| VR-329 | Vik |
| VR-329 | Viki |
| HMI | |

Pedalarm kort



Beskrivelse:

Anvendes af brugere med nedsat bevægelighed i knæene. Formindsker bevægelse i knæ og hofter.

Montering:

Fjern krankbolten på de originale pedalarme og afmonter kæden. Aftrækerværktøj benyttes.

De nye pedalarme monteres og spændes med krankbolten. Påmonter kæden igen.

OBS: Skal monteres af fagpersonale, da specialværktøj skal anvendes.

Venstre

| Vare nr | Passer til |
|---------|-------------------|
| VT60 | Viktor (140 mm) |
| VJT60 | Viktoria (115 mm) |
| VIKT60 | Vik (90 mm) |
| HMI | |

Højre

| Vare nr | Passer til |
|---------|-------------------|
| VT59 | Viktor (140 mm) |
| VJT59 | Viktoria (115 mm) |
| VIKT59 | Vik (90 mm) |
| HMI | |

Pedalarm med knæled



Beskrivelse:

Anvendes af brugere der har meget ringe eller ingen bevægelse i knæ og/eller hoftelæd.

Montering:

Afmonter pedalarmen ved at skruer krankbolten ud, derefter bruges aftrækker. Længden kan justeres ved at løsne for holderen med umbraconøgle. Pedalarmen monteres og spændes med krankbolten. Pedalen kan monteres i 3 forskellige positioner.

OBS: Skal monteres af fagpersonale, da specialværktøj skal anvendes.

Venstre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT62 | Viktor |
| VJT62 | Viktoria |
| VIKT62 | Vik |
| HMI | |

Pedalarm med knæled



Beskrivelse:

Anvendes af brugere der har meget ringe eller ingen bevægelse i knæ og/eller hoftelæd.

Montering:

Afmonter pedalarmen ved at skruer krankbolten ud, derefter bruges aftrækker. Længden kan justeres ved at løsne for holderen med umbraconøgle. Pedalarmen monteres og spændes med krankbolten. Pedalen kan monteres i 3 forskellige positioner.

OBS: Skal monteres af fagpersonale, da specialværktøj skal anvendes.

Højre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT61 | Viktor |
| VJT61 | Viktoria |
| VIKT61 | Vik |
| HMI | |

Støtte til stift ben eller protese



Beskrivelse:

Cyklen trædes med ét ben. En tilbagetræksfjeder hjælper pedalen rundt.

Montering:

Monteres af fagpersonale.

Venstre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT64 | Viktor |
| VJT64 | Viktoria |
| VIKT64 | Vik |
| HMI | |

Højre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT63 | Viktor |
| VJT63 | Viktoria |
| VIKT63 | Vik |
| HMI | |

For at forbedre oplevelsen og komforten ved cykelturen er det vigtigt at vælge en sadel, der ergonomisk passer bedst til brugerens sæde.

Standard sadel



| Vare nr | Passer til |
|-----------|------------|
| VL-700 | Viktor |
| VJL-700 | Viktoria |
| VIK-L-14 | Vik |
| VIKI-L-14 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Sadel i god kvalitet med fin siddekomfort.

Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

Luft sadel



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT52 | Viktor |
| VJT52 | Viktoria |
| VIK52 | Vik |
| VIKIT52 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Sadlen er luftfyldt. Det justerbare tryk aflaster ryggen ved cykling. Anvendes af brugere med dårlig ryg og af brugere, der ønsker ekstra siddekomfort.

Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel. Trykket i sadlen justeres igennem ventilen under sadlen. Almindelig cykelpumpe anvendes til at pumpe luft i sadlen.

Oval sadel



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT49 | Viktor |
| VJT49 | Viktoria |
| VIKT49 | Vik |
| VIKIT49 | Viki |
| HMI | 47860 |

Beskrivelse:

For anderledes trykaflastning af bagdelen. Den ovale form giver ingen gener i skridtet.

Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

Damesadel



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT57 | Viktor |
| VJT57 | Viktoria |
| VIKT57 | Vik |
| VIKIT57 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

I modsætning til almindelige sadler er sadelspidsen ganske kort, hvilket forhindrer gener i skridtet.

Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

Bred gelsadel



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT53 | Viktor |
| VJT53 | Viktoria |
| VIKT53 | Vik |
| VIKIT53 | Viki |
| HMI | 47863 |

Beskrivelse:

Den ekstra brede gelfyldte sadel giver brugeren behagelig siddekomfort og god understøttelse.

Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

Unisadel



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| 10857 | Viktor |
| 10857 | Viktoria |
| 10857 | Vik |
| 10851 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Smal og lang bananformet sadel. Den specielle form sikrer, at brugeren ikke rutsjer bagud. Forkantens skridtkile sørger for, at lårene holdes adskilt. Ingen generende syninger.

Montering:

BN beslaget monteres på unisadlen med de 4 møtrikker under sadlen. Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

Note:

Beslag bestilles separat. Varenummer BN58

Unisadel med beslag



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT54 | Viktor |
| VJT54 | Viktoria |
| VIKT54 | Vik |
| VIKIT54 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Smal og lang bananformet sadel. Den specielle form sikrer, at brugeren ikke rutsjer bagud. Forkantens skridtkile sørger for, at lårene holdes adskilt. Ingen generende syninger.

Montering:

Bruges i forbindelse med vinkelsadelpind. De vandrette rør sættes ind i vinkelsadelpinden. Nu kan sadlen justeres frem og tilbage.

Note:

Vinkelsadelpind bestilles separat.

Multisadel



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT55 | Viktor |
| VJT55 | Viktoria |
| VIKT55 | Vik |
| VIKIT55 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Smal og lang bananformet sadel. Den specielle form sikrer, at brugeren ikke rutsjer bagud. Forkantens skridtkile sørger for, at lårene holdes adskilt.

Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

Note:

Beslag bestilles separat.

Multisadel med beslag



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT56 | Viktor |
| VJT56 | Viktoria |
| VIKT56 | Vik |
| VIKIT56 | Viki |
| HMI | |

Beskrivelse:

Smal og lang bananformet sadel. Den specielle form sikrer, at brugeren ikke rutsjer bagud. Forkantens skridtkile sørger for, at lårene holdes adskilt.

Montering:

Bruges i forbindelse med vinkelsadelpind. De vandrette rør sættes ind i vinkelsadelpinden. Nu kan sadlen justeres frem og tilbage.

Note:

Vinkelsadelpind bestilles separat.

Kropsstøtte med beslag



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT20 | Viktor |
| VJT20 | Viktoria |
| VIKT20 | Vik |
| VIKIT20 | Viki |
| HMI | 47841 |

Beskrivelse:

Anvendes af brugere med balanceproblemer i overkroppen. Den justerbare rem med klikspænde fastholder brugeren i en komfortabel kørestilling.

Montering:

Monteres i vinkelpinden. Den modsatte ende af vinkelpinden sættes ind i vinkelsadelpinden (bestilles separat). Kropsstøtten kan nu justeres frem og tilbage samt op og ned.

Sadelpind vinkel til kropsstøttebeslag



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT14 | Viktor |
| VJT14 | Viktoria |
| VIKT14 | Vik |
| VIKIT14 | Viki |
| HMI | 47837 |

Beskrivelse:

Anvendes i forbindelse med kombination af kropsstøtte og/eller unisadel/multisadel.

Montering:

Afmonter den originale sadelpind ved at løsne for sadelclamps, derefter monteres den nye sadelpind. Sædet kan nu justeres frem og tilbage.

Kurve og tasker

Tilbehørsprogrammet omfatter forskellige kurve og tasker til montering foran eller bag på cyklen..

Kurv front



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT03 | Viktor |
| VJT03 | Viktoria |
| VIKT03 | Vik |
| VIKIT03 | Viki |
| HMI | 47785 |


Beskrivelse:

Metaltrådkurv til montering foran styret. Brugeren har overblik over indholdet, hvilket giver sikkerhed og tryghed.

Montering:

Frontkurven monteres ved at spænde de 2 medleverede rørbærringsbeslag omkring styrstamme og fladjernsbeslaget på inder-siden af kurven.

Kurv bag

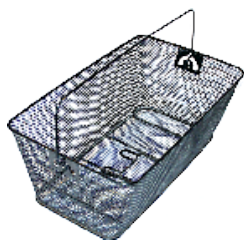

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT05 | Viktor |
| VJT05 | Viktoria |
| VIKT05 | Vik |
| HMI | 47825 |

Beskrivelse:

Metaltrådkurv til montering på bagagebæreren. Hvis brugeren ønsker det, kan kurven fastmonteres med medfølgende strips.

Montering:

Kurven monteres på bagagebæreren.

Cykeltaske



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT10 | Viktor |
| VJT10 | Viktoria |
| VIKT10 | Vik |
| HMI | 47832 |

Beskrivelse:

To store tasker med 4 rum i hver. Hver taske rummer ca. 28 liter. Fordelagtige, hvis brugeren har svært ved at løfte varer højt. Lynlåse sikrer indholdet.

Montering:

Taskerne lægges ind over bagagebæreren, og stropperne spændes fast omkring denne. På taskens inderside findes der stropper til fastgøring på bagagebærerens ben.

Bagageboks



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT87 | Viktor |
| VJT87 | Viktoria |
| HMI | 47880 |

Beskrivelse:

Til montering på bagagebærer.

Stødsikkert hårdt plastmateriale.

Aflåseligt låg.

Montering:

Fastgøres på bagagebæreren med medfølgende beslag.

Til V-serien fås mange dele, som forbedrer oplevelsen, når brugeren er ude og cykle.

Cykellygte - diodelys



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT12 | Viktor |
| VJT12 | Viktoria |
| VIKT12 | Vik |
| VIKIT12 | Viki |
| HMI | 47790 |

Beskrivelse:

Lygtesæt med diodelys i forlygte og baglygte. Forlygten kan afmonteres og bruges som lommelygte. Baglygten monteres på bagagebæreren

Montering:

Forlygtens beslag klemmes rundt om styret og lygten sidder fast. Ved afmontering løsnes beslaget og lygten kan tages med. Den fabriksmonterede refleks afmonteres, og baglygten monteres på bagagebæreren.

Cykellås med nøgle



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT69 | Viktor |
| VJT69 | Viktoria |
| VIKT69 | Vik |
| HMI | 47879 |

Beskrivelse:

Forsikringsgodkendt nøgletås. Leveres med reservenøgle. Standardmonteret på Viktor og Viktoria modellerne. Kan bruges på Vik.

Montering:

Afmonter de to 5 mm låsemøtrikker og monter den nye lås i beslaget på cyklen..

Lav gearing 26 tand



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT18 | Viktor |
| VJT18 | Viktoria |
| VIKT18 | Vik |
| VIKIT18 | Viki |
| HMI | 47839 |

Beskrivelse:

Fordelagtig til brugere med ringe muskelkraft eller færdsel i bakket terræn.

Montering:

Skal monteres af fagpersonale.

Høj gearing 18 tand



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT19 | Viktor |
| VJT19 | Viktoria |
| VKT19 | Vik |
| VKIT19 | Viki |
| HMI | 47840 |

Beskrivelse:

Til brugere, der ønsker højere fart.

Montering:

Udskiftes af fagpersonale

Cykelcomputer



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT13 | Viktor |
| VJT13 | Viktoria |
| VKT13 | Vik |
| VKIT13 | Viki |
| HMI | 47834 |

Beskrivelse:

Cykelcomputer med kilometertæller. Brugsanvisning medfølger. God til at brugeren kan holde styr på den daglige træning.

Montering:

Ifølge brugsanvisningen.

Spejl



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT09 | Viktor |
| VJT09 | Viktoria |
| VKT09 | Vik |
| VKIT09 | Viki |
| HMI | 47831 |

Beskrivelse:

Til montering på styrets venstre og/eller højre side. Fordelagtig især til brugere, der har svært ved at dreje hovedet langt nok til at kunne orientere sig bagud.

Montering:

Monteres på cyklens venstre og/eller højre side, så langt ude mod styrhåndtaget som muligt.

Trinplade



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT40 | Viktor |
| VJT40 | Viktoria |
| VKT40 | Vik |
| HMI | 47851 |

Beskrivelse:

Den skridsikre trinplade monteres på cykelstellet, hvilket letter af- og påstigning.

Montering:

Rørbæring spændes omkring hovedstellet, så det sidder 5-10 cm foran kædeskærmsrørene.



Stokkeholder



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT06 | Viktor |
| VJT06 | Viktoria |
| VIKT06 | Vik |
| HMI | 47826 |

Beskrivelse:

Stokkeholderen giver brugeren mulighed for at medbringe stok/stokke. Den smarte kliklås holder stokken fast og sikkert under transporten. Hvis brugeren anvender to stokke, monteres en stokkeholder på hver side af baghjulet.

Montering:

Stokkeholderen kan monteres på højre og venstre side af baghjulet. Nederste del af stokkeholderen monteres i baghjulsbeslaget med medfølgende skrue. Øverste del fastspændes til bagagebæreren med medfølgende strip.

Bakgear



3-gears model

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VL-617 | Viktor |
| VJL-617 | Viktoria |
| VIKT15 | Vik |
| HMI | |

Beskrivelse:

Til brugere, der har svært ved at komme på og af cyklen. Baggearet gør det muligt at anbringe cyklen, hvor det er mest fordelagtigt for brugeren.

Montering:

Skal monteres af fagpersonale.

7-gears model

| Vare nr | Passer til |
|-----------|------------|
| VL-616 | Viktor |
| VJL-616 | Viktoria |
| VIKT15-01 | Vik |
| HMI | |

Rollatorstativ



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT90 | Viktor |
| VJT90 | Viktoria |
| HMI | |

Beskrivelse:

Rollatorstativet monteres foran på cyklen, hvor det er nemt at håndtere det. Stativet kan justeres, så det passer til alle rollatormodeller.

Montering:

Rørbærringsbeslagene monteres omkring forbroen. Den medfølgende strop monteres omkring styrstammen. Juster beslagene så de passer til rollatoren.

Overtræksgarage



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT07 | Viktor |
| VJT07 | Viktoria |
| HMI | 47827 |

Beskrivelse:

Til opbevaring af cyklen, hvor det ikke er muligt at parkere den i skur eller garage..

Montering:

Læg forsigtigt overtrækket ind fra forenden af cyklen, træk derefter overtrækket ned over hele cyklen. I bunden er der en elastisksnor, der kan trækkes stramt.

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VIKT07 | Vik |
| VIKIT07 | Viki |
| HMI | 31109 |

V-serie Skubbestang inkl. bundrør



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VT21 | Viktor |
| VJT21 | Viktoria |
| VKT21 | Vik |
| VKIT21 | Viki |
| HMI | 47842 |

Beskrivelse:

Giver hjælperen mulighed for at skubbe samt støtte cyklistens balance.

Montering:

Viki og Vik:

På stellet er monteret et bundrør på venstre side ved baghjulet. Skubbestangen monteres heri.

Viktor og Viktoria:

Det medsendte bundrør monteres på stellet til venstre for baghjulet. Brug de medsendte rørberingsbeslag.

Note:

Anvendes bedst sammen med lav gearing.

Hydraulisk bremse



Forhjul

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VR192 | Viktor |
| VR192 | Viktoria |
| VR192 | Vik |
| HMI | |

Beskrivelse:

Til brugere med ringe muskelkraft i fingrene. Sikrer optimal bremseeffekt uden at overbelaste fingre, hænder og håndled.

Montering:

Skal monteres af fagpersonale.

Baghjul

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| VR300 | Viktor |
| VR300 | Viktoria |
| VR300 | Vik |
| HMI | |

Batteri



| Vare nr | Passer til |
|------------|----------------|
| VP-L-2114 | Viktor Power |
| VJP-L-2114 | Viktoria Power |
| HMI | |


Beskrivelse:

Brugere, der kører lange distancer, kan medbringe et ekstra opladet batteri.

Montering:

Det brugte batteri fjernes fra batteriholderen, hvorefter det fuldt opladte batteri placeres heri.

Motorfjeder

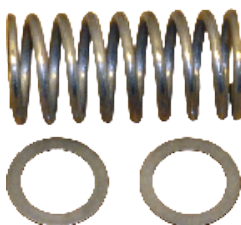

| Vare nr | Passer til |
|-----------|----------------|
| VP-L-980 | Viktor Power |
| VJP-L-980 | Viktoria Power |
| HMI | |

Beskrivelse:

Motorfjederen øger motorens moment. Som standard yder motoren ca. 50% af den kraft, cyklisten træder med på pedalen. Ved at udskifte motorfjederen ændres motordelen til 80%. Brugeren skal være opmærksom på, at motoren bruger mere strøm, og at batteriets brugstid (og dermed cyklet distance) bliver kortere.

Montering:

Skal monteres af fagpersonale.

J-L-R serie

J-L-R serien består af følgende modeller:

Jørn

Line

Rasmus

Styr

Til Jørn—Line—Rasmus serien findes der forskellige slags styr og håndtag. Det er vigtigt, at der vælges det rigtige styr, så ens behov er bedst muligt dækket. Der findes f.eks. 2-delt styr, hvor der kan gribes fat forskellige steder, i stedet for på det traditionelle styr.

Standard styr til Jørn



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT02 | Jørn |
| HMI | |

Beskrivelse:

Styret kan drejes i forskellige vinkler, hvis det er monteret i en indstillelig frempind, Afstanden til styret ændres ved at vinkle frempinden op eller ned, for optimal komfort.

Montering:

Afmonter det gamle styr på de 2 umbraco skruer på frempinden. Styret monteres med samme skruer. Styret justeres op eller ned før det spændes på skruerne. Ved indstillelig frempind løsnes umbracoskruen *under* frempinden og frempindens vinkel ændres. Stram umbracoskruerne igen.

Standard styr til Line og Rasmus



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| LT02 | Line |
| RT02 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Styret kan drejes i forskellige vinkler, hvis det er monteret i en indstillelig frempind, Afstanden til styret ændres ved at vinkle frempinden op eller ned, for optimal komfort.

Montering:

Afmonter det gamle styr på de 2 umbraco skruer på frempinden. Styret monteres med samme skruer. Styret justeres op eller ned før det spændes på skruerne. Ved indstillelig frempind løsnes umbracoskruen *under* frempinden og frempindens vinkel ændres. Stram umbracoskruerne igen.

2-delt styr



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT03 | Jørn |
| LT03 | Line |
| RT | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Vælges hvis brugeren har brug for at få styret tæt ind på kroppen, eller kun har lidt bevægelse i armene. Man kan holde hånden mange steder på styret. Det 2-delte styr er ideelt til brugere, der også har monteret kroppsstøtte på cyklen.

Montering:

Det 2-delte styr monteres i styrstammen, ved at løsne for beslag og hurtigspænderen på styret, hvorefter styret justeres op, ned, frem og tilbage.

Ledsagerhåndtag



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT40 | Jørn |
| LT40 | Line |
| RT40 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Anvendes hvis brugeren ikke selv kan eller må styre cyklen. Hjælperen bruger ledsagerhåndtaget til at hjælpe med at styre og trække cyklen. Fordelen ved at bruge ledsagerhåndtag er, at der bevares god kontakt mellem bruger og hjælper, da man er tæt på hinanden.

Montering:

Nederste u-bøjle af styret udskiftes med den nye. Derefter monteres ledsagerhåndtaget i enden af den nye u-bøjle. Ledsagerhåndtaget indstilles i den ønskede højde ved at vippe håndtaget frem eller tilbage. Fastspændes med de medfølgende styrclamps

Ledsagerhåndtag til standard styr



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT41 | Jørn |
| LT41 | Line |
| T41 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Anvendes hvis brugeren ikke selv kan eller må styre cyklen. Hjælperen bruger ledsagerhåndtaget til at hjælpe med at styre og trække cyklen. Fordelen ved at bruge ledsagerhåndtag er, at der bevares god kontakt mellem bruger og hjælper, da man er tæt på hinanden.

Montering:

Den ene del af rørbæringsbeslaget monteres omkring frempinden på cykelstyret. Derefter indstilles ledsagerhåndtaget i den ønskede højde ved at vippe håndtaget frem eller tilbage. De 4 umbraco skruer spændes.

Skubbestang højdeindstillelig



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT01 | Jørn |
| LTO1 | Line |
| RTO1 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Skubbestangen giver hjælperen mulighed for at skubbe samt støtte cyklistens balance. Skubbestangen kan indstilles i højden.

Montering:

Monteres i rør bag på cyklen. Spændes med fingerskrue.

Pedaler

Der findes flere forskellige pedaler til Jørn-Line-Rasmus cyklerne.

Valget af pedaler er utrolig vigtigt for at gøre brugeren så selvhjulpent som muligt. Der kan bl.a. fås pedaler med velcro over vristen, så foden ikke hopper af pedalen så nemt, som den kan ved de almindelige.

Specialtilpassede pedaler fremstilles efter brugerens ønske og behov.

Alle unionpedaler er forsynet med vægtklods, så pedalen altid står vandret.

Unionpedal med vægtklods



Venstre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT60 | Jørn |
| LT60 | Line |
| RT60 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Hård plastrem over vrist. Stigbøjlefunktionen sikrer, at foden fastholdes, så den ikke skrider fremad eller til siden.

Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

OBS: Vær opmærksom på at venstre pedal har linksgevind.

Højre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT59 | Jørn |
| LT59 | Line |
| RT59 | Rasmus |
| HMI | |

Unionpedal med vægtklods og Velcro



Venstre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT58 | Jørn |
| LT58 | Line |
| RT58 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Justerbar rem med Velcro over vrist. Foden fastholdes, så den ikke skrider fremad eller til siden.

Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

OBS: Vær opmærksom på at venstre pedal har linksgevind.

Højre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT57 | Jørn |
| LT57 | Line |
| RT57 | Rasmus |
| HMI | |

Unionpedal med Velcro og indvendig side-støtte



Venstre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT52 | Jørn |
| LT52 | Line |
| RT52 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Justerbar vristrem med Velcro. Sidestøtten sikrer, at foden ikke roterer indad mod pedalarmen.

Montering:

Monteres i pedalarmenes gevindhuller med 15 mm ringgaffelnøgle.

OBS: Vær opmærksom på at venstre pedal har linksgevind.

Højre

| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT51 | Jørn |
| LT51 | Line |
| RT51 | Rasmus |
| HMI | |

Fodplade med Velcro



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT26 | Jørn |
| LT27 | Line |
| RT28 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Barnet kan bedre holde fødderne fast på pedalerne, da der er velcro og støtte omkring foden.

Montering:

Monteres på standard pedal eller på fiberklodsen. Plastmellemsykket lægges under fodpladen. Monteres på pedalen med forreste skrue imellem pedalen, og bageste skrue bag ved og uden for pedalen. Metaslutstykket monteres under pedalen.

Ved dobbeltkrank anvendes de to huller i fiberklodsen.

*J

RT28 = skostørrelse 37-42

LT27 = skostørrelse 31-36

JT26 = skostørrelse 24-36

Vægtklods



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT29 | Jørn |
| LT29 | Line |
| RT29 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Leveres sætvis. Vægtklodsen sikrer, at pedalen altid står vandret.

Montering:

Fladjernet, der følger med fodpladen erstattes af vægtklodsen.

Fastgøres med skruer og møtrikker fra det overskydende fladjern.

Før fastspænding justeres vægtklodsen indtil fodpladen står vandret.

For at forbedre din oplevelse når du cykler har vi flere forskellige sadler til din cykel. Vi har derfor sadler til alle behov.

Almindelig sadel



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT04 | Jørn |
| LT04 | Line |
| RT04 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Sadel i god kvalitet med fin siddekomfort.

Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med 8 mm møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

Unisadel med beslag til kropsstøtte



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT06 | Jørn |
| LT06 | Line |
| RT06 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Smal og lang bananformet sadel. Den specielle form sikrer, at brugeren ikke rutsjer bagud. Forkantens skridtkile sørger for, at lårene holdes adskilt. Ingen generende syninger.

Montering:

Bruges i forbindelse med vinkelsadelpind. De vandrette rør sættes ind i vinkelsadelpinden. Nu kan sadlen justeres frem og tilbage.

Note:

Vinkelsadelpind bestilles separat.

Multisadel uden beslag til kropsstøtte



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT07 | Jørn |
| LT07 | Line |
| RT07 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Smal og lang bananformet sadel. Den specielle form sikrer, at brugeren ikke rutsjer bagud. Forkantens skridtkile sørger for, at lårene holdes adskilt.

Montering:

Sadelklampen spændes omkring sadelpinden med møtrik. Før tilspænding justeres sadlen i den ønskede vinkel.

Note:

Beslag bestilles separat.

Multisadel med beslag



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT08 | Jørn |
| LT08 | Line |
| RT08 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Smal og lang bananformet sadel. Den specielle form sikrer, at brugeren ikke rutsjer bagud. Forkantens skridtkile sørger for, at lårene holdes adskilt.

Montering:

Bruges i forbindelse med vinkelsadelpind. De vandrette rør sættes ind i vinkelsadelpinden. Nu kan sadlen justeres frem og tilbage.

Note:

Vinkelsadelpind bestilles separat.

Sadelpinde

Til alle cykler kan fås andre sadelpinde end standarden. Sadelpinde vælges efter behov og er nemme at udskifte.

Sadelpind lige



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT12 | Jørn |
| LT12 | Line |
| RT12 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Anvendes til almindelig sadel.

Montering:

Firkantet sadelpind sættes i røret på cyklen, og derefter kan almindelig sadel monteres på den runde del af pinden.

Sadelpind lige + 10 cm



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT13 | Jørn |
| LT13 | Line |
| RT13 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Anvendes til almindelig sadel, hvor der er behov for større skridtlængde.

Montering:

Firkantet sadelpind sættes i røret på cyklen, og derefter kan almindelig sadel monteres på den runde del af pinden.



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT14 | Jørn |
| LT14 | Line |
| RT14 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Anvendes sammen med unisadel eller multisadel. Sadlen kan justeres frem og tilbage for bedre tråd.

Montering:

Den lange ende monteres i røret på cyklen, og derefter kan unisadel eller multisadel (med beslag) monteres indvendig i vandret firkantrør.

Sadelpind vinkel + 10 cm



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT15 | Jørn |
| LT15 | Line |
| RT15 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Anvendes sammen med unisadel eller multisadel, hvor der er brug for større skridtlængde. Sadlen kan justeres frem og tilbage for bedre tråd.

Montering:

Den lange ende monteres i røret på cyklen, og derefter kan unisadel eller multisadel (med beslag) monteres indvendig i vandret firkantrør.

Kropsstøtter

Der findes flere forskellige former for kropsstøtter til J-L-R serien. Kropsstøtter bruges hvis barnet har svært ved at holde sig selv oprejst under cykelturen, eller hvis det har svært ved at holde balancen.

Kropsstøtte med beslag



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT20 | Jørn |
| LT20 | Line |
| RT20 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Anvendes af brugere med balanceproblemer i overkroppen. Den justerbare rem med klikspænde fastholder brugeren i en komfortabel kørestilling.

Montering:

Monteres i modsatte vinkelpind. Modsatte ende af vinkelpinden sættes ind i det vandrette firkant-rør under sadlen. De medfølgende fingerskruer spændes godt.

Kropsstøtte, høj med beslag



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT21 | Jørn |
| LT21 | Line |
| RT21 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Den høje ryg giver ekstra støtte til brugere med balanceproblemer i overkroppen. Det brede Velcrobånd fastholder brugeren i en komfortabel kørestilling.

Montering:

Monteres i modsatte vinkelpind. Modsatte ende af vinkelpinden sættes ind i det vandrette firkant-rør under sadlen. De medfølgende fingerskruer spændes godt.

Kropsstøtte med vest og beslag



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT22 | Jørn |
| LT22 | Line |
| RT22 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Bruges til børn med balanceproblemer, hvor de fx. falder forover. Vesten sikrer en komfortabel og oprejst kørestilling.

Montering:

Monteres i modsatte vinkelpind. Modsatte ende af vinkelpinden sættes ind i det vandrette firkant-rør under sadlen. De medfølgende fingerskruer spændes godt.

Vest til kropsstøtte



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT23 | Jørn |
| LT23 | Line |
| RT23 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Forhindrer at barnet hænger forover på cyklen. Bruges kun i forbindelse med høj ryg.

Montering:

Hæftes med Velcro bag på den høje ryg. Vær opmærksom på at stropperne ikke nager på halsen.

Brystbånd til kropsstøtte



| Vare nr | Passer til |
|---------|------------|
| JT24 | Jørn |
| LT24 | Line |
| RT24 | Rasmus |
| HMI | |

Beskrivelse:

Forhindrer at barnet hænger forover på cyklen. Bruges kun i forbindelse med høj ryg.

Montering:

Brystbåndet slås omkring høj ryg, og hæftes ved hjælp af velcro.

Modeloversigt V-Serie



| | Viktor / Viktor Power | Viktoria / Viktoria Power | Vik | Viki |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Indstigningshøjde | 16 cm / 18 cm* | 18 cm | 12,5 cm | 12 cm |
| Styrhøjde | 105-123 cm | 95-113 cm | 80-98 cm | 60-78 cm |
| Skridtlængde | 76-96 cm | 63-76 cm | 50-65 cm | 35-50 cm |
| Længde x bredde | 173 x 86 cm | 150 x 78 cm | 125 x 73 cm | 100 x 60 cm |
| Vægt | 25 kg / 40 kg* | 25 kg / 40 kg* | 20 kg | 15 kg |
| Gear | 3 el. 7 / 7* | 3 el. 7 / 7* | 0, 3 el. 7 | 0, 3 el. 7 |
| Bremser forhjul | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse |
| Bremser baghjul | Navbremse | Navbremse | Fodbremse el. fast nav | Fodbremse el. fast nav |
| Farver | Kongeblå, cremehvid el. rossorød | Grøn, pink el. kongeblå | Pink, el. sort med nister | Gul el. creme-hvid |
| Specielt for model- len | Specialtilpasninger efter opgave | Specialtilpasninger efter opgave | Specialtilpasninger efter opgave. Fast nav eller friløb med fodbremse | Specialtilpasninger efter opgave. Fast nav eller friløb med fodbremse |

*1) Angivelse gælder for Power modellen

Modeloversigt J-L-R serie



| | Jørn | Line | Rasmus |
|-----------------------|---|--|--|
| Styrhøjde | Justerbar | Justerbar | Justerbar |
| Skridtlængde | 30-40 cm | 40-55 cm | 53-65 cm |
| Længde x bredde | 77 x 50 cm | 107 x 65 cm | 125 x 75 cm |
| Vægt | 14 kg | 18 kg | 22 kg |
| Gear | | | |
| Bremser forhjul | | Fælgbremse | Fælgbremse |
| Bremser baghjul | | | |
| Farver | Grøn | Gul | Turkis |
| Specielt for modellen | Fast nav, enkel eller dobbelt pedalarm. Specialtilpasninger efter opgave | Fast nav eller friløb med fodbremse. Specialtilpasninger efter opgave | Fast nav eller friløb med fodbremse. Specialtilpasninger efter opgave |



Jørn Iversen Rødekro ApS

Hydevadvej 48 • Hydevad • 6230 Rødekro
Telefon +45 74 66 92 42 • Telefax +45 74 66 92 94
iversen@ji.dk • www.ji.dk