




DK: Springskitse til M2 Gas-Tip m. høj netryg

Varenr. 310621-B/310622-B





EN: Spare parts for M2 Gas-Tip w. high netweave back

Art.No. 310621-B/310622-B




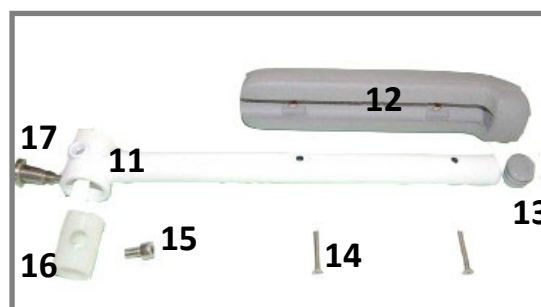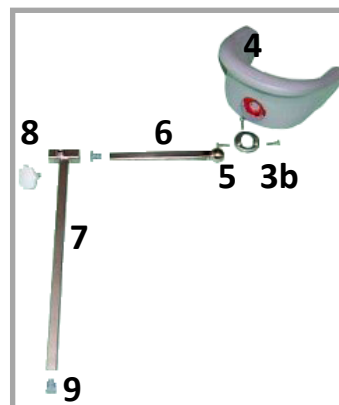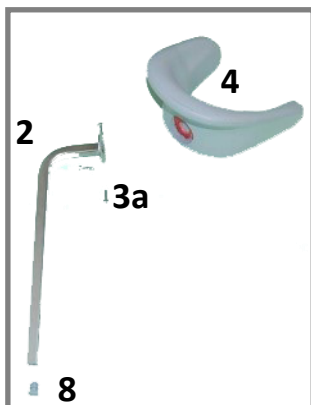

Pos.	Reservedel/Spare part	Art. No.
1	Ryg (Grå netvævsryg) fra jan 2011 / <i>Backrest (Grey netweave) from jan 2011</i>	800314
1a	Skruer til montering af overstel / <i>Screws for mounting for upperframe</i>	800290
2	Højde, breddejusteringsstang / <i>Height, width adjustment bar</i>	800326
3a	Skruer til montering af justeringsstang / <i>Screws for mounting of adjustment bar</i>	800327
3b	Skruer til montering af justeringsstang til H+D+B / <i>Screws for mounting of adjustment bar for height, depth and width</i>	800327
4	Grå nakkestøttepude / <i>Grey Headrest cushion</i>	800191
5	Beslag til dybdestangen / <i>Mounting for the depth bar</i>	800328
6	Dybdejusteringsstang / <i>Depth adjustment bar</i>	800202
7	Lodret stang til H+D+B nakkestøtte / <i>Vertical tube for headrest, height and depth adjustable</i>	800262
8	Fingerskrue, grå / <i>Finger screw, grey</i>	800027
9	Grå dupsko til nakkestøtte / <i>Grey ferule for headrest</i>	800249
10	Super soft skumpude / <i>Super soft foam pillow</i>	800247
11	Armlæn m. snaplås & grå pu, højre / <i>Armrest for M2 with quick release & grey pu foam, right</i>	310352
	Armlæn m. snaplås & grå pu, venstre / <i>Armrest for M2 with quick release & grey pu foam, left</i>	310353
12	Pu skum / <i>Pu foam</i>	800181
13	Rund dupsko, grå / <i>Ferule for round armrest, grey</i>	800244
14	Skruer til montering af armlæn / <i>Screws for fastening of armrest</i>	800012
15	Bolt til armlæn / <i>Bolt for armrest</i>	800082
16	Nylonbøsning for armlæn / <i>White nylon bush for armrest</i>	310076
17	Snaplås stor rustfri til armlæn / <i>Quick release lock for armrests</i>	310254
18	Overstel / <i>Upper frame</i>	800233

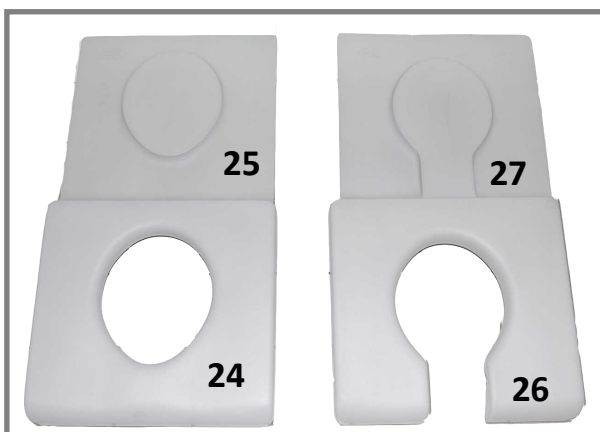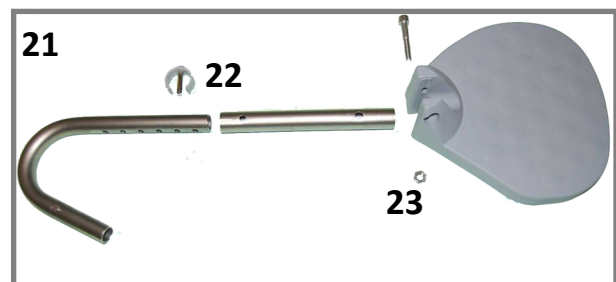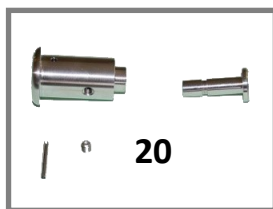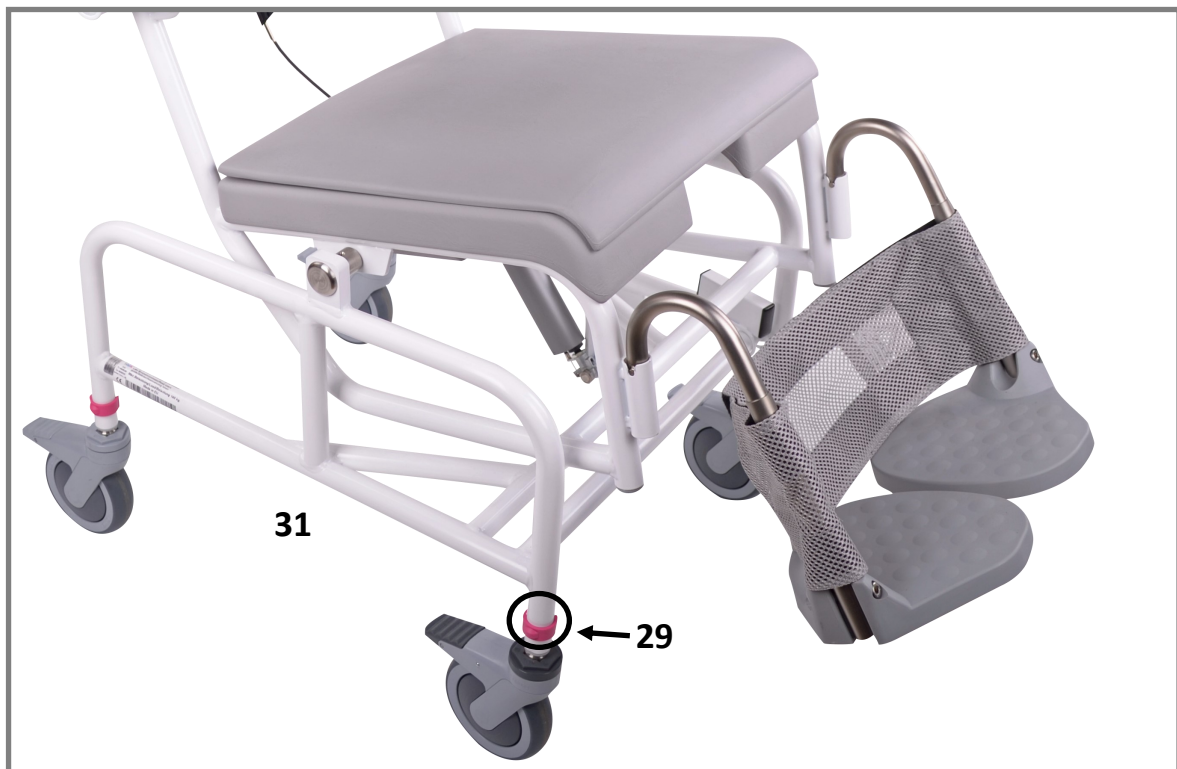

Pos.	Reservedel/Spare part	Art. No.
20	Bolt og beslag til fastgørelse af stel/ Bolt and mounting for fastening of frame	800294
21	Fodstøtte, højre/Foot rest, right	310276
	Fodstøtte, venstre/Foot rest, left	310277
22	Clips, lang/Clips, long	800170
23	Bolt m. møtrik/Bolt for foot plate with nut	800169
24	Standardsæde, grå/standardseat, grey	310340
25	Dæksel til standardsæde, grå/Seat lid for std. seat, grey	310341
26	Intimsæde, grå/Seat with extra-large hole, grey	310342
27	Dæksel til intimsæde, grå/Seat lid for seat with horseshoe seat, grey	310343
28	125 mm hjul m/bremser og påmonteret ben. 1 stk./ 125 mm wheel with leg on. 1 pcs.	800265
	100 mm hjul m/bremse og påmonteret ben. 1 stk./ 100 mm wheel with leg on. 1 pcs.	800277
28	125 mm retningsfast hjul med ben. 1 stk./ 125 mm directional fixed wheel with leg on. 1 pcs.	800297
29	Clips til højdejustering, magenta / clip for height adjustment, magenta	310165
30	Bøsning, hjul/Bush, wheel	800013
31	Understel/Bottom frame	800156

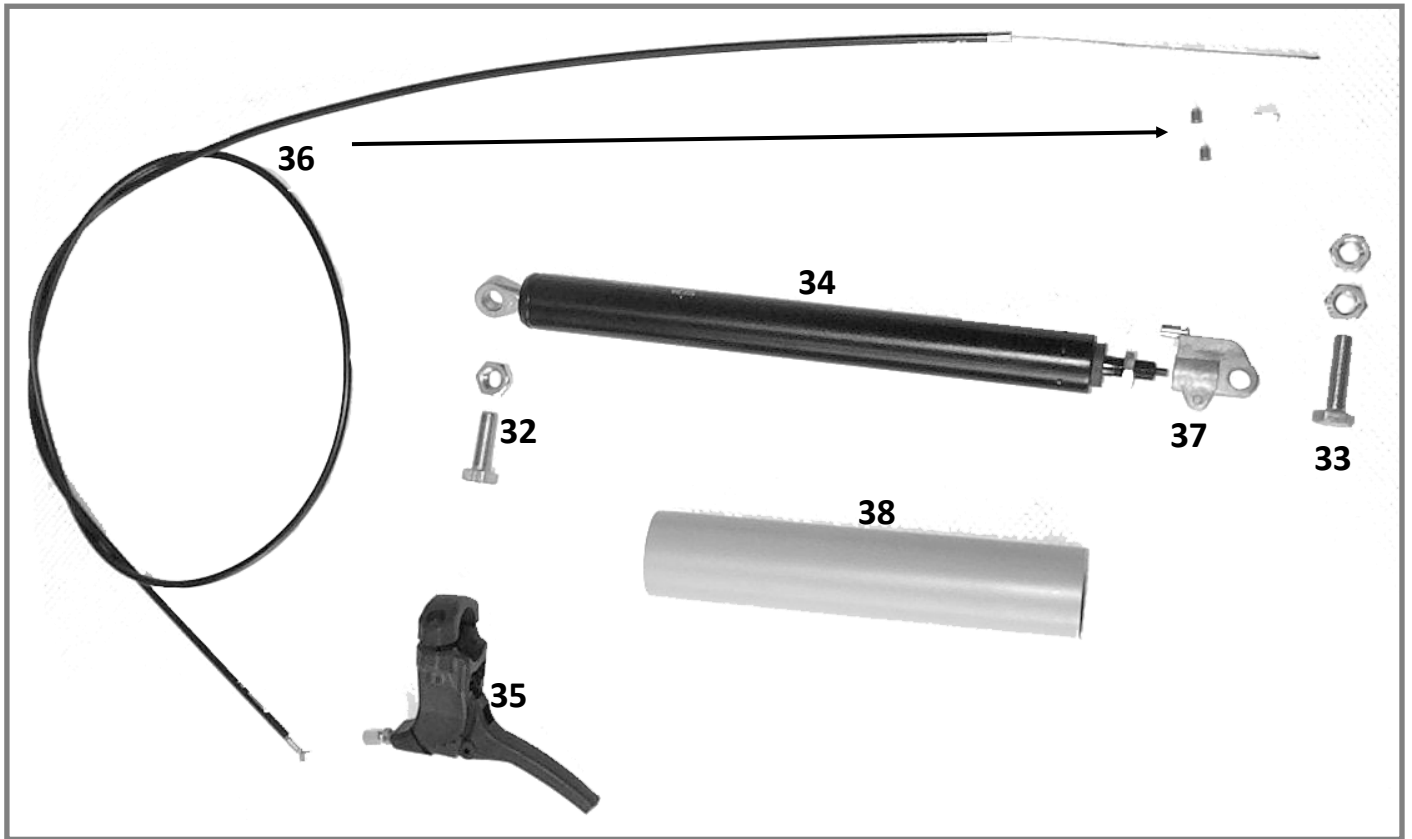

HMN a/s

Pos.	Reservedel/Spare part	Art. No.
32	Bolt + møtrik til top / <i>Bolt + nut for top</i>	310262
33	Bolt + 2 møtrikker til bund / <i>Bolt + 2 nuts for bottom</i>	310263
34	Gas-fjeder / <i>Gas spring</i>	310265
35	Bremse håndtag / <i>Brake handle</i>	310266
36	Kabel inkl. 2 fastgørelsesmuffer og klemmemuffe / <i>Complete cabel</i>	310267
37	Låsemekanisme inkl. Lille holder / <i>Locking mechanism incl. small holder</i>	310268
38	Plastik rør / <i>Plastic tube</i>	800015

DK: Hvordan man skifter wiren på Gas-Tip EN: How to change the wire on Gas-Tips

DK: Nødvendigt værktøj: Trådskeer og sekskantnøgle i størrelse 2

EN: Necessary tooling: Wire cutter and hexagon key size 2



DK: Klip af enden af tråden

EN: Cut of the wire ending

DK: Skru wiren af (Sekskant side 2)

EN: Unscrew the wire lock (hexagon size 2)



DK: Hvordan man skifter wiren på Gas-Tip EN: How to change the wire on Gas-Tips



DK: Skub den gamle wire igennem bremse håndtaget. Derefter skub den nye wire igennem bremse håndtaget og ned i plastrøret.

EN: Pull out the old wire through the brake handle. Then put the new wire through the brake handle and down the plastic pipe.

DK: Skru de 2 wirer tæt op mod hinanden.
OBS! Altid 2 wires.

EN: Screw on the 2 wire locks tight up against each other. NB! Always 2 wire locks.



DK: Hvordan man skifter wiren på Gas-Tip EN: How to change the wire on Gas-Tips




DK: Klip overskydende ledning af, så der er maksimalt 2 cm tilbage efter trådlåsen.

EN: Cut the excess wire of so there is maximum 2 cm left after the wire lock.

DK: Klip overskydende ledning af, så der er maksimalt 2 cm tilbage efter trådlåsen.


EN: Cut the excess wire of so there is maximum 2 cm left after the wire lock.

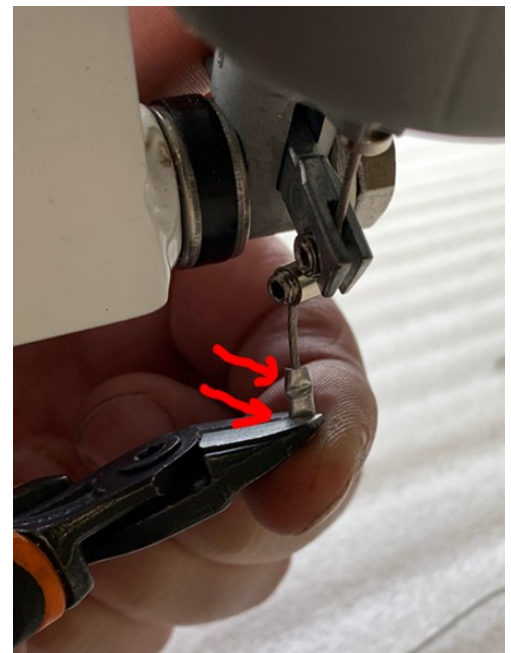

DK: Hvordan man skifter wiren på Gas-Tip EN: How to change the wire on Gas-Tips

DK: Juster det sidste.

EN: Make the final adjustments.

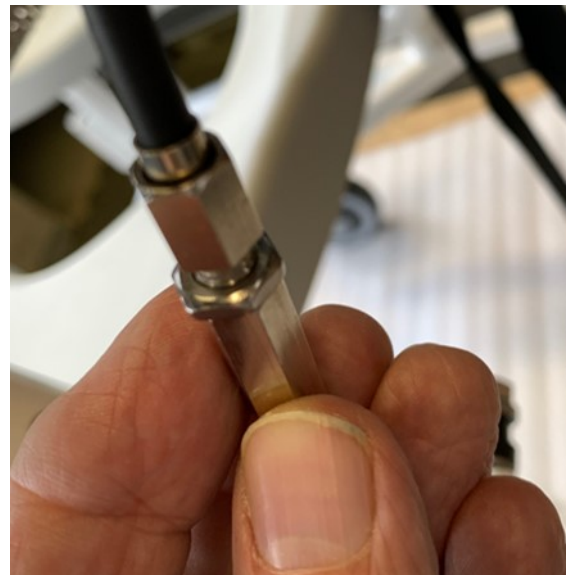



HMN since 1934

Midtager 22 - 2605 - Brøndby - Danmark

Tlf.: +45 4396 2400 - E-mail: info@hmn.dk - Web: www.hmn.dk

HMN

