


**DK: Springskitse til M2 400 kg Bred El-Tip**

Varenr. 310242


**EN: Spare parts for M2 400 kg Wide El-Tip**

Art.no. 310242




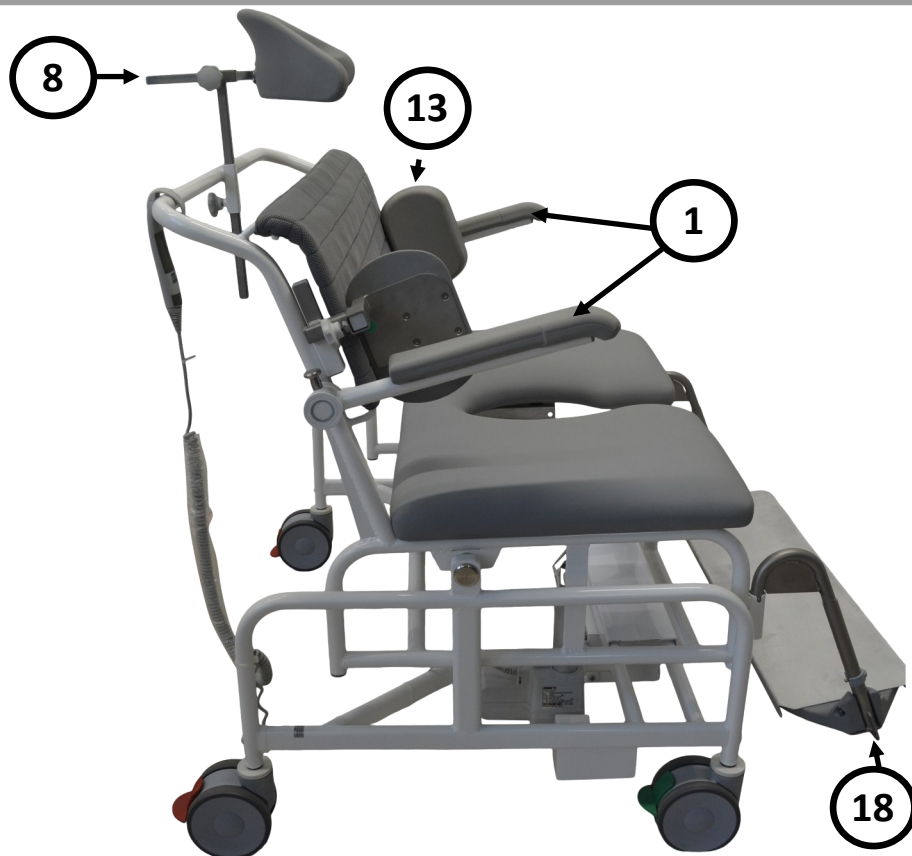


13

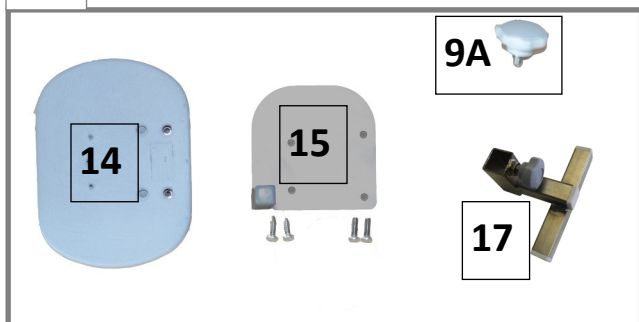

18

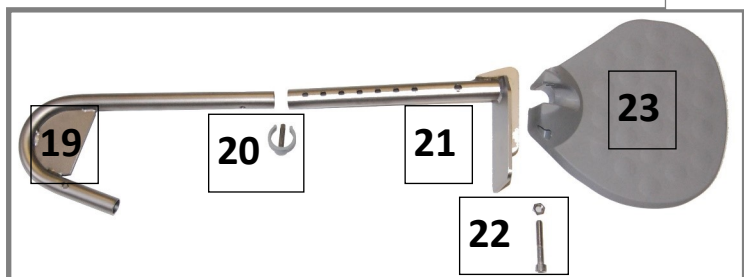

8




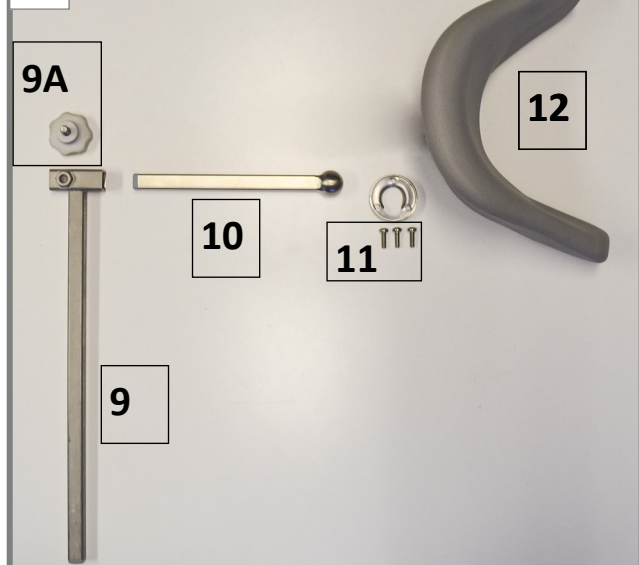


1B



Pos.	Reservedel/Spare part	Art. No.
1	Komplet armlænsæt / Complete arm rest set	-
1A	Komplet armlæn, højre / Complete armrest, right	800558
1B	Komplet armlæn, venstre / Complete armrest, left	800559
2	Pu skumpude til armlæn / PU foam padding for armrests	800181
3	Snaplås til armlæn / Quick release lock for armrests	310254
4	Rund grå dupsko / Round, grey ferule	800244
5	Skruer til montering af armlæn / Screws for fastening of armrest	800012
6	Bolt til armlæn / Bolt for armrest	800082
7	Nylonbøsning for armrest / White nylon bush for armrest	310076
8	Nakkestøtte til M2-Tip (højde - dybde - bredde justerbar) / Complete head support for M2-Tip (height - Depth - Width)	310222
9	Lodret stang til H+D+B nakkestøtte/Vertical tube for headrest, height and depth adjustable	800262
9A	Fingerskrue, grå/ Finger screw, grey	800027
10	Dybdejusteringsstang/Depth adjustment bar	800202
11	Skruer til montering af justeringsstang til H+D+B / Screws for mounting of adjustment bar for height, depth and width	800546
12	Grå nakkestøttepude (grå til H-D-B) / Grey necksupport padding (H -D-W)	800191
13	Komplet sæt sidestøtter til M2 400kg Bred EI-Tip / Complete set of sidesupports for M2 400kg Wide EI-Tip	310880
13A	Komplet sidestøtte, højre til M2 400kg Bred EI-Tip / Complete sidesupport, right, for M2 400kg Wide EI-Tip	310881
13B	Komplet sidestøtte, venstre til M2 400kg Bred EI-Tip / Complete sidesupport, left, for M2 400kg Wide EI-Tip	310882
14	PU skumpude til sidestøtte / PU foam padding for side supports	800192
15A	Beslag til sidestøtte, højre, inkl. skruer og dupsko / Fitting for side support, right, incl. screws and ferule	800409
15B	Beslag til sidestøtte, venstre, inkl. skruer og dupsko / Fitting for side support, left, incl. screws and ferule	800409
17A	Holder til sidestøtte, højre / Mount for side support, right	800410
17B	Holder til sidestøtte, venstre / Mount for side support, left	800413
18	Komplette højdejusterbare fodstøtter til M2 (sæt) / Complete height adjustable footrests for M2 (set)	310275
18A	Fodstøtte, højre / Footrest, right	310276
18B	Fodstøtte, venstre / Footrest, left	310277
19	Bøjlerør til fodstøtte/ Hanger pibe for footrest	-
20	Clips til fodstøtte / Clips for footrest	800170
21	Underdel til fodstøtte / Lower part for footrest	-
22	Bolt med møtrik til fodstøtteplade / Bolt for footplate with nut	800169
23	Fodstøtteplade/ Footplate	-
23A	Fodstøtteplade, højre / Footplate, right	800624
23B	Fodstøtteplade, venstre / Footplate, left	800625




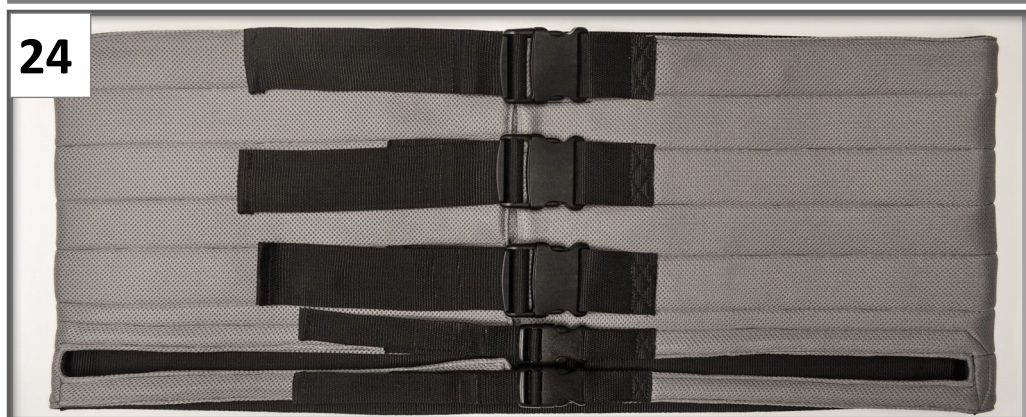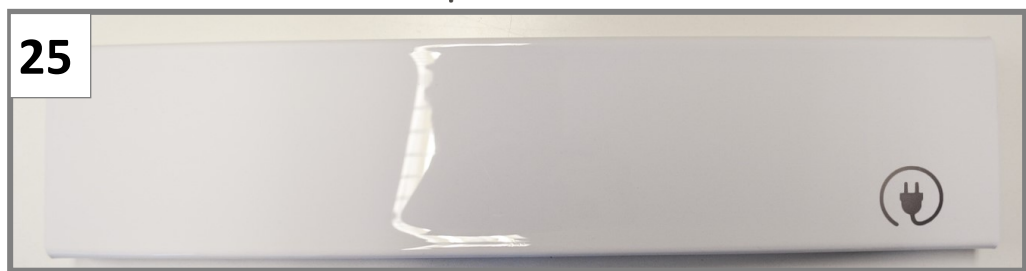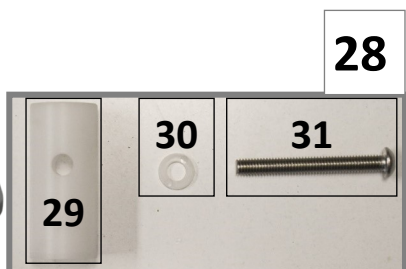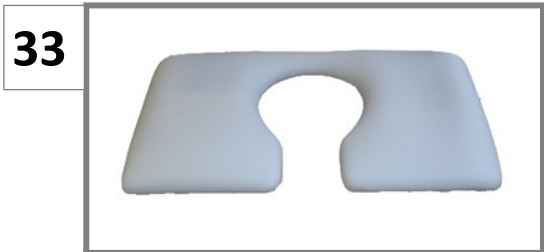

Pos.	Reservedel/Spare part	Art. No.
24	<b>Netryg til M2 400 kg Bred El-Tip / Netweave back for M2 400 kg Wide El-Tip</b>	800664
25	<b>Dæklade til M2 400 kg bred El-Tip hvid plast / White cover plate for M2 400 kg Wide El-Tip</b>	800667
26	<b>125 mm hjul / 125 mm wheel</b>	800665
27	<b>125 mm retningsfasthjul / 125 mm directional wheel</b>	800666
28	<b>Bøsning, Nylonskive og Skrue til 125mm hjul / Bush, Nylon Disc, and screw for 125mm wheel (800477, 800482, 800478)</b>	-
29	<b>Bøsning til 125 mm hjul / Bush for 125 mm wheel</b>	800477
30	<b>Nylonskive til 125 mm hjul / Nylon disc for 125 mm wheel</b>	800482
31	<b>Skrue til 125 mm hjul / Screws for 125 mm wheels</b>	800478
32	<b>Styretap + indsats til fastgørelse af understel til overstel –TIP stole / Steering pin + insert for attaching the bottom-frame to the top-frame for Tip Chairs.</b>	800294
33	<b>Intimsæde til M2 400 kg Bred El-Tip / Seat for M2 400 kg Wide El-tip</b>	800663

## Elektriske dele til M2 400 kg Bred El-Tip December 2022

*Electrical parts for M2 400 kg Wide El-Tip from December 2022*

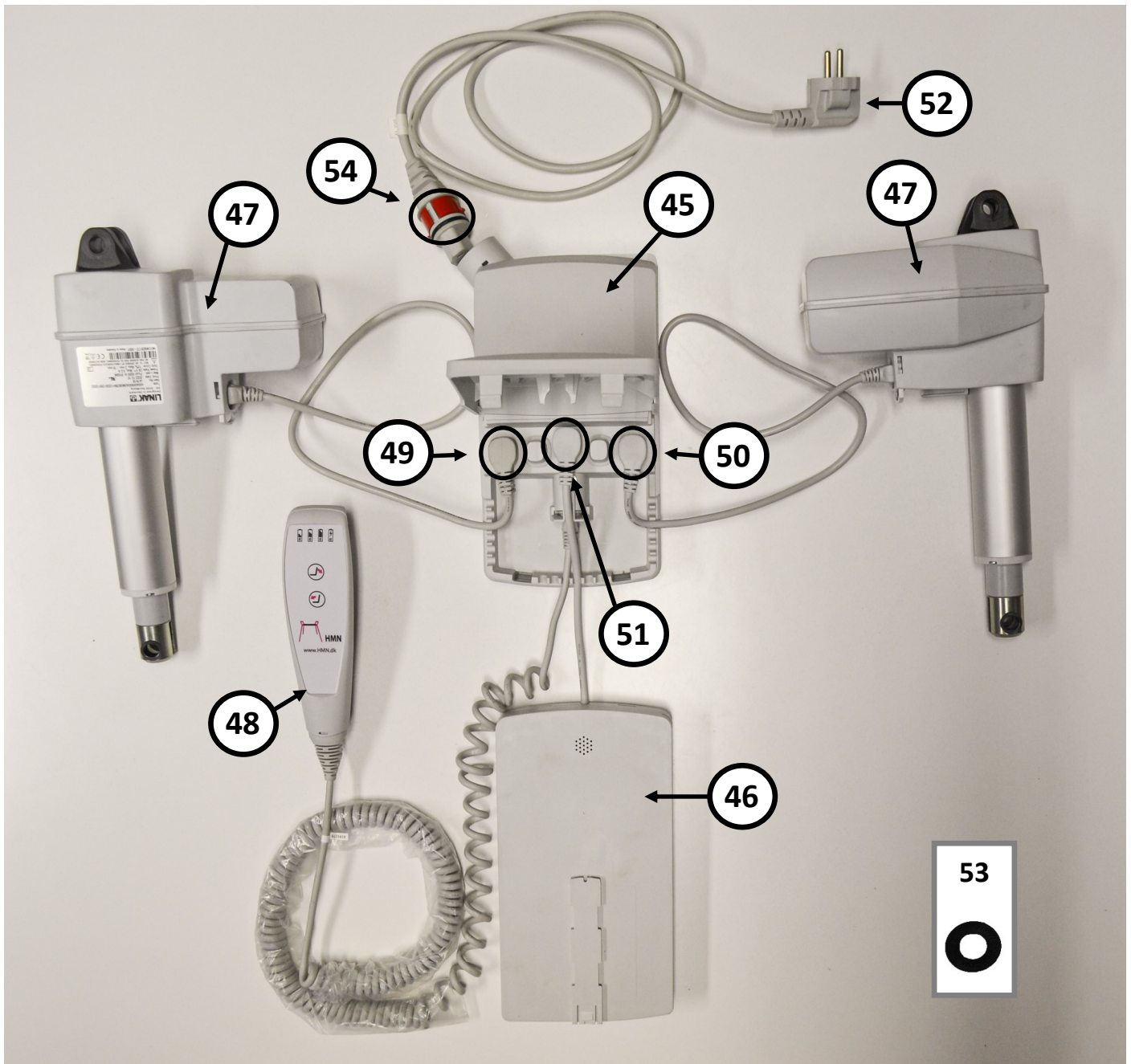

Pos.	Reservedel/Spare part	Art. No.
45	Kontrolboks til M2 400kg Bred EI-Tip / Control box for M2 400 kg Wide EI-Tip	800660
46	Batteri / Battery	800464
47	Aktuator til M2 400 kg Wide EI-Tip / Actuator for M2 400 kg Wide EI-tip	800662
48	Håndbetjening med ledning / Remote control (with wire and plug)	800661
49	Kabel til venstre aktuator / Cable for left actuator	800490
50	Kabel til højre aktuator / Cable for right actuator	800490
51	Kabel fra batteri til kontrolboks / Cable from battery to control box	800469
52	Netkabel (strømskik) / Power cord	800471
53	Afstandsstykke til aktuator / Distance for mounting the actuator	800637
54	Låserring (rød) til netkabel/strømskik / Locking ring (red) for power cord	800487



**HMN** since 1934

Midtager 22 - 2605 - Brøndby - Danmark

Tlf.: +45 4396 2400 - E-mail: [info@hmn.dk](mailto:info@hmn.dk) - Web: [www.hmn.dk](http://www.hmn.dk)

