


Ophængsstativ til spilerdug



Vejledning i opsætning og brug

Opsætning af det lodrette ophængsstativ

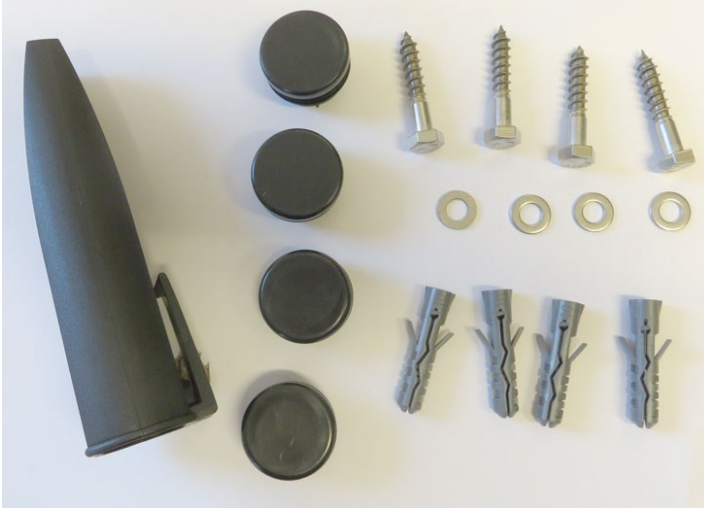

Med i kassen følger: 4 franske skruer, 4 skiver og 4 ravplugs til brug ved opsætning af ophængsstativet.

Desuden 4 blindpropper samt en sakseholder, der kan sætte i en af de 2 holdere på stativet.

Hæng stativet op i en højde der gør det let **for jer alle** at sætte en ny rulle på og fjerne den tomme, samt let at klippe af spilerdugsrullen. Husk at I sandsynligvis ikke har samme højde alle sammen.




Klar til opsætning




Klar til at klippe af dugen

Montering af spilerdugsrulle på ophængsstativ

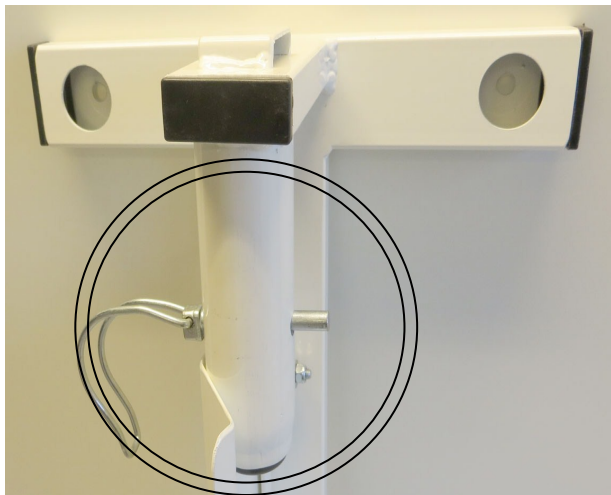


Start med at åbne og fjerne låsesplitten (som holder spilerdugsrullen på plads, når den er sat på ophængsstativet).

Spilerdugen monteres først når ophængsstativet er opsat på væg.

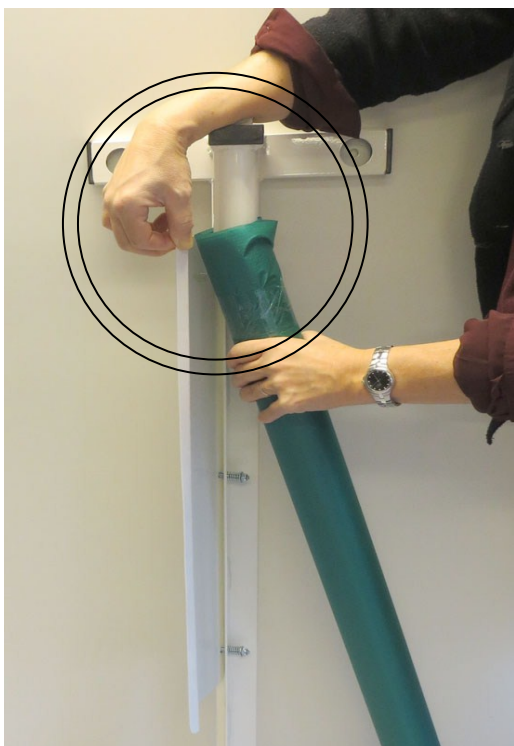

Hold ud i klemmen og sæt først rullen på tappen foroven.

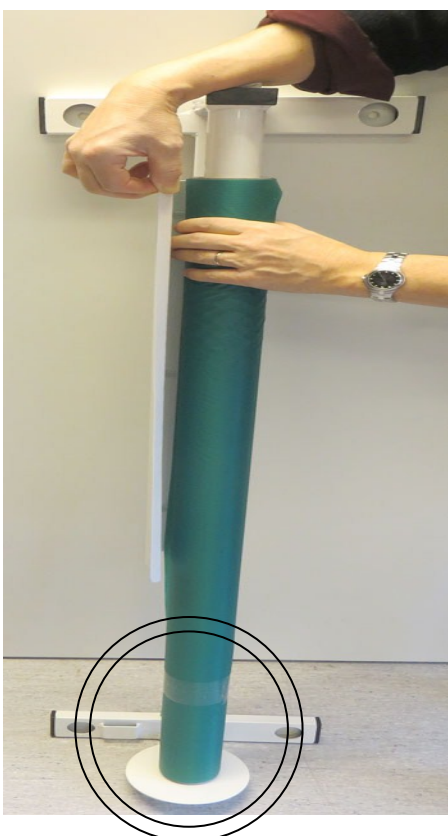

Sæt derefter rullen ned over tappen forned.

Sæt låsesplitten på og lås den igen.

Først nu fjernes tapen fra spilerdugsrullen.



Træk ud i spilerdugen og klip den ønskede længde af.



Her ses det tæt på.



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.



Brehms Spilerdug ApS

Tlf.: 57648351 – E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.dk