

# Molift Air

## 200/350/500


**molift**<sup>®</sup>  
by Etac

### Tjekliste til periodisk eftersyn (DA)

I overensstemmelse med ISO:10535

PI15710 Rev. A 2022-06-22

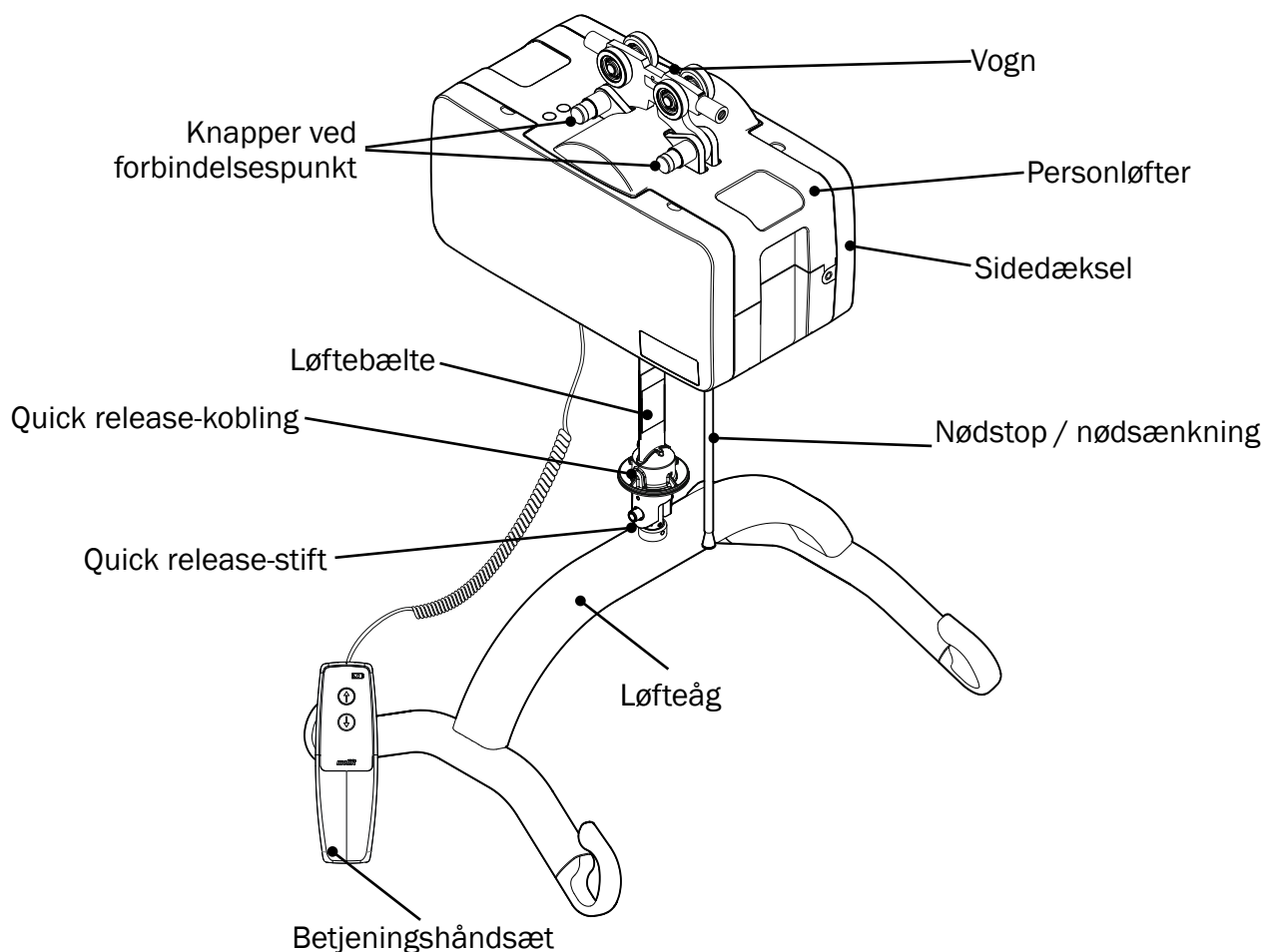


#### Komponenter, Molift Air 200/350



#### Produktmærkat 200 / 350

**Air 200**




Gross weight 216kg / 476lbs  
SWL 205kg / 452lbs  
24V SLA, 25.6V (LiFePO4), IP24  
Duty cycle 10%




SWL-værdi (sikker arbejdsbelastning)

**Air 350**

Gross weight 361kg / 797lbs  
SWL 350kg / 772lbs  
24V SLA, 25.6V (LiFePO4), IP24  
Duty cycle 10%



#### Id-mærkat





(01)XXXXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXX(21)XXXXXX

REF	ABCDEFGHIJ
SN	XXXXXX


YYYY-MM-DD

Etac A/S  
Parallevej 3  
DK-8751 Gedved  
www.etac.com



Serienummer Artikelnummer Produktionsdato

# Komponenter, Molift Air 500

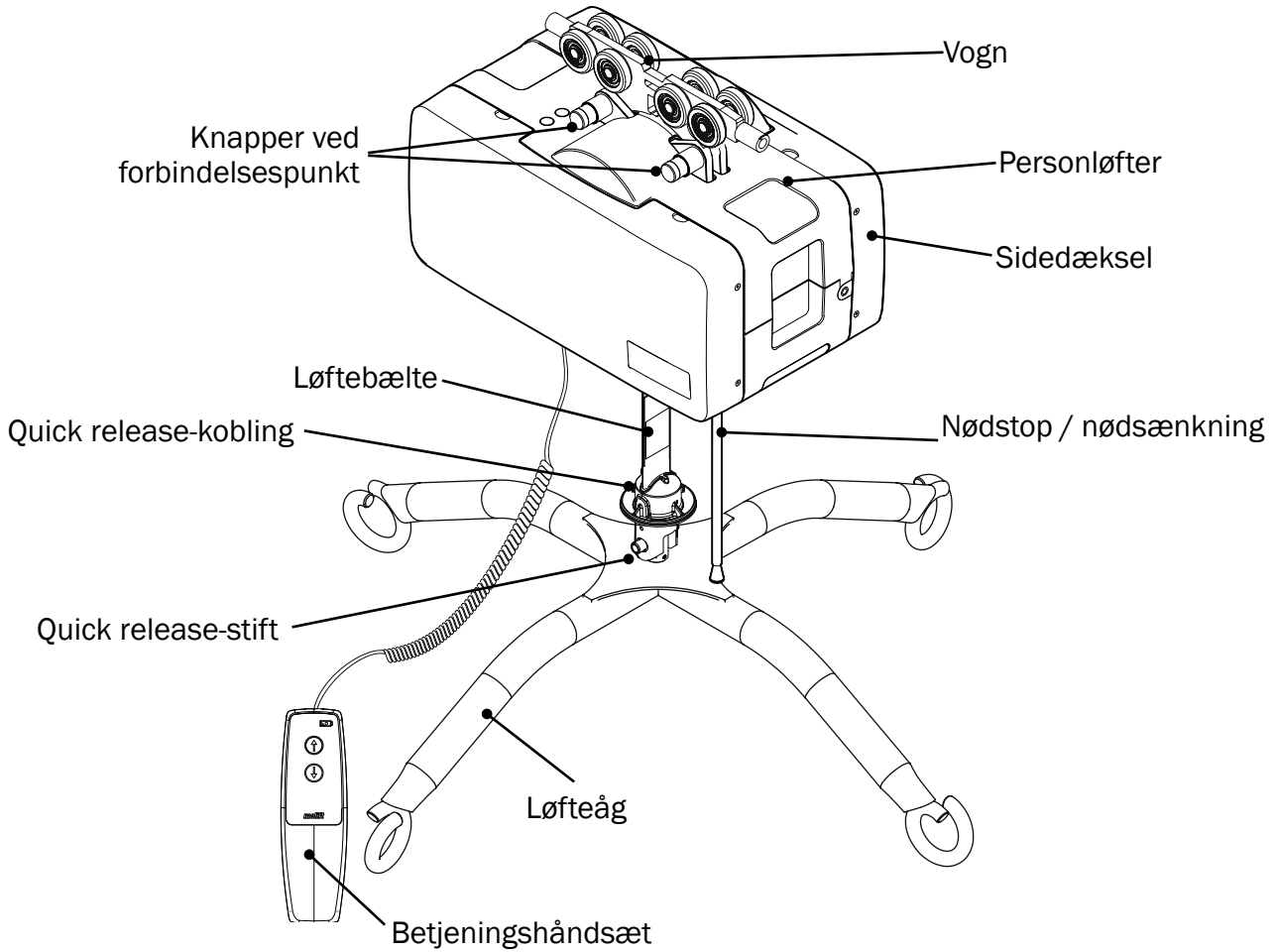

## Produktmærkat 500

**Air 500**  
 Gross weight 519,4kg / 1145,1lbs  
 SWL 500kg / 1102,3lbs  
 24V DC, IP24  
 Duty cycle 10%

SWL-værdi (sikker arbejdsbelastning)

## Id-mærkat

(01)XXXXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXX(21)XXXXXX

REF	ABCDEFGHIJ
SN	XXXXXX

YYYY-MM-DD

Etac A/S  
 Parallelvej 3  
 DK-8751 Gedved  
 www.etac.com

Serienummer Artikelnummer Produktionsdato

En kopi af dette dokument kan downloades på [www.etac.com](http://www.etac.com).

Scan QR-koden på produktmærkaten for at få adgang til produktets hjemmeside. Brugervejledningen kan findes i dokumentafsnittet.

Artikelnummer (se id-mærkat):

.....

Serienummer (se id-mærkat):

.....

Produktionsår:

.....

Ejer:

.....

Angiv model:

Molift Air 200  
Molift Air 350  
Molift Air 500

Sejlet skal inspiceres særskilt og er ikke med i dette eftersyn.

## Serviceindikatorens lys

Vær opmærksom på farven på serviceindikatorens lys:

Status	Service lys	Tilstand
	(Intet lys)	Klar til brug
	Gult	Udfør periodisk eftersyn
	Grønt blink	Bestil service
	Rød	Udfør service
	Rød (og lyd ved aktivering)	Udfør service øjeblikkeligt

## Anvendelsessituation

Hjemmet  
Hospital  
Plejhjem  
Andet



**Det periodiske eftersyn skal udføres af en person, der er egnet og tilstrækkeligt kvalificeret og godt bekendt med konstruktion, brug og pleje af personløfteren**



**Personløfterens software Molift Service-værktøj giver mulighed for at indtaste dato for PI og navnet på inspektøren sammen med yderligere oplysninger. Molift anbefaler at tilføje alle observationer / bemærkninger vedrørende personløfteren i Molift Service-værktøjet for at have en komplet historiklog over personløfteren**



**Dette inspektionsdokument dækker kun hejseværket. Skinnesystemet skal efterses i henhold til PI19210**

## Visuel undersøgelse



**Visuel undersøgelse af den lastbærende struktur for at sikre, at der ikke er skader, revner, flosser eller deformationer. Alle kontrolpunkter skal tjekkes for at godkende personløfter til videre brug**

OK Ikke OK

OK	Ikke OK	Løftebælte
OK	Ikke OK	Produktmærkat
OK	Ikke OK	Plastdæksler
OK	Ikke OK	Betjeningshandsæt
OK	Ikke OK	Ledninger
OK	Ikke OK	Øvrig elektronik
OK	Ikke OK	Løfteåg
OK	Ikke OK	Kroge til løfteåg
OK	Ikke OK	Quick release-kobling
OK	Ikke OK	Brugsanvisning / brugervejledning er til stede / tilgængelig

## Funktionel undersøgelse



**Test FUNCTION, og inspicer for slitage og skader. Alle kontrolpunkter skal tjekkes for at godkende personløfter til videre brug**

OK Ikke OK

Nødstopknappen er fuldt funktionsdygtig og afbryder strømmen, når den aktiveres. Nulstil afbryder

Tjek værktøj til nødsænkning (findes bag dæksler)

Elektrisk nødsænkning

Betjeningshåndsæt (knapper, ledningsstik og batteriindikator)

Betjeningshåndsættets funktionalitet

Quick release-kobling (drejeled bevæger sig frit, når det drejes 360° og uden støj)

Quick release-stift

Knapper ved forbindelsespunkt

Vinkelsensor. Træk løftebæltet sidelæns i alle fire retninger

Kontrolleret, at personløfteren fungerer korrekt og kører uden last hele vejen op og ned uden unormal støj

Stopanordninger

Hvis alle punkter indtil videre er "OK", skal personløfteren testes med SWL.

**BEMÆRK!** Sørg for, at SWL for hele personløftersystemet overstiger eller er lig med personløfterens SWL, før belastningstests udføres.

Udfør én løftecyklus med vægt, der svarer til SWL med min. rækkevidde på 500 mm i toppen af løfteområdet. Bremsen må ikke glide under belastning. Bevægelsen skal være glat og jævn og uden usædvanlig støj

OK Ikke OK

Flyt personløfteren lastet med SWL gennem hele skinnesystemet. Kontroller, at afbøjning og affjedring er acceptabelt

Udfør ny visuel kontrol; skader og deformationer som beskrevet ovenfor. Eventuelle beskadigede dele skal repareres eller udskiftes, og testen gentages, indtil personløfteren fungerer korrekt

Opladeren er funktionsdygtig

Batteri. Batterilyset er grønt, og serviceindikatoren lys er slukket

Tilbehør (f.eks. vægt, fremdrift, IRC):

.....

.....

### Udført af

Fulde navn:

.....

Dato/sted:

.....

Underskrift:

.....

Godkendt uden fejl

Næste eftersyn (ÅÅÅÅ/MM): /

Udfør "Nulstilling af personløfter"

Personløfteren er markeret "Ude af drift" og sendt til reparation

Personløfteren er ikke berettiget til reparation og er taget ud af drift


Hvis det periodiske eftersyn afslører en defekt, slitage eller anden skade, der bringer patientens sikkerhed i fare, må personløfteren ikke anvendes, før manglen er afhjulpet.

Ejeren er underrettet





**Grundet lovkrav skal dette dokument eller en kopi arkiveres sammen med ejerens serviceløgbog**


Hvis den godkendes uden fejl, påføres inspektionsmærkat på coveret indvendigt, og måned og år til **næste** eftersyn noteres herpå. Ved bestilling af mærkat anvendes varenummer 1100306

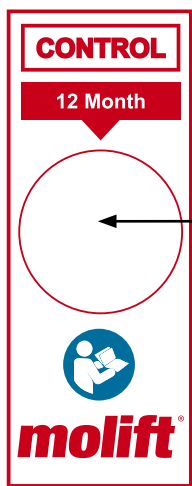


Notér måned og år til næste eftersyn på mærkaten

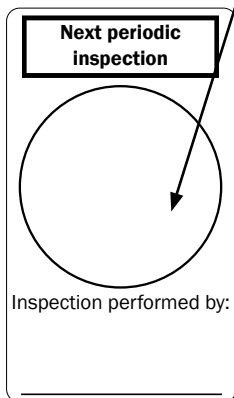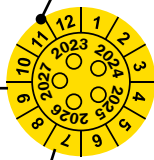


## Nulstilling af personløfter

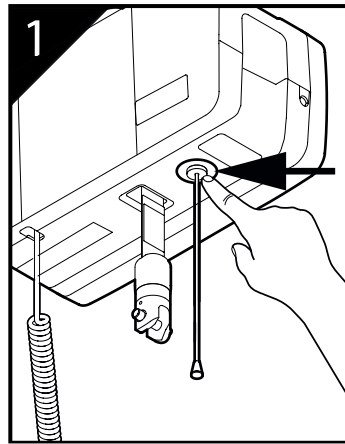


Sørg for, at personløfteren er tændt, og at nødstop er deaktiveret.

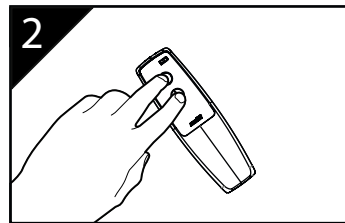

Tryk og hold begge knapper nede i ca. 4 sek.:  
Første bip – når du begynder at trykke.  
Næste bip – stop med at trykke.

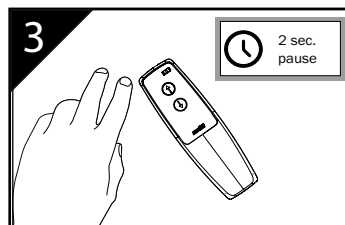

Hold pause i ca. 2 sek.

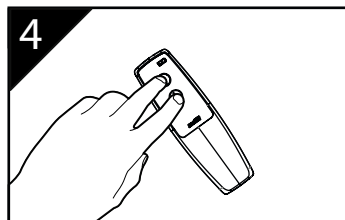

Tryk og hold begge knapper nede i ca. 4 sek.:  
Første bip – stop med at trykke.  
Eftersynsindikatorens lys er slukket  
– nulstilling fuldført.