



Kelvin komfort kørestol

Rengørings- og desinfektionsvejledning

Korrekte rengøringsrutiner kan forlænge produktets levetid



Rengøring af stolens puder

1. Fjern snavs og spild fra puden før rengøringen starter.
2. Tør puden af med en ren klud vredet op i vand med et mildt rengøringsmiddel.
3. Tør puden grundigt af med en ren, tør klud. Puden skal være helt tør, før den tages i brug igen eller lægges væk.

Desinfektion og vask

Til overfladedesinfektion af puder kan engangsklude med ethanol (fx Wet Wipe 70 %) bruges eller et klorprodukt 1000-1200 ppm* (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

Kelvin komfort kørestolens bomuldsbetræk kan vaskes ved 60° C og tørretumbles ved medium varme.

Kelvin komfort kørestolen er beregnet til indendørs brug, men tåler også at blive brugt udendørs. Skulle Kelvin komfort kørestolen blive våd, bør den hurtigst muligt tørres af med en tør klud. Hvis stellet er snavset, kan det tørres af med en klud opvredet i mildt sæbevand.

Det anbefales, at stolen aftørres/støvsuges mindst én gang om ugen, og hjulene tjekkes for snavs.

NB! Hvis der i særlige tilfælde er behov for maskinvask af puderne, skal fyldet tømmes ud før vask. Bagefter hænges puderne til tørre med det elastiske bomuldsbetræk nedad så vandet kan løbe fra. Må ikke tørretumbles.

* I henhold til SSI-retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bæretilstand i sundhedssektoren".

** I henhold til "NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren".