

Rengøring af vekseltrykmadrass og pumpe

Det er vigtigt, at følge de gældende lokale retningslinjer for rengøring af madrasser. (NIR og DS 2451-10:2014)

Tør pumpeenheten med en fugtig klud og et mildt vaskemiddel, og hold pumpen væk fra støv. Hvis andet vaskemiddel anvendes, skal der vælges et middel, som ikke vil have nogen kemisk effekt på overfladen af plast. Pumpen tåler desinfektionsvæske f.eks. alkohol opløsning på 70%. Ved sporedannende bakterier eller virus anvendes eks. wetwipes tilsat klor. Følg produktets anvisninger.

Advarsel - Pumpen må ikke nedsænkes i væske.

Rengør først madrassen på ydersiden med egnet desinfektions- eller rengøringsmiddel. Ved synlig forurening følges den lokale instruks. (f.eks. ved forurening med blod, kropsvæsker m.v.) Vask herefter betrækket i maskine ved 80° C. Betrækket tåler tørretumbling ved lav temperatur. Alle dele skal være helt tørre før genbrug.

Advarsel - Brug ikke fenolholdige rengøringsmidler.

Advarsel - Tør ikke madrasser i direkte sollys.

Hvis der benyttes transporttasker skal disse også rengøres efter de gældende retningslinjer og værre tørre før brug.

Opbevaring

1. Læg madrassen fladt med oversiden opad.
2. Rul madrassen fra hovedenden med CPR-ventilerne åbne.
3. Benyt de lange stropper til at binde rundt om madrassen. Herved rulles madrassen let ud igen.
4. Opbevar madrassen tørt og ikke for varmt.

NB - Undgå at folde for skarpt eller lægge tunge ting oven på madrassen.

Vigtigt før ibrugtagning efter vask

Besigtig madrassetræk, luftslanger, kabler, stik og pumpe for evt. skader. Defekte dele skal udskiftes før madrassen tages i brug igen.

Ved behov, kontakt venligst Zibo Athene kundeservice på tlf. 76 900 407 eller post@ziboathene.dk.

Service

Benyt serviceetiket placeret på pumpen for at se tidspunkt for pumpe service. Service kan udføres af eget depotpersonale. Det anbefales, at skifte ydre og indre filter 1 gang årligt, for at sikre uforstyrret drift. Efterse betræk, luftceller og pumpe om alle delene fortsat er i orden. Hvis det ønskes, kan service gennemføres ved Zibo Athene.