



Besiktningssprotokoll

för ComfortSystems sängsortiment

ID nr. sänglyft:	Adress:
ID nr. sängbotten:	Avd:
Komplett besiktning EJ utförd <input type="checkbox"/> Pga.:	Rum:
Besiktning/smörjning utförd enl. protokoll av:	Datum:

Besikta säng kontinuerligt för ökad säkerhet, högre prestanda, längre livslängd och bättre totalekonomi. Punkter med är en påminnelse för smörjning. är Prime och är litiumfett (rekommendation från ComfortSystem) Efter smörjning, torka bort överflödigt fett. **O.B.S!** Undvik spill av smörjmedel på golv och kringliggande miljö, "halkrisk".

KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER

1. ELEKTRONIK		Utan anmärkning	Anmärkning	Smörjning utförd
1. Kablar/Kontakter är oskadda och rätt anslutna				
1.1	Ryggmotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Fotmotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Lyftmotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	Manöverdon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	Elektronik (kontrollera även att grön kontrollampa lyser)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. SÄNGLYFT				
2.1	Sänglyftens arbetsområde, ca 50 cm mellan högsta-/lägstaläge.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Synliga skador på mekaniken. Onaturliga glapp på infästningar/leder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Slitage/glapp/skador på hjul eller dess infästning. Låsning fungerar tillfredställande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	Synliga skador på lyftmotor. Infästningspunkter, sprintar/låsningar är intakta och säkrade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Rengör och smörj lager/lagerbanor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. SÄNGBOTTEN				
3.1	Synliga skador på sängbottens mekanik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Trä/alu lattor och infästning oskadd och sitter på plats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	Sängbottens madrassstopp och skruvar åtdragna i fotmadrassstopp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Infästningar för rygg-/lårdel är oskadd och ej onaturliga glapp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Leder/plastgångjärn är oskadda och sprint/låsring är intakt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6	Synliga skador på ryggmotor. Infästningspunkter, sprintar/låsningar är intakta och säkrade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7	Synliga skador på fotmotor. Infästningspunkter, sprintar/låsningar är intakta och säkrade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8	Ryggdel går upp i ca 70 grader, högsta-/lägstaläge.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.9	Fotdelen kan köras till högsta-/lägstaläge.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.10	Kontrollera manöverdosans alla funktioner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



