

Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbe vand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen. Smør hjulens aksler regelmæssigt med smøreolie. Kontroller jævnligt at alle dele sidder fast, og efterspænd greb og skruer. Hvis der er dele der er brækkede, revnede eller meget slidte skal forhandleren kontaktes. Produktet udsættes for slid ved brug, og det anbefales regelmæssigt at få udført en kontrol af en fagmand.

Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Hjulene kører kun svært rundt	Der er skidt mellem hjulene og gafen	Rengør mellem hjul og gafel. Aftag evt. hjulet. Smør de bevægelige dele med smøreolie
Bremserne virker ikke som de skal eller een af bremserne virker bedre end den anden	Bremseskoen er slidt eller bremserne er ikke justeret korrekt	Forsøg at justere bremsekablet. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren
Sædet låser ikke i korrekt position	Kontroller om låsemekanismen går i indgreb. Se om der evt. sidder noget i vejen eller om noget ikke er fastspændt	Hvis problemet ikke umiddelbart kan løses skal forhandleren kontaktes

Bortskafelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afeveres på en kommunal genbrugsplads.