

Vedligeholdelse af Leopard, Buffalo, Gepard og Lion rollator

Normalt snavs på metal- og plastdele kan fjernes med almindelige rengøringsmidler. Benyt kun milde sæbemidler. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skuremidler, ej heller stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Trods den stabile konstruktion og brugen af modstandsdygtige og korrosionsbestandige materialer vil rollatoren blive udsat for et vist slid. Det anbefales derfor at få en fagmand til at tjekke den jævnligt (min. én gang årligt). Ved en sådan kontrol bør følgende efterses: Visuel kontrol af alle rammedele hvad angår skævheder, beskadigelser, slid og korrosion samt i særdeleshed kontrol af:

- ✓ Rollatorstellet
- ✓ Skubbehåndtag og greb
- ✓ Bremseregreb og bremsekabler
- ✓ Styregafler og forhjul
- ✓ Baghjul med bremser
- ✓ Sæde og låseanordning
- ✓ Indkøbstaske
- ✓ Tjek om der mangler nogle montagedele (fx møtrikker, skruer, nitter) og om de fungerer og er i god stand

Rensning af hjulene

Det anbefales at rengøre hjulene med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Foretag også smøring af lejer ved at spraye et smøremiddel på engang imellem eller når hjulene begynder at knirke.

Genanvendelse

Rollatoren er egnet til genanvendelse. Før genanvendelse skal den rengøres og desinficeres samt være kontrolleret i henhold til afsnittet om vedligeholdelse.

Vær opmærksom på at hvis rammen er bøjet eller brækket må rollatoren ikke genanvendes før hele rammen/rollatoren udskiftes.

Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Rollatoren kan kun med besvær skubbes eller styres	Der er skidt mellem hjulene og gafen	Rengør mellem hjul og gafel. Aftag evt. hjulet. Smør de bevægelige dele med smøreolie
Bremserne virker ikke som de skal eller én af bremserne virker bedre end den anden	Bremseskoen er slidt eller bremserne er ikke justeret korrekt	Forsøg at justere bremsekablet. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren
Sædet låser ikke i korrekt position	Kontroller om låsemekanismen går i indgreb eller om den er defekt. Se om der evt. sidder noget i vejen eller om noget ikke er fastspændt.	Kontroller eller udskift låsemekanismen. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren.

Bortskafelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.