

## Vedligeholdelse af Jaguar rollator

Normalt snavs på metal- og plastdele kan fjernes med gængse rengøringsmidler. Benyt kun milde sæbemidler, Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skuremidler, ej heller stive børster og skarpe genstande til rengøringen. Trods den stabile konstruktion og brugen af modstandsdygtige og korrosionsbestandige materialer vil rollatoren blive udsat for et vist slid. Det anbefales derfor at få en fagmand til at tjekke den efter jævnlige (min. én gang årligt). Ved en sådan kontrol bør følgende tjekkes:

- ✓ Rollatorstellet
- ✓ Skubbehåndtag og greb
- ✓ Bremseregreb og bremsekabler
- ✓ Styregafler og forhjul
- ✓ Baghjul med bremser
- ✓ Alle låseanordninger
- ✓ Indkøbstaske
- ✓ Tjek om der mangler nogle montagedele (fx møtrikker, skruer, nitter) og om de fungerer og er i god stand

## Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Rollatoren kan kun med besvær skubbes eller styres	Der er skidt mellem hjulene og gafen	Rengør mellem hjul og gafe. Aftag evt. hjulet. Smør de bevægelige dele med smørelolie
Bremserne virker ikke som de skal eller én af bremserne virker bedre end den anden	Bremseskoen er slidt eller bremserne er ikke justeret korrekt	Forsøg at justere bremsekablet. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren

## Bortskafelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afeveres på en kommunal genbrugsplads.