

Vedligeholdelse af Kakadu bad- og toiletstol med tilt

Pleje:

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler eller alkoholholdige produkter og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der bør foretages af en sagkyndig.

Advarsel

Ved anvendelse af stolen under meget kalkholdigt vand, kan en binding og ophobning af kalk på hjullejer og andre bevægelige dele forekomme. I dette tilfælde kan der rengøres med et kalkopløsende middel og derefter smøres med smørreolie.

Advarsel

Ved anvendelse i meget klorholdige omgivelser vil ekstra stærk korrosion forekomme og garantien vil bortfalde.

Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Toiletstolen er ikke stabil	Hjulene er justerede til forskellige højder	Juster alle hjulene til samme længde.
Hjulene drejer ikke let	Der har samlet sig skidt på hjulenes aksel	Rengør hjulenes aksler for skidt
Tilt funktionen virker ikke	Mulig fejl i gascylinderen	Kontakt forhandleren

Bortskafelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afeveres på en kommunal genbrugsplads